

Incontinence urinaire masculine

Arbre décisionnel Conveen®


VU À LA
TÉLÉ

Choix de l'étui pénien Conveen Optima

> Déterminer le diamètre et la longueur



Conveen Optima préféré aux protections absorbantes par 2 hommes sur 3*

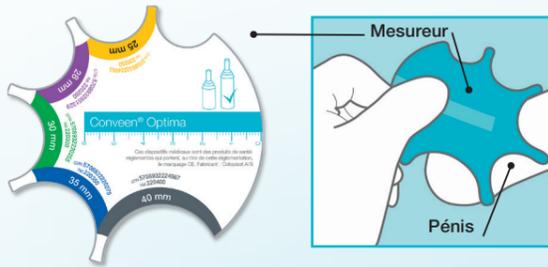

Choix du diamètre :

Mesurer à l'endroit le plus large du pénis.
En cas d'hésitation entre 2 tailles prendre le diamètre le plus proche.

Choix de la longueur :

De 2 à 8 cm → Conveen Optima Specific
Plus de 8 cm → Conveen Optima (Standard)

Version	Longueur		● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima** Version standard 7,8 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 4 cm	Réf GTIN		220250 5708932224963	NOUVEAU 220280 5708932851329	220300 5708932220255	220350 5708932220279	220400 5708932224987
Conveen Optima Specific** Version courte 4,6 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 3,5 cm	Réf GTIN	221210 5708932244879	221250 5708932244893		221300 5708932244916	221350 5708932244930	

Choix de la poche à urine Conveen

> Type d'incontinence

1 CUILLÈRE



1 VERRE



3 VERRES



PERSONNE ALITÉE



Légère à modérée***
(< 250 ml) ou fuites urinaires



Conveen Active**

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

Référence	GTIN
Conveen Active 255020	5708932467568

250 ml tub. 7 cm ajustable

Modérée*** (250 à 750 ml)



Conveen 0,5 l ou 0,75 l**

Boîte de 30 poches graduées

Référence	GTIN
Conveen 0,5 l 051600	5708932498227
tub. crénelée 30 cm ajustable	
Conveen 0,5 l 051610	5708932498241
tub. crénelée 50 cm ajustable	
Conveen 0,75 l 051670	5708932498265
tub. crénelée 50 cm ajustable	

Sévère*** (> 750 ml)
ou patient à mobilité réduite



Conveen 1,5 l**

Boîte de 30 poches graduées

Référence	GTIN
Conveen 1,5 l 050620	5708932498289

tub. lisse 90 cm ajustable

Tout type d'incontinence



Poche de nuit Conveen 2 l**

Boîte de 30 poches graduées

Référence	GTIN
Conveen 2 l 213460	5701780820615

tub. crénelée 140 cm ajustable

+ Solutions de maintien

Conveen Attaches de jambe**

Vendues à la paire, conditionnées par boîte de 10

Référence	GTIN
050501	5701780581431



Conveen Filets**

Boîte de 2 filets

Taille / Circonférence	Référence	GTIN
● Standard / 40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium / 45-65 cm	783687	5708932507172
● Large / 55-85 cm	783695	5708932507202

+ Solutions de stabilisation



Conveen Porte-poche de lit

Vendus à l'unité, conditionnés par boîte de 10

Référence	GTIN
050700	5708932533485



Conveen Porte-poche de sol

Vendu à l'unité

Référence	GTIN
380431	5708932263313

L'emballage de l'étui pénien Conveen Optima est recyclable et valorisable au même titre que les bouchons de bouteilles en plastique auprès d'associations type 1 bouchon = 1 sourire.

Vous avez des questions ?

Votre représentant Coloplast : _____

Tél. : _____

Vous pouvez également joindre notre service client au :

01 56 63 18 00

Disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

* Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etuis péniens Conveen Optima vs les protections absorbantes. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal: Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : «limitation des activités quotidiennes» (p=0,01) et «impact de l'incontinence» (p=0,045). La majorité des patients (69%) ont préféré les étuis péniens à leurs protections absorbantes habituelles (p=0,002).

** Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

*** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

Produits Conveen : dispositifs médicaux de classe I, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.