

Exemple de Prescription

(Pour 1 mois d'utilisation)

Dr Dupont
26 rue de la Source
54000 NANCY


M. Durand

- Conveen Optima : étuis péniens,
1 boîte RÉF. : 220300
- Conveen Poche de Jambe : 0,75 L,
1 boîte RÉF. : 051670
- Conveen Attaches de jambe :
1 boîte RÉF. : 050501
- Conveen Poche de nuit 2 L :
1 boîte RÉF. : 213460

Attention : Précisez bien les marques
Conveen Optima et Conveen.



Votre délégué Coloplast :

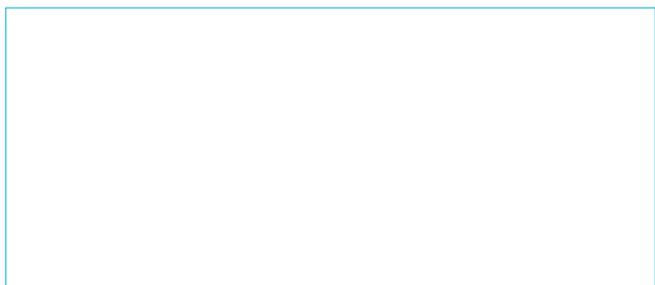

Conseils d'utilisation de l'étui pévien en 3 étapes

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

1. Préparation

- S'assurer du bon diamètre de l'étui, en vous aidant d'une règle de mesure Coloplast.
- Le diamètre du pénis doit être mesuré à l'endroit le plus large. Si la taille du pénis est entre 2 tailles, il faudra prendre la plus grande.
- Dégagez la base du pénis en coupant les poils à l'aide de ciseaux. L'utilisation d'un rasoir est fortement déconseillée car elle pourrait provoquer des micro-lésions au niveau de la peau.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon non gras.
- Effectuez une toilette intime à l'eau et au savon doux (à pH neutre). Ne pas utiliser de savon gras ou de crème, ce qui diminuerait l'efficacité de l'adhésif.
- Séchez bien le pénis avant de poser l'étui pévien.

2. Mise en place



1 Déroulez légèrement l'étui avant de le positionner sur l'extrémité du pénis, en laissant un espace de 1 à 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui afin de ne pas gêner l'écoulement des urines.



2 Maintenez l'étui pévien en place à l'aide d'une main, et utilisez l'autre pour le dérouler grâce à la double languette. L'étui pévien doit être déroulé doucement et sans à coups.



3 Après l'avoir complètement déroulé, exercez 2 à 3 pressions sur l'étui pévien afin de permettre une bonne adhésion et une bonne étanchéité.



4 Avant de connecter la poche à l'étui pévien : vérifiez que le robinet de vidange soit en position fermée et froissez la poche en vue de faciliter son remplissage. Connectez la poche de recueil d'urine à l'étui pévien en enfonçant le plus loin possible le connecteur de la poche dans l'embout de l'étui pévien.

3. Retrait et renouvellement

- L'étui pévien et la poche vidée peuvent être jetés à la poubelle avec les déchets ménagers.
- La petite coque conditionnant l'étui est recyclable comme les bouchons de bouteilles en plastique.
- Par mesure d'hygiène, il convient de **changer l'étui et sa poche de recueil une fois par 24h****.

Dispositifs médicaux de classe I. Fabricant : Coloplast A/S.

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Documentation réservée aux professionnels de santé

Soins des stomies
Urologie & Continence
Soins des plaies



Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 01917E - PS - Juillet 2015



Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf
6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00

Conveen®
Conveen® Active
Conveen® Optima



Incontinence urinaire masculine

Conveen®
La solution préférée des hommes*




Conveen Optima
préférée aux
protections
absorbantes
par 2 hommes
sur 3*

Conveen® : Une solution fiable et discrète*


Le système collecteur Conveen

La solution Conveen pour les fuites urinaires masculines se compose d'un étui pénien et d'une poche de recueil des urines.

Afin de s'adapter à chaque morphologie et degré de sévérité de l'incontinence, nous proposons un large choix d'étuis (longueur et diamètre) et de contenance de poches (250ml à 2L)

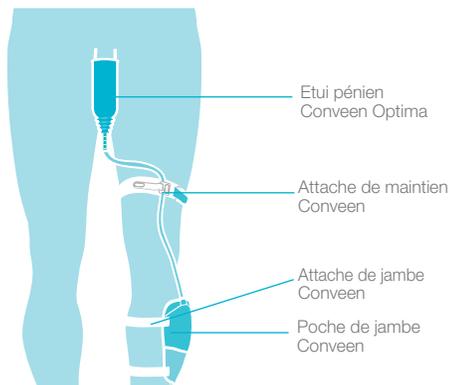

1. Choix de l'étui pénien Définir la longueur et le diamètre à l'aide de la réglette de mesure

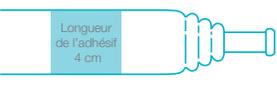Version	Longueur	● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima Version standard 7,8 cm Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex	 Longueur de l'adhésif 4 cm	Réf GTIN	220250 5708932224963	NOUVEAU 220280 5708932851329	220300 5708932220255	220350 5708932220279	220400 5708932224987
Conveen Optima Specific Version courte 4,6 cm Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex	 Longueur de l'adhésif 3,5 cm	Réf GTIN	221210 5708932244879	221250 5708932244893	221300 5708932244916	221350 5708932244930	

Intégralement remboursé***

2. Choix de la poche Définir le degré d'incontinence

L'incontinence urinaire est souvent liée :

- à l'avancée en âge
- à une chirurgie (prostate, vessie)
- à une affection neurologique (blessés médullaires, syndrome de la queue de cheval, sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)
- au diabète compliqué...

Les étuis péniers présentent de nombreux avantages :



• Un seul change par jour**



• Gestion des odeurs*



• Respect de l'état cutané*



• Risque de chutes limité (poches de grande capacité évitant au patient de se lever)



• Contrôle des urines

Légère à modérée**** (<250 ml) ou fuites urinaires	Modérée**** (250 à 750 ml)	Sévère**** (>750 ml) ou patient à mobilité réduite																								
 Conveen Active	 Conveen 0,5 l ou 0,75 l	 Conveen 1,5 l																								
Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré	Boîte de 30 poches graduées	Boîte de 30 poches graduées																								
Intégralement remboursé***	Intégralement remboursé***	Intégralement remboursé***																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Référence</th> <th>GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 ml tub. 7 cm ajustable</td> <td>255020</td> <td>5708932467568</td> </tr> </tbody> </table>		Référence	GTIN	250 ml tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Référence</th> <th>GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable</td> <td>051600</td> <td>5708932498227</td> </tr> <tr> <td>0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable</td> <td>051610</td> <td>5708932498241</td> </tr> <tr> <td>0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable</td> <td>051670</td> <td>5708932498265</td> </tr> </tbody> </table>		Référence	GTIN	0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227	0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241	0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Référence</th> <th>GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable</td> <td>050620</td> <td>5708932498289</td> </tr> </tbody> </table>		Référence	GTIN	1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289
	Référence	GTIN																								
250 ml tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568																								
	Référence	GTIN																								
0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227																								
0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241																								
0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265																								
	Référence	GTIN																								
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289																								


Poche de nuit Conveen 2 l
A raccorder à la poche de jambe

Intégralement remboursé***

	Référence	GTIN
Boîte de 30 poches graduées		
2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615



Pour les poches de jambe 0,5L, 0,75L et 1,5L penser aux attaches de jambes



Intégralement remboursé***
Conveen Attaches de jambe
Vendues à la paire par boîte de 10

Référence	GTIN
050501	5701780581431

* Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etuis péniers Conveen Optima vs les protections absorbantes. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal: Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : "limitation des activités quotidiennes" (p=0,01) et "impact de l'incontinence" (p=0,045). La majorité des patients (69%) ont préféré les étuis péniers à leurs protections absorbantes habituelles (p=0,002). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniers Conveen Optima pour la maîtrise des odeurs et le respect de l'état cutané (p<0.05).

** CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009: Page 43.

*** Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

**** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.