



# Les troubles de la continence

Brochure gamme - Septembre 2022



Visionnez les vidéos d'application en  
scannant les QR codes dans la brochure  
ou visitez [ColoplastProfessional.fr](https://ColoplastProfessional.fr)



**Coloplast**



# Le développement durable, un sujet au cœur des préoccupations de Coloplast

*Parmi les valeurs de Coloplast, le respect de l'environnement prend toute sa place.*

## Les matériaux et le développement des produits

Coloplast choisit des matériaux respectueux pour l'environnement pour fabriquer ses produits. Nos produits et leurs emballages en carton ont été conçus dans une optique de développement durable. Comme vous pourrez le constater, toutes les boîtes de nos produits peuvent être recyclées. Afin de limiter le volume des déchets, nous utilisons des boîtes de taille réduite au maximum.



## Les méthodes de fabrication

La politique du groupe Coloplast est de s'investir dans le respect de l'environnement. C'est pourquoi, tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001. Cette certification permet de montrer que les méthodes de fabrication respectent un certain nombre de critères afin de préserver l'environnement<sup>1</sup>.

## La production

Le PVC est un composant thermoplastique qui contient très souvent des phtalates (groupe de produits chimiques utilisés comme plastifiant et dont la toxicité est bien connue). On reproche aux phtalates leur pouvoir cancérogène et leur non-recyclage<sup>2</sup>. Conscient des risques pour les utilisateurs et l'environnement, Coloplast a choisi de privilégier des produits sans PVC ni phtalates. C'est notamment le cas des sondes SpeediCath fabriquées en polyuréthane et de l'étui pénien Conveen Optima composé de polysiloxane.



## Le recyclage

Les boîtes et conditionnements de transport de nos produits sont en carton à base de fibres vierges et peuvent prétendre à un recyclage. Les coques individuelles des étuis Conveen Optima peuvent être recyclées au même titre que les bouchons de bouteilles en plastique. En 2021, 58 % des déchets de production ont été recyclés.

## Notre ambition pour 2025<sup>3</sup>

**90%** d'emballages recyclables

**80%** d'emballages fabriqués à partir de matériaux renouvelables

**Net Zéro** carbone des émissions de portée 1&2<sup>4,5</sup>

**100%** d'énergie renouvelable

1. Site de l'organisation internationale de normalisation [www.iso.org](http://www.iso.org)

2. INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), fiche sur les phtalates disponible à l'adresse web : [http://www.inrs.fr/hm/les\\_phtalates.html](http://www.inrs.fr/hm/les_phtalates.html)

3. Rapport interne Coloplast "Sustainability Report 2020-2021"

4. En tonnes de CO<sub>2</sub>

5. Objectif soumis à Science-Based Targets initiative (SBTi) pour validation

# Sommaire

## Sondage intermittent

p. 4 à 25

La gamme SpeediCath :  
- pour hommes  
- pour femmes

La gamme EasiCath

## Sondage à demeure

p. 26 à 29

Sondes à demeure Folsyl et Folatex  
Poches stériles Conveen Triform

## Étuis péniers

p. 30 à 37

Conveen Optima

## Poches à urine

pour le sondage intermittent,  
le sondage à demeure  
et les étuis péniers

p. 38 à 40

Les poches de jambe Conveen et Conveen Active  
Les poches de nuit Conveen  
Les solutions de maintien des poches sur la jambe  
Les solutions de stabilisation de la poche

## Accessoires

p. 41

## Gamme Peristeen

p. 42 à 47

Pour un transit intestinal maîtrisé

Peristeen Plus Irrigation Transanale  
Peristeen Obtal

# La gamme SpeediCath®

*Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi*

**N°1**  
en France\*





# SpeediCath, une gamme conçue pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur

Depuis près de 15 ans, les Laboratoires Coloplast, grâce à la gamme SpeediCath®, ont été les premiers à vous proposer des sondes hydrophiles prêtes à l'emploi, des sondes compactes et des sets de sondage compacts.

La gamme SpeediCath est la plus documentée en matière de performances<sup>1-3, 5,9,10,12-15, 29</sup> des sondes.

## Nous n'avons pas inventé la sonde, mais nous la réinventons chaque jour.



**Les premières sondes prêtes à l'emploi**  
SpeediCath Standard



**Les premières sondes compactes**  
SpeediCath Compact et  
SpeediCath Compact Eve



**Les premiers sets de sondage compacts**  
SpeediCath Compact Set



**Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos**  
SpeediCath Flex



**Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs**  
SpeediCath Flex Set



\* Prix du design remportés :

SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design " Medical design excellence awards 2011" et "Janus de la santé 2010"

SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design "Independent living - design awards"

SpeediCath Compact Eve gagnant du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" et Prix "Design Award IF 2015"

SpeediCath Compact Set gagnant du prix du design "Reddot design awards 2013"

# Ce n'est pas par hasard si la gamme SpeediCath est la plus utilisée en France\*

*La gamme SpeediCath a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels de santé*

## 1. Sécurité et confort urétral

### > Les premières sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

- Facilité de manipulation <sup>5,10,12,13</sup> pour le patient
- Lubrifiant prêt à l'emploi : diminution du risque de contamination exogène lié à la qualité de l'eau

### > Sonde en polyuréthane : 100% sans PVC

Pas de phtalates CMR dans la composition

Les phtalates CMR sont des substances connues pour leurs effets : cancérogènes, mutagènes, repro-toxiques.

### > Lubrifiant à viscosité progressive pour une force de friction minimale et une glisse homogène <sup>1,2</sup>



Sondes SpeediCath


#### 2 couches de lubrifiant à viscosité progressive !

- > Une glisse à faibles frictions de la sonde sur la muqueuse de l'urètre <sup>2</sup>
- > Une glisse homogène sur toute la longueur de la sonde <sup>1</sup>
- > Un ancrage solide du lubrifiant sur la surface de la sonde

### > Des oeils polis, pour pour plus de confort lors du sondage <sup>7</sup>



Oeil polis à chaud

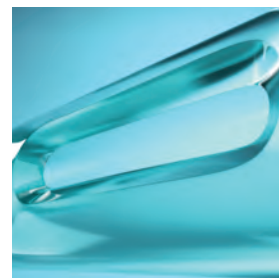

Oeil non polis

Un processus développé spécifiquement pour SpeediCath permet de polir les bords de chaque oeil "à chaud" pour créer une transition parfaitement douce entre l'oeil et la surface de la sonde.

\* Données GERS 2020 : la gamme SpeediCath, la gamme de sondes la plus vendue en France

6 \*\* DTI Report n°35196-1a, Specific analysis for content of phthalates, janvier 2010



## 2. Performances cliniquement prouvées

### 12 études randomisées ont démontré l'efficacité des sondes SpeediCath <sup>2-6, 8-10, 12-15</sup>

Une efficacité sur de nombreux paramètres : facilité d'utilisation, inconfort urétral, infections urinaires, forces de friction, volume résiduel dans la vessie, discrétion, qualité de vie et préférence.

#### Une sonde à frictions minimales

Avec SpeediCath :

- Les forces de frottement sont réduites <sup>1,2</sup>
- La glisse est homogène sur toute la longueur de la sonde<sup>1</sup>
- La glisse est harmonieuse et reproductible d'une sonde à l'autre<sup>1</sup>

#### > Pour réduire le risque de microtraumatisme urétral <sup>2</sup>

Étude clinique prospective, randomisée en cross-over comparant SpeediCath aux sondes Lofric sur 40 volontaires sains <sup>2</sup> avec sensibilité urétrale préservée. Critère principal : Mesures des forces de frictions au retrait de la sonde.

SpeediCath, 2 fois moins de forces de friction <sup>2</sup>

#### > Pour améliorer la tolérance urétrale <sup>2</sup>

65% des hommes ont noté «Aucune douleur» lors du sondage avec SpeediCath vs 43% avec LoFric

#### > Avec SpeediCath, il y a deux fois plus de patients sans infection symptomatique vs les sondes lubrifiées manuellement <sup>3</sup>

Étude clinique prospective multicentrique, randomisée en 2 groupes parallèles - comparant SpeediCath à une sonde sèche lubrifiée manuellement 57 hommes blessés médullaires suivis sur une période d'un an <sup>3</sup>.

### 3. Une gamme complète pour répondre à tous les besoins

#### > Respect des différences et des besoins

Sexe, mode de vie, dextérité, discrétion, auto ou hétéro-sondage...

#### > Gamme étendue

Sondes de longueur standard/compacte, sondes droites/béquillées, sondes pour limiter les oscillations, sondes pour adultes/enfants...

#### Pour les hommes

- a SpeediCath Flex**  
Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos
- b SpeediCath Flex Set**  
Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs
- c SpeediCath Compact Set**  
Le seul set de sondage télescopique, compact
- d SpeediCath Compact Homme**  
La seule sonde compacte télescopique pour homme
- e SpeediCath Control**  
La sonde standard avec un système de contrôle renforcé
- f SpeediCath Standard**  
La sonde standard



#### Pour les femmes

- g SpeediCath Compact Set**  
Le 1<sup>er</sup> set de sondage compact
- h SpeediCath Compact Femme**  
La 1<sup>ère</sup> sonde compacte pour femme
- i SpeediCath Compact Eve**  
La dernière génération de sonde compacte pour femme
- j SpeediCath Standard**  
La sonde standard





# SpeediCath Compact, une solution adaptée au quotidien des utilisateurs

*SpeediCath a su évoluer pour répondre toujours mieux aux besoins des professionnels de santé et des patients.*

## > Des bénéfices clés qui font la différence

### Discrétion

Plus de 90% des patients trouvent la gamme SpeediCath Compact discrète<sup>4,5</sup>  
SpeediCath Compact facilite le stockage et le transport.

### Hygiène

Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur :  
Insertion sans toucher le corps de la sonde, respect de la technique  
«no-touch»<sup>7</sup>

### Facilité d'utilisation<sup>4-6,10</sup>

La majorité des utilisateurs notent les sondes SpeediCath Compact  
plus faciles à insérer que les sondes de longueur standard.

Gamme SpeediCath Compact,  
inscrite en nom de Marque\*\*




## > Une qualité de vie améliorée, en réduisant les contraintes de l'ASI<sup>10</sup>

10 ans après la commercialisation des 1<sup>ères</sup> sondes compactes, une étude, publiée dans The Journal of Urology a démontré les bénéfices des sondes SpeediCath Compact sur la qualité de vie des patients.

Augmentation de 28% du score de qualité de vie ISC-Q\* avec les sondes SpeediCath Compact par rapport aux sondes standards ( $p < 0.001$ ).

**Reconnaissance par la Haute Autorité de Santé de l'Amélioration du Service Rendu (ASR niveau IV) en matière de qualité de vie par rapport aux sondes hydrophiles prises en charge dans les lignes génériques\*\*.**

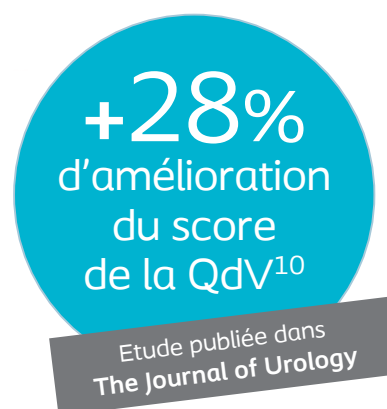

## > La préférence de 6 utilisateurs sur 10<sup>8,10</sup>



6 utilisateurs sur 10  
choisissent SpeediCath Compact  
quand on leur donne le choix



\* ISC-Q = Intermittent Self Catheterization Questionnaire, score validé évaluant l'impact de l'ASI sur la QdV allant de 0 (contraintes lourdes de l'autosondage) à 100 (Aucune contrainte).

\*\* Avis de la CNEDIMTS du 10/07/2021, sondes urinaires SpeediCath Compact. Avis de la CNEDiMTS 21 septembre 2021, set de sondage SpeediCath Compact Set

A portrait of a man with short brown hair and a light beard, looking off to the side. He is wearing a bright green jacket with a dark blue collar and a small logo on the chest. The background is a plain, light grey.

# La gamme SpeediCath® pour homme



# SpeediCath® Compact Set

*Le seul set de sondage télescopique,  
compact pour les hommes :*

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

## Une simplicité prouvée<sup>16</sup>

### SpeediCath Compact Set :

#### > Reconnu par les professionnels de santé pour sa facilité d'utilisation<sup>16</sup>

- 85% des utilisateurs et 100% des professionnels de santé le trouvent facile à utiliser
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set

#### > Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde avec respect de la technique "no-touch"<sup>7</sup>

SpeediCath Compact Set, une solution  
à proposer à tous vos patients,  
en utilisation unique ou en complément  
à l'utilisation des sondes.

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 20 sets


Homme nelatory/droite

Longueur active : 30 cm / Longueur totale : 34 cm

| CH     | Référence | GTIN          |
|--------|-----------|---------------|
| ○12/18 | 284221    | 5708932533515 |



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Compact  
Set homme

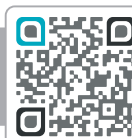

Reconnu  
pour sa facilité  
d'utilisation<sup>16</sup>



reddot design award\*  
winner 2013

Le "red dot" est un prix récompensant les produits au design de grande qualité. Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08 €TTC, remb. Séc. Soc. 74,08 €.



# SpeediCath® Compact homme

*La solution conçue pour les hommes :*

- qui se sondent directement dans les toilettes ou qui souhaitent raccorder une poche
- qui souhaitent une solution discrète, même après utilisation

## SpeediCath Compact Homme :

### > Une solution très discrète pour faciliter le transport, le stockage et l'élimination :

- Grâce à son design compact (19 cm fermé, 30 cm une fois la sonde déployée) et non médical
- Facilite le transport, le stockage et l'élimination <sup>4,10</sup>

### > Simple d'utilisation :

- Plus facile à insérer et à contrôler qu'une sonde standard <sup>4,6</sup>

### > Hygiénique :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch" <sup>4,6,7</sup>

### > Une vidange efficace <sup>8</sup>

### > Connecteur universel

- pour poche à urine, si besoin.

Préférées aux sondes standards par plus de

**6 patients**  
sur **10** <sup>4,10</sup>



JANUS 2010  
DE LA SANTÉ



 **Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath® Compact  
homme en fauteuil



 **Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath®  
Compact homme



Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 30 cm / Longueur totale : 34 cm

| CH      | Référence | GTIN          |
|---------|-----------|---------------|
| ○ 12/18 | 286920    | 5708932472623 |

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design "Medical design excellence awards 2011" et du "Janus de la santé 2010"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94 €TTC, remb. Séc. Soc. 82,94 €.



# SpeediCath® Flex

## La solution conçue pour les hommes :

- qui souhaitent une solution souple avec gaine
- qui se sondent directement dans les toilettes ou souhaitent raccorder une poche
- qui souhaitent une solution discrète même après utilisation

## Un sondage facile dans les moindres détails

### SpeediCath Flex : Flexible, Pratique, Discrète

#### > Flextip : Extrémité souple et olivaire


- L'extrémité flexible suit facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie et aide au passage de la prostate et des sphincters <sup>29</sup>.
- L'extrémité est de forme olivaire pour prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre <sup>30</sup>.

#### > Gaine de protection sèche et hermétique

- Prise en main de la sonde facile et propre.
- En circuit clos, cette gaine permet de conserver l'intégrité de la lubrification et évite la contamination par les bactéries extérieures <sup>31</sup>.

#### > Emballage discret et refermable

- Son format de poche aux couleurs neutres permet de **faciliter le transport**, de **réduire l'encombrement** lié au stockage.
- La sonde et l'emballage peuvent être refermés après utilisation pour une **élimination propre et discrète**.

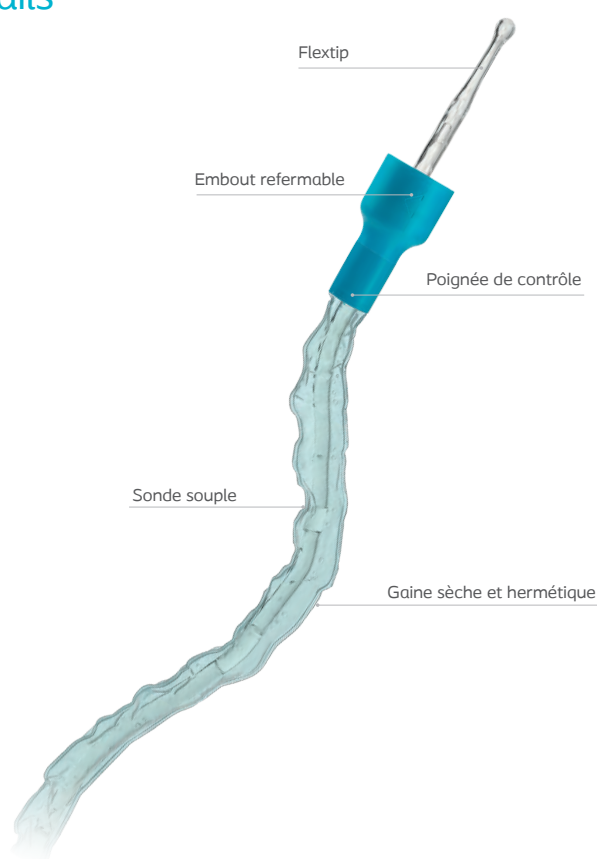

Intégralement remboursé\*

**Format de poche** - Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 289100    | 5708932124263 |
| ○ 12 | 289120    | 5708932124355 |
| ● 14 | 289140    | 5708932124447 |



Intégralement remboursé\*

**Format standard** - Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 289200    | 5708932700252 |
| ○ 12 | 289220    | 5708932700283 |
| ● 14 | 289240    | 5708932700313 |
| ● 16 | 289160    | 5708932124539 |



**Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath® Flex  
homme



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# SpeediCath® Flex Set

Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs, conçu pour les hommes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution tout-en-un sèche au toucher
- qui souhaitent une solution souple avec gaine



## SpeediCath® Flex Set : doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs

### > Flextip : Extrémité souple et olivaire

- L'extrémité flexible suit facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie et aide au passage de la prostate et des sphincters <sup>29</sup>.
- Selon une étude, 86% des utilisateurs de sondes béquillées peuvent utiliser une sonde SpeediCath Flex <sup>29</sup>.



### > Gaine de protection et poche à urine sèches

- Prise en main de la sonde facile et propre grâce à sa gaine de protection
- Vidange facile et contrôlée de la poche à urine <sup>33</sup>
- La poche à urine est facile à déplier

### > Emballage discret et refermable

- Le capuchon permet l'ouverture et la fermeture de la sonde
- La sonde et l'emballage peuvent être refermés après utilisation pour une élimination propre et discrète.
- Pour un sondage n'importe où et n'importe quand

Intégralement remboursé\*

### Poche graduée de 1 L

Boîte de 30 sets

Homme nelaton/droite

Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 289310    | 5701780227971 |
| ○ 12 | 289320    | 5701780227995 |
| ● 14 | 289340    | 5701780228015 |
| ● 16 | 289360    | 5701780228039 |

 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Flex Set



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Nouveau

Extrémité flexible : Flextip

Poignée de contrôle

Anses de préhension

Gaine sèche

Languette à rompre

Une ligne  
prédécoupée

# SpeediCath® Control

La sonde standard avec un système de contrôle renforcé

Un système conçu pour limiter les oscillations

SpeediCath Control :

- > Facile à contrôler et à insérer<sup>11</sup>
- > Peut faciliter l'insertion sans toucher le corps de la sonde<sup>11</sup>

| Intégralement remboursé*                          |           |               |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Boîte de 30 sondes                                |           |               |
| Homme nelaton/droite                              |           |               |
| Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm |           |               |
| CH                                                | Référence | GTIN          |
| ○ 12                                              | 272120    | 5708932505758 |



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1<sup>ère</sup> sonde hydrophile  
prête à l'emploi

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 274080    | 5708932505772 |
| ● 10 | 274100    | 5708932505796 |
| ○ 12 | 274120    | 5708932505819 |
| ● 14 | 274140    | 5708932505833 |
| ● 16 | 274160    | 5708932505857 |
| ● 18 | 274180    | 5708932505871 |

Homme tiemann/béquillée

Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 274900    | 5708932505895 |
| ○ 12 | 274920    | 5708932505918 |
| ● 14 | 274940    | 5708932505932 |

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Adolescent nelaton/droite

Longueur active : 26 cm / Longueur totale : 30 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 276080    | 5708932506052 |
| ● 10 | 276100    | 5708932506076 |
| ○ 12 | 276120    | 5708932506090 |

Enfant nelaton/droite

Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 06 | 277060    | 5708932506113 |
| ● 08 | 277080    | 5708932506137 |
| ● 10 | 277100    | 5708932506151 |



Vidéo d'utilisation

SpeediCath®  
Standard homme



Vidéo d'utilisation

SpeediCath® Standard  
homme en fauteuil



Vidéo d'utilisation

SpeediCath®  
Standard enfant




Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.





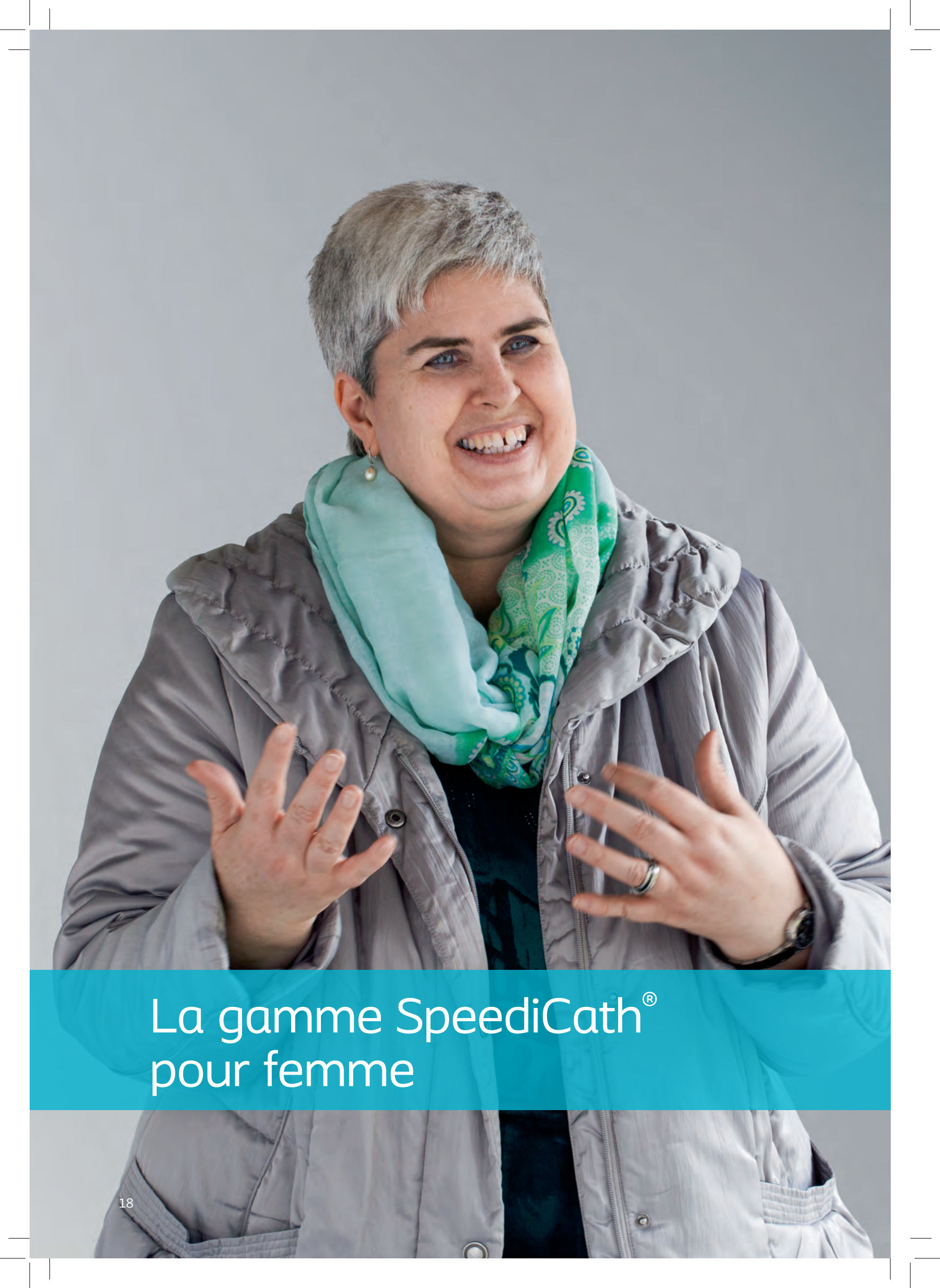

# La gamme SpeediCath<sup>®</sup> pour femme

# SpeediCath® Compact Set

Le 1<sup>er</sup> set de sondage compact commercialisé pour les femmes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes \*
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

## Une simplicité prouvée<sup>16</sup>

### SpeediCath Compact Set :

#### > Reconnu par les professionnels de santé pour sa facilité d'utilisation

- 92% des utilisatrices et 100% des professionnels de santé le trouvent facile à utiliser
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set

#### > Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch"<sup>7</sup>

SpeediCath Compact Set,  
une solution à proposer à  
tous vos patientes, en utilisation  
unique ou en complément à  
l'utilisation des sondes.



reddot design award  
winner 2013<sup>14</sup>

Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 20 sets

Femme nelaton/droite

Longueur active : 9 cm / Longueur totale : 16 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 285201    | 5708932557269 |
| ○ 12 | 285221    | 5708932533546 |
| ● 14 | 285241    | 5708932544870 |



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact Set femme



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08€TTC, remb. Séc. Soc. 74,08€.

# SpeediCath® Compact femme

La solution conçue pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution discrète

Une Qualité de Vie améliorée<sup>10</sup>

Première sonde compacte du marché

SpeediCath Compact Femme :

> Une solution discrète :

- Grâce à son design compact et non médical

> Simple d'utilisation :

- Une sonde compacte facile à insérer<sup>5</sup> et à contrôler

> Hygiénique :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde grâce à sa poignée de préhension (respect de la technique "no-touch")<sup>7</sup>

## SpeediCath Compact Femme

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Femme nelaton/droite

Longueur active : 7 cm / Longueur totale : 14 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 06 | 285760    | 5708932414586 |
| ● 08 | 285780    | 5708932416450 |
| ● 10 | 285800    | 5708932156721 |
| ○ 12 | 285820    | 5708932156745 |
| ● 14 | 285840    | 5708932156769 |

## SpeediCath Compact Plus Femme

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Femme nelaton/droite

Longueur active : 9 cm / Longueur totale : 16 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 288100    | 5708932439275 |
| ○ 12 | 288120    | 5708932439299 |
| ● 14 | 288140    | 5708932439312 |



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact femme



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Compact  
femme en fauteuil



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact enfant



## Poche SpeediCath Compact

Poche à urine raccordable aux sondes de la gamme SpeediCath Compact

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 30 poches

|                   | Référence | GTIN          |
|-------------------|-----------|---------------|
| 0,75 l tub. 30 cm | 210420    | 5708932185240 |
| 0,75 l tub. 50 cm | 210860    | 5708932425216 |

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

\*\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

20 \*\*\* SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design "Independent living - design awards"





# SpeediCath® Compact Eve®

Notre dernière génération de sonde pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui veulent une solution esthétique et discrète, même après utilisation

## La sonde la plus discrète et féminine de notre gamme

### SpeediCath Compact Eve :

- > **Une forme ergonomique pour une meilleure prise en main**
  - Un design intuitif
  - Respect de la technique "no-touch" (sans contact avec le corps de la sonde) <sup>7</sup>
  - Stabilité : la sonde ne roule pas lorsqu'elle est posée horizontalement
- > **Ouverture facile et fermeture sécurisée**
  - Ouverture facile en un seul geste, dans un sens ou dans l'autre <sup>18</sup>
  - Refermable hermétiquement, pour faciliter le transport et l'élimination <sup>19</sup>
- > **Connexion à la poche sécurisée**
  - Connecteur universel pour poche à urine intégré
  - Risque de contamination exogène limité : la sonde reste protégée dans son conditionnement lors de la connexion



reddot award 2015 \*\*

### SpeediCath Compact Eve

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Femme nelaton/droite  
Longueur active : 8,3 cm / Longueur totale : 14 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 281100    | 5708932587549 |
| ○ 12 | 281120    | 5708932567756 |
| ● 14 | 281140    | 5708932587570 |



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact Eve



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solide de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

\*\* SpeediCath Compact Eve lauréat du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" ainsi que du prix "Design Award IF 2015"

# SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1<sup>ère</sup> sonde hydrophile prête à l'emploi



| Intégralement remboursé*                          |           |               |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Enfant nelaton/droite                             |           |               |
| Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm |           |               |
| CH                                                | Référence | GTIN          |
| ● 06                                              | 277060    | 5708932506113 |
| ● 08                                              | 277080    | 5708932506137 |
| ● 10                                              | 277100    | 5708932506151 |

| Intégralement remboursé*                          |           |               |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Boîte de 30 sondes                                |           |               |
| Femme nelaton/droite                              |           |               |
| Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm |           |               |
| CH                                                | Référence | GTIN          |
| ● 08                                              | 275080    | 5708932505956 |
| ● 10                                              | 275100    | 5708932505970 |
| ○ 12                                              | 275120    | 5708932505994 |
| ● 14                                              | 275140    | 5708932506014 |
| ● 16                                              | 275160    | 5708932506038 |

 **d'utilisation**  
SpeediCath® Standard  
femme



 **Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath® Standard  
femme en fauteuil



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

EasiCath®

Sondage intermittent  
gamme EasiCath



# EasiCath et EasiCath Luer-Lock

## Sondes hydrophiles autolubrifiées pour hommes et femmes

Le lubrifiant des sondes EasiCath s'hydrate après une immersion de 30 secondes dans l'eau : la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

Les sondes hydrophiles EasiCath sont associées à significativement moins d'infections urinaires et moins d'inconfort urétral que les sondes lubrifiées manuellement<sup>21</sup>.

### L'embout Luer-Lock permet :

#### > L'apprentissage de l'autosondage

- Le système Luer-Lock sécurise le patient inexpérimenté qui peut placer tranquillement la sonde avant de retirer le bouchon pour libérer l'urine.

#### > Les instillations vésicales\*

- L'embout Luer-Lock permet d'adapter une seringue sans aiguille contenant une solution et permet une connexion étanche. En effet, la seringue est directement raccordée à la sonde.



#### Intégralement remboursé\*\*

##### Sondes EasiCath

Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 053480    | 5701780061704 |
| ● 10 | 053500    | 5701780061711 |
| ○ 12 | 053520    | 5701780047937 |
| ● 14 | 053540    | 5701780047944 |
| ● 16 | 053560    | 5701780061728 |
| ● 18 | 053580    | 5701780061735 |

Homme tiemann/béquillée 40

Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 053800    | 5701780061742 |
| ○ 12 | 053820    | 5701780061759 |
| ● 14 | 053840    | 5701780061766 |
| ● 16 | 053860    | 5701780061773 |
| ● 18 | 053880    | 5701780061780 |

Femme nelaton/droite

Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 053680    | 5701780061674 |
| ● 10 | 053700    | 5701780061681 |
| ○ 12 | 053720    | 5701780047968 |
| ● 14 | 053740    | 5701780047951 |
| ● 16 | 053760    | 5701780061698 |

#### Intégralement remboursé\*\*

##### Sondes EasiCath Luer-Lock

Boîte de 20 sondes

Homme nelaton/droite

Longueur active : 36 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 052909    | 5701780173766 |
| ○ 12 | 052929    | 5701780173773 |
| ● 14 | 052949    | 5701780173780 |

Femme nelaton/droite

Longueur active : 17 cm / Longueur totale : 20 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 052709    | 5701780173742 |
| ○ 12 | 052729    | 5701780173759 |

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Les sondes EasiCath ne sont pas remboursées dans l'indication instillations vésicales..

\*\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# Set EasiCath

Set de sondage hydrophile autolubrifié pour hommes, femmes et enfants.



## Avantages

### > Ouverture pré-découpée

- Facilité d'ouverture du set.

### > Site de blocage étanche

- Évite le risque de fuite.
- Après une immersion de 30 secondes dans l'eau, la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

## EasiCath Set est composé de :

### > Une sonde autolubrifiée EasiCath

### > Une dosette de sérum physiologique pour hydrater le lubrifiant

### > Une poche de recueil graduée de 700 ml

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sets

Homme nelaton/droite

Longueur active : 34 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 10 | 280069    | 5701780175753 |
| ○ 12 | 280079    | 5701780175784 |
| ● 14 | 280089    | 5701780175814 |
| ● 16 | 280099    | 5701780175456 |
| ● 18 | 280109    | 5701780175463 |

Homme tiemann/béquillée

Longueur active : 34 cm / Longueur totale : 39 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ○ 12 | 280179    | 5701780175500 |
| ● 14 | 280189    | 5701780175517 |
| ● 16 | 280199    | 5701780175524 |

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sets

Femme nelaton/droite

Longueur active : 15 cm / Longueur totale : 20 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 280019    | 5701780175630 |
| ● 10 | 280029    | 5701780175661 |
| ○ 12 | 280039    | 5701780175692 |
| ● 14 | 280049    | 5701780175722 |
| ● 16 | 280149    | 5701780175494 |

Enfant nelaton/droite

Longueur active : 15 cm / Longueur totale : 20 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 280129    | 5701780175470 |
| ● 10 | 280139    | 5701780175487 |

# Gamme Self-Cath

## Self-Cath

Sondes sèches pour femmes



Intégralement remboursé\*

Boîte de 20 sondes

Femme nelaton/droite

Longueur active : 12 cm / Longueur totale : 16 cm

| CH   | Référence | GTIN          |
|------|-----------|---------------|
| ● 08 | 504609    | 5701780167666 |
| ● 10 | 504619    | 5701780167673 |
| ○ 12 | 504629    | 5701780167680 |
| ● 14 | 504639    | 5701780167697 |

## Lingettes pour toilette intime Brava®\*\*



Paquet de 15 lingettes

| Réf.   | GTIN          |
|--------|---------------|
| 120801 | 5708932135146 |

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Dispositif médical destiné à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniens ou sondes urinaires)

# Solutions sondes à demeure



## Folysil® 100% silicone

- > Recommandée pour le sondage de longue durée, en pédiatrie et chez le patient allergique au latex <sup>22,23</sup>
- > Durée de port ≤ 30 jours <sup>23</sup>

| Intégralement remboursé*                       |           |           |               |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Sondes Folysil</b>                          |           |           |               |
| Délivrable à l'unité, cond. par boîte de 5     |           |           |               |
| Adulte nelaton/droite 41 cm ballonnet 10-15 ml |           |           |               |
| CH                                             | Ballonnet | Référence | GTIN          |
| ○ 12                                           | 10 ml     | HA6112    | 3600040242087 |
| ● 14                                           | 10 ml     | HA6114    | 3600040242131 |
| ● 16                                           | 15 ml     | HA6116    | 3600040242186 |
| ● 18                                           | 15 ml     | HA6118    | 3600040242230 |
| ● 20                                           | 15 ml     | HA6120    | 3600040242285 |
| ● 22                                           | 15 ml     | HA6122    | 3600040242339 |
| ○ 24                                           | 15 ml     | HA6124    | 3600040242384 |

| Enfant nelaton/droite 30 cm |           |           |               |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| ballonnet 1,5-3 ml          |           |           |               |
| CH                          | Ballonnet | Référence | GTIN          |
| ● 06                        | 1,5 ml    | HA6106    | 3600040241936 |
| ● 08                        | 3 ml      | HA6108    | 3600040241981 |
| ● 10                        | 3 ml      | HA6110    | 3600040242032 |

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



## Folatex® latex enduction silicone

- > Utilisée pour le sondage de courte durée
- > Durée de port ≤ 7 jours <sup>23</sup>

| Intégralement remboursé*                             |           |               |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Sondes Folatex</b>                                |           |               |
| Délivrables à l'unité, conditionnées par boîte de 10 |           |               |
| Homme nelaton/droite 38 cm ballonnet 5-15 ml         |           |               |
| CH                                                   | Référence | GTIN          |
| ○ 12                                                 | HF1412    | 3600040910122 |
| ● 14                                                 | HF1414    | 3600040910153 |
| ● 16                                                 | HF1416    | 3600040910184 |
| ● 18                                                 | HF1418    | 3600040910214 |
| ● 20                                                 | HF1420    | 3600040910245 |
| ● 22                                                 | HF1422    | 3600040910276 |
| ○ 24                                                 | HF1424    | 3600040910306 |
| ○ 26                                                 | HF1426    | 3600040910337 |
| ○ 28                                                 | HF1428    | 3600040910368 |
| ○ 30                                                 | HF1430    | 3600040910399 |

| Homme tiemann/béquillée 38 cm |           |               |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| ballonnet 5-15 ml             |           |               |
| CH                            | Référence | GTIN          |
| ● 14                          | HF3714    | 3600040910603 |
| ● 16                          | HF3716    | 3600040910634 |
| ● 18                          | HF3718    | 3600040910665 |
| ● 20                          | HF3720    | 3600040910696 |

| Femme nelaton/droite 22 cm ballonnet 5-15 ml |           |               |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| CH                                           | Référence | GTIN          |
| ○ 12                                         | HF3112    | 3600040910429 |
| ● 14                                         | HF3114    | 3600040910450 |
| ● 16                                         | HF3116    | 3600040910481 |
| ● 18                                         | HF3118    | 3600040910511 |
| ● 20                                         | HF3120    | 3600040910542 |
| ● 22                                         | HF3122    | 3600040910573 |

# Recommandations d'utilisation des sondes Folysil<sup>®</sup> et Folatex<sup>®\*</sup>

## Gonflez le ballonnet avec de l'eau stérile

**Ne remplissez jamais le ballonnet avec du sérum physiologique.** L'utilisation de sérum physiologique peut entraîner la formation de cristaux de sels qui bloquent le conduit de gonflage du ballonnet. Toute solution qui précipiterait ou cristalliserait peut être à l'origine de difficultés de dégonflage du ballonnet.

## Utilisez un lubrifiant à base aqueuse


**Les lubrifiants comme la vaseline et les lubrifiants à base d'huile de silicone sont déconseillés** car ils altèrent les propriétés mécaniques du ballonnet et peuvent entraîner des éclatements ou des dégonflages du ballonnet.

## Et pour mieux dégonfler le ballonnet :

- Lors du dégonflage du ballonnet, ne pas aspirer tout le liquide avec la seringue pour ne pas provoquer des plis sur le ballonnet pouvant être à l'origine de lésions urétrales lors du retrait de la sonde.



- Laissez (ou réinjectez) 1 ml de liquide lors du retrait de la sonde. Ce volume de liquide suffit à prévenir la formation de plis susceptibles de traumatiser le méat lors du retrait de la sonde.

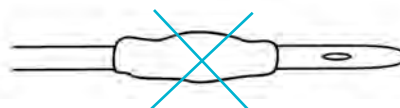

- Plus un ballonnet est resté gonflé longtemps, plus il est conseillé de le dégonfler lentement.



## Sondage à demeure du patient à domicile

### Sonde à demeure



> Utilisée pour le sondage de longue durée en pédiatrie et chez le patient allergique au latex (durée de port ≤ 30 jours)<sup>23,26</sup>

OU



> Utilisée pour le sondage de courte durée (durée de port ≤ 7 jours)<sup>23,26</sup>



### Poche de jambe stérile Conveen Triform



Conveen Triform 0,5 l  
Conveen Attaches de jambe



OU

Conveen Triform 1,5 l  
+ Conveen Attaches de jambe



### Poche de nuit non stérile Conveen pour les patients sous sondage vésical de longue durée en ambulatoire\*

Conveen 1,5 l



Conveen 2 l



Poche non stérile à raccorder pour la nuit à la poche de jambe

\* Recommandations du CCLIN Ouest, 2004. Hygiène en urologie. Sondage vésicale de longue durée en ambulatoire. Chapitre C, page 45 à 47 : Le changement des poches de nuit est effectuée quotidiennement.

## Poches de jambe stériles Conveen Triform 0,5 l et 1,5 l

### Avantages des poches Conveen Triform

#### UNE ASEPSIE CONTRÔLÉE

#### > Confort


- Voile doux
- Tubulure souple
- Soudure centrale pour une meilleure répartition des urines (Conveen Triform 0.5L)

#### > Discrétion

- Matériau discret sous les vêtements

#### > Sécurité

- Valve anti-reflux
- Tubulure crenelée anti-coudage (Conveen Triform 0.5L)
- Connecteur de forme conique et cranté pour sécuriser la connexion
- Pas de latex d'origine naturelle dans la composition du produit

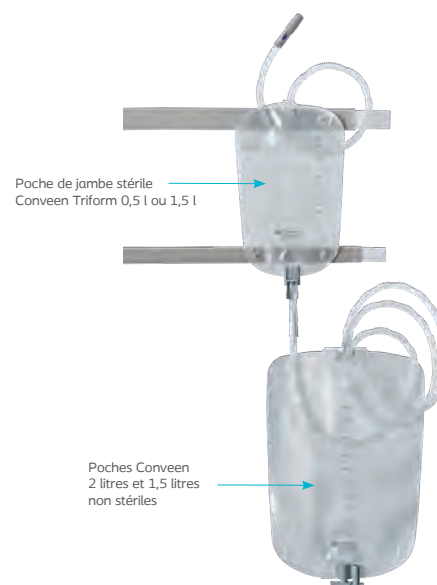

Intégralement remboursé\*

#### Poches de jambe stériles Conveen Triform non ajustables et pré-montées

Boîte de 10 poches graduées

|                              | Référence | GTIN          |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 0,5 l tub.<br>crénelée 50 cm | 210190    | 5708932539425 |
| 1,5 l tub.<br>lisse 90 cm    | 050630    | 5701780009645 |

## Les solutions de maintien sur la jambe



Intégralement remboursé\*

#### Conveen Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches - Maintien de la tubulure  
ou de la sonde à demeure sur le haut de la cuisse

|                    | Référence | GTIN          |
|--------------------|-----------|---------------|
| 90 cm<br>ajustable | 383004    | 5708932507233 |

Largeur : 3,5 cm



Largeur: 2,5 cm



Intégralement remboursé\*

#### Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10  
Maintien de la poche à urine sur la jambe

|  | Référence | GTIN          |
|--|-----------|---------------|
|  | 050501    | 5701780572491 |



Intégralement remboursé\*

#### Conveen Filets

Boîte de 2 filets

| Taille     | Circonférence | Référence | GTIN          |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| ● Standard | 40-60 cm      | 783681    | 5708932507141 |
| ● Medium   | 45-65 cm      | 783687    | 5708932507172 |
| ● Large    | 55-85 cm      | 783695    | 5708932507202 |

## Poches non stériles à raccorder pour la nuit à la poche de jambe



Intégralement remboursé\*

#### Poches à urine Conveen 2 l et 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

|                                       | Référence | GTIN          |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 2 l tub. crénelée<br>140 cm ajustable | 213460    | 5701780820615 |
| 1,5 l tub. lisse<br>90 cm ajustable   | 050620    | 5708932498289 |

 Vidéo d'utilisation  
Poches de nuit  
Conveen



Les solutions de stabilisation : cf. page 38

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général  
bénéficiant d'une couverture complémentaire.

## Principe du système collecteur

Pour le retour au domicile de votre patient, il existe des solutions adaptées au degré de sévérité de l'incontinence urinaire :

### Etui pénien Conveen Optima

Si verge courte (< 8 cm) :  
Conveen Optima Specific



### Poche à urine Conveen

Si incontinence légère à modérée\*



Si incontinence modérée à sévère\*




Poche de jambe  
Conveen Active 250 ml



Poches de jambe  
Conveen 0.5 l, 0.75 l ou 1.5 l



Poches de nuit Conveen 1,5L - 2L - 2L Basic

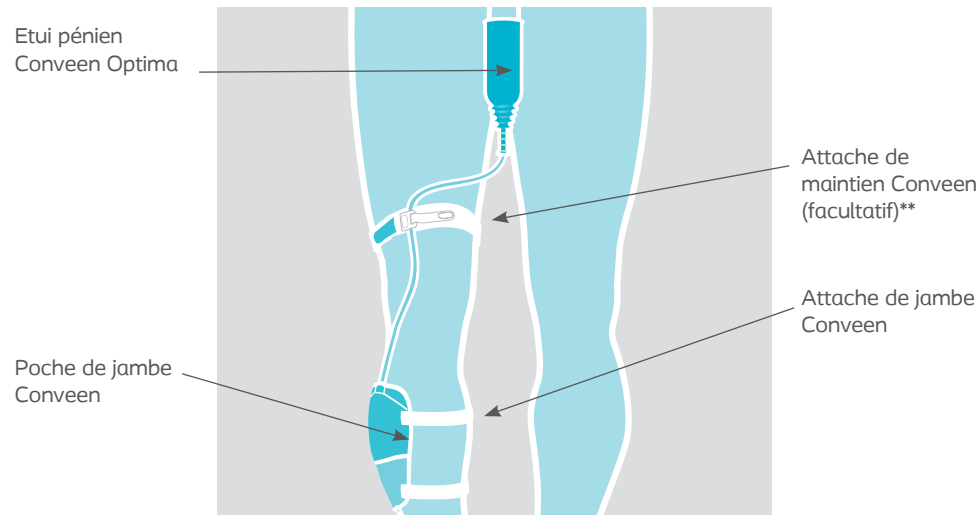

\* Définition de l'incontinence légère à modérée et modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

\*\* pour éviter les tractions sur l'étui pénien lors des déplacements

# Conveen Optima

Conveen Optima  
préférée aux  
protections  
absorbantes  
par 2 hommes  
sur 3<sup>24</sup>



## PREMIÈRE PRESCRIPTION

Boîte de 15 étuis pour essai

Intégralement remboursé\*

Conveen Optima

Boîtes de 15 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| 25    | 220259    | 5701780177733 |
| 28    | 220289    | 5701780177740 |
| 30    | 220309    | 5701780177757 |
| 35    | 220359    | 5701780177764 |
| 40    | 220409    | 5701780177771 |

Intégralement remboursé\*

Conveen Optima Specific

Boîtes de 15 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex  
Version Courte 4,6 cm

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| 21    | 221219    | 5701780177788 |
| 25    | 221259    | 5701780177795 |
| 30    | 221309    | 5701780177801 |
| 35    | 221359    | 5701780177818 |

## Pour quels patients ?


### > Hommes incontinents urinaires :

- âgés
- suite à une chirurgie (prostate, vessie)
- souffrant d'affection neurologique (blessés médullaires, syndrome de la queue de cheval, sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)
- souffrant d'un diabète compliqué

## Les bénéfices pour vos patients

- > Maîtrise des odeurs<sup>24</sup>
- > Meilleure estime de soi qu'avec des protections absorbantes<sup>24</sup>
- > Respect de l'état cutané<sup>24</sup>
- > Par mesure d'hygiène, il convient de changer l'étui quotidiennement<sup>23</sup>
- > Sans latex : absence de risque d'allergie cutanée lié au latex

## 2 longueurs pour s'adapter à l'anatomie de chaque homme

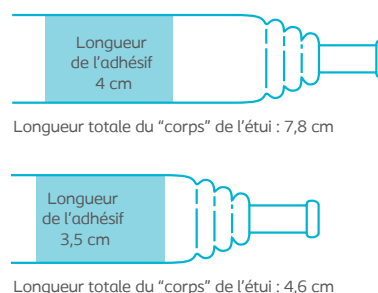

## RENOUVELLEMENT D'ORDONNANCE

Boîte de 30 étuis pour délivrance

Intégralement remboursé\*

Conveen Optima

Boîtes de 30 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| 25    | 220250    | 5708932224963 |
| 28    | 220280    | 5708932851329 |
| 30    | 220300    | 5708932220255 |
| 35    | 220350    | 5708932220279 |
| 40    | 220400    | 5708932224987 |

Intégralement remboursé\*

Conveen Optima Specific

Boîtes de 30 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex  
Version Courte 4,6 cm

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| 21    | 221210    | 5708932244879 |
| 25    | 221250    | 5708932244893 |
| 30    | 221300    | 5708932244916 |
| 35    | 221350    | 5708932244930 |

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Polysiloxane.

Boîte de 15 pour 1<sup>ère</sup> dispensation : disponible uniquement en ville


Vidéo d'utilisation  
Conveen Optima





# Les points forts des étuis


## L'étui pénien de dernière génération

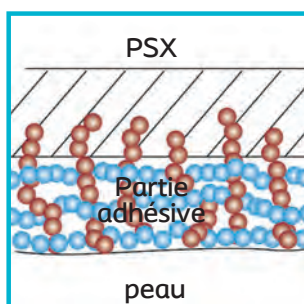

- > **Bonne tenue et respect de l'épiderme**
  - Maîtrise efficacement les fuites urinaires<sup>24</sup>
  - Etui en PSX\* : matériau souple et profilé



- > **Ajustement à l'anatomie**
  - 2 longueurs (4,6 cm et 7,8 cm)
  - et 6 diamètres

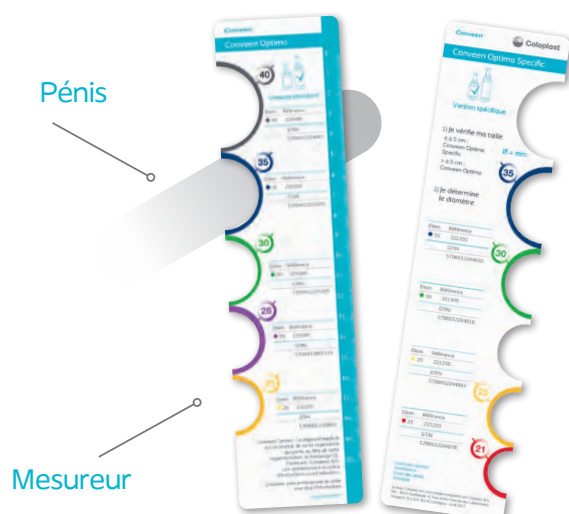

Chaque homme est unique, Conveen Optima existe donc en différents diamètres et longueurs afin d'assurer une mise en place parfaitement adaptée.

Il est nécessaire que votre patient porte la taille d'étui pénien qui lui convient.

Pour définir celle-ci, utilisez un guide de mesure qui peut être demandé gratuitement à notre service clients au : **01 56 63 18 00**

# Conveen Optima



## > Système anti-fuites

- Evite le blocage des urines grâce au bulbe anti-coudage




## > Raccordement hermétique

- Embout strié et bague pour faciliter la connexion



## > Simplicité de pose

- Déroulement uniforme, même avec des gants : double languette de déroulement

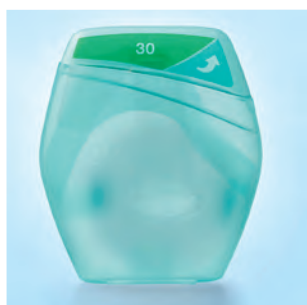

## > Discrétion

- Coque individuelle (5 x 6 cm) et boîte compacte (15,8 x 13 cm) : encombrement minimal et transport facilité.

# Conveen Optima\*, une solution validée cliniquement


Etude randomisée Loi Huriet ayant fait l'objet d'une publication dans le British Journal of Urology International en 2011<sup>24</sup>

Auteurs : E. Chartier-Kastler, P. Ballanger, J. Petit, M. Fourmarier, S. Bart, E. Ragni-Ghazarossian, A. Ruffion, L. Le Normand et P. Costa

Comparativement aux protections absorbantes, Conveen Optima\* est préféré par 2 hommes sur 3 et améliore la qualité de vie


## Objectif principal

Evaluer l'impact des étuis péniens ou des protections absorbantes sur la qualité de vie (QdV) des patients hommes présentant une incontinence urinaire (IU) modérée à sévère.

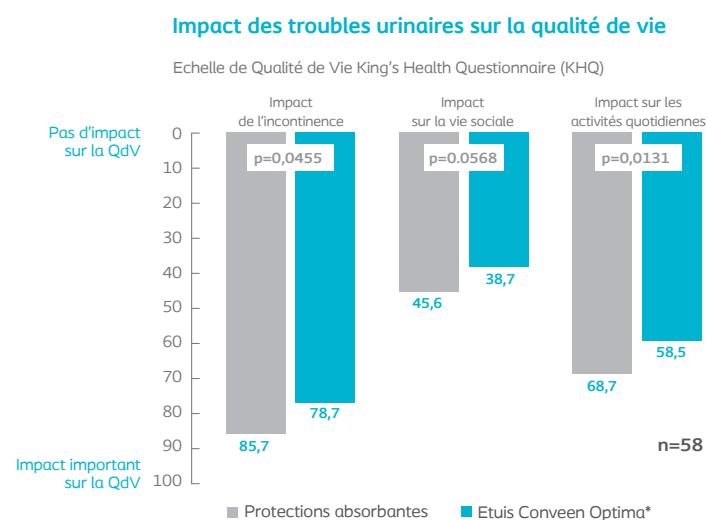

avec **Conveen Optima\*** :

- > réduction de l'impact de l'incontinence
- > réduction de l'impact des troubles urinaires sur la vie sociale et sur les activités quotidiennes

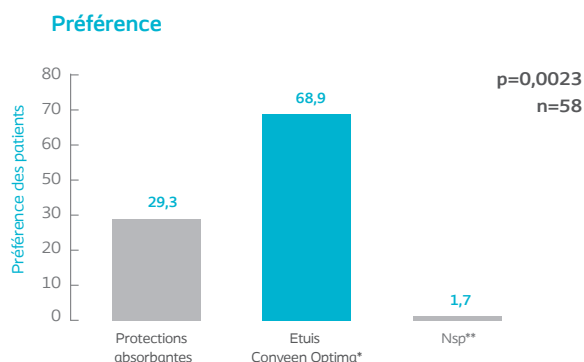

\* Associé à une poche Conveen

\*\* Ne se prononcent pas

# Les étuis péniens, une solution reconnue par les sociétés savantes et possible pour la HAS

## > EAU 2012 Grade A\*\*

Lucas M.G. et al. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2012 , page 31

*“ Les étuis péniens sont à proposer en cas d'incontinence urinaire masculine sans rétention associée. Ne pas utiliser de pinces à verge pour contrôler l'incontinence. ”*

## > CODIMS AP-HP 2009

Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical.  
Recommandations codims ap-hp. décembre 2009, page 40

*“ Les étuis péniens peuvent être utilisés dans les cas d'incontinence urinaire chez l'homme après intervention chirurgicale, vessie neurologique ou chez les personnes âgées. Ils sont proposés de préférence en alternative aux protections absorbantes lorsqu'ils sont médicalement possibles. ”*

## > Guide AVC HAS 2007

Guide - affection longue durée. Accident vasculaire cérébral. Haute autorité de santé.  
Mars 2007, page 12

*“ Le port des étuis péniens peut être proposé chez des hommes souffrant d'incontinence urinaire. ”*

## > SPILF-AFU 2002

Infections urinaires nosocomiales de l'adulte. Conférence de Consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et l'Association Française d'Urologie (AFU). Novembre 2002, page 26

*“ L'étui pénien en alternative au sondage à demeure est préférable lorsqu'il est médicalement possible. ”*

EAU : European Association of Urology  
CODIMS AP-HP : Comité du Dispositif Médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
AVC HAS : Accident Vasculaire Cérébral Haute Autorité de Santé  
SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française  
AFU : Association Française d'Urologie


\*\* Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de preuve : PAR EXEMPLE, essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur, méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, analyse de décision fondée sur des études bien menées.



## L'étui pénien, une solution à privilégier pour vos patients

Les étuis péniens Conveen Optima, des performances démontrées<sup>24</sup> en termes :

- > d'efficacité,
- > de sentiment de liberté,
- > de maîtrise des odeurs,
- > de sentiment de sécurité,
- > d'estime de soi,
- > de respect de l'état cutané
- > de discrétion,

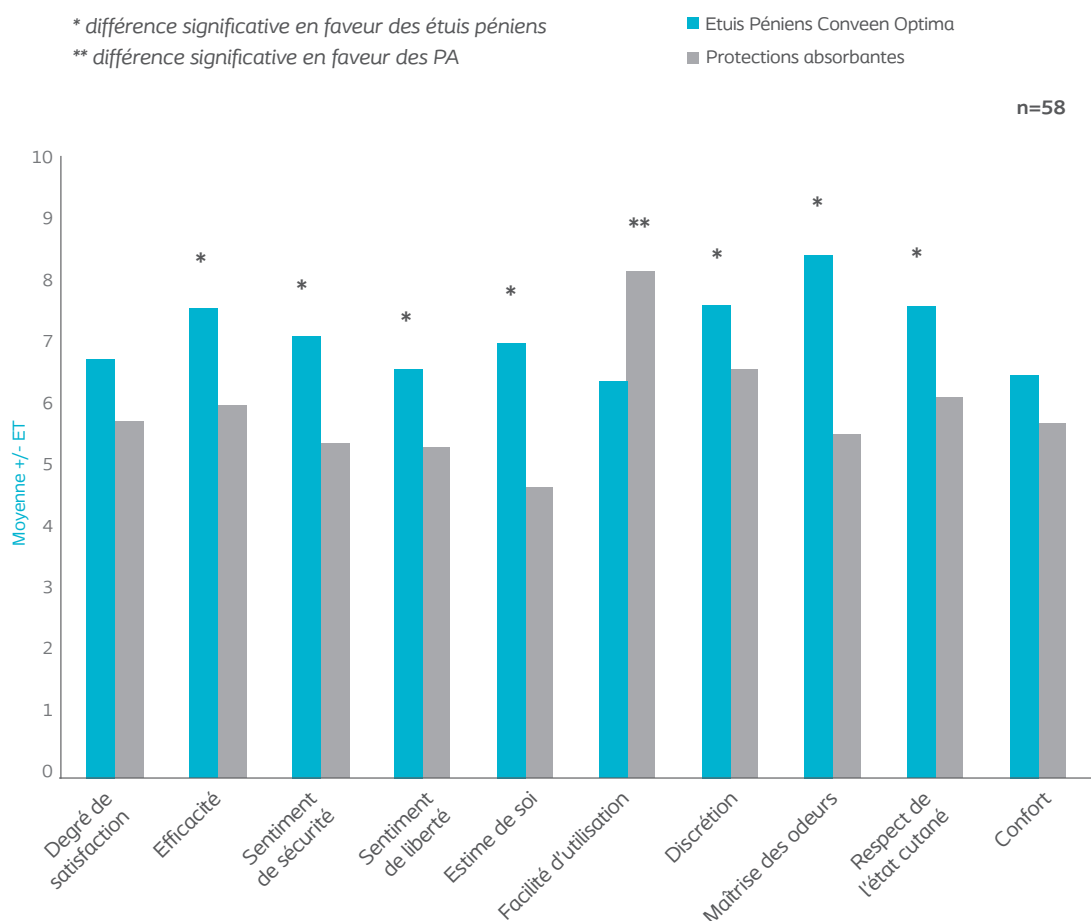

« Les étuis péniens participent à la bientraitance d'un patient. Ils permettent d'éviter un dommage lié aux soins, qui pourrait être causé par une prise en charge non adaptée de l'incontinence. »<sup>25</sup>



## Penilex Silicone

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance**  
**Normal 8,1 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA5025    | 3600040251430 |
| ● 30  | PA5030    | 3600040251485 |
| ○ 32  | PA5032    | 3600040251539 |
| ● 35  | PA5035    | 3600040251584 |
| ● 40  | PA5040    | 3600040251638 |

**Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai**   
**Normal 8,1 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA5225    | 3600040325292 |
| ● 30  | PA5230    | 3600040324479 |
| ○ 32  | PA5232    | 3600040324509 |
| ● 35  | PA5235    | 3600040325322 |
| ● 40  | PA5240    | 3600040324561 |

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance**  
**Spécial (étui court) 4,2 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA7025    | 3600040252062 |
| ● 30  | PA7030    | 3600040252093 |
| ○ 32  | PA7032    | 3600040252123 |
| ● 35  | PA7035    | 3600040252154 |
| ● 40  | PA7040    | 3600040252185 |

**Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai**   
**Spécial (étui court) 4,2 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA7225    | 3600040325414 |
| ● 30  | PA7230    | 3600040324776 |
| ○ 32  | PA7232    | 3600040324806 |
| ● 35  | PA7235    | 3600040325445 |
| ● 40  | PA7240    | 3600040324868 |

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance**  
**Plus (surface adhésive large) 8,1 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA6025    | 3600040251836 |
| ● 30  | PA6030    | 3600040251881 |
| ○ 32  | PA6032    | 3600040251935 |
| ● 35  | PA6035    | 3600040251980 |
| ● 40  | PA6040    | 3600040252031 |

**Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai**   
**Plus (surface adhésive large) 8,1 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | PA6225    | 3600040325353 |
| ● 30  | PA6230    | 3600040324622 |
| ○ 32  | PA6232    | 3600040324653 |
| ● 35  | PA6235    | 3600040325384 |
| ● 40  | PA6240    | 3600040324714 |



## Conveen Security

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour délivrance**  
**Version Standard 8,2 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 21  | 052210    | 5701780758864 |
| ● 25  | 052250    | 5701780592093 |
| ● 30  | 052300    | 5701780592109 |
| ● 35  | 052350    | 5701780592116 |

**Boîte de 15 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour essai**   
**Version Standard 8,2 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 21  | 052219    | 5701780174152 |
| ● 25  | 052259    | 5701780174169 |
| ● 30  | 052309    | 5701780174176 |
| ● 35  | 052359    | 5701780174183 |

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex pour délivrance**  
**Version Courte 5 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 21  | 220110    | 5701780751599 |
| ● 25  | 220120    | 5701780748131 |
| ● 30  | 220130    | 5701780748155 |
| ● 35  | 220140    | 5701780748179 |

**Boîte de 15 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour essai**   
**Version Courte 5 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 21  | 220119    | 5701780174190 |
| ● 25  | 220129    | 5701780174206 |
| ● 30  | 220139    | 5701780174213 |
| ● 35  | 220149    | 5701780174220 |



## Conveen 1 pièce Latex

Intégralement remboursé\*

**Boîte de 30 étuis péniers latex auto-adhésifs**  
**+ 6 raccords pour délivrance**  
**Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | 052000    | 5701780009935 |
| ● 30  | 052050    | 5701780009928 |
| ● 35  | 052100    | 5701780009911 |

**Boîte de 15 étuis péniers latex auto-adhésifs**   
**+ 6 raccords pour essai**  
**Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 25  | 052009    | 5701780174121 |
| ● 30  | 052059    | 5701780174138 |
| ● 35  | 052109    | 5701780174145 |



## Conveen 2 pièces Latex

**Boîte de 30 étuis péniers latex avec joint de fixation + 6 raccords**  
**Conveen Etui pénien latex avec joint de fixation 10,5 cm**

| Diam. | Référence | GTIN          |
|-------|-----------|---------------|
| ● 20  | 051200    | 5701780008488 |
| ● 25  | 051250    | 5701780008471 |
| ● 30  | 051300    | 5701780008464 |
| ● 35  | 051350    | 5701780008457 |

 Boîte de 15 pour 1<sup>ère</sup> dispensation :  
disponible uniquement en ville

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Incontinence légère à modérée (<250 ml\*\*)

## Poche de jambe Conveen Active 250 ml



### > Système d'attaches intégré



### > Discretion et confort

- Poche positionnée vers l'intérieur de la cuisse pour plus de discrétion
- Robinet escamotable, invisible même sous un short
- Poche recouverte d'un voile doux : conçu pour éviter qu'elle ne colle à la peau en cas de transpiration et ainsi prévenir les complications cutanées



### > Tubulure courte et ajustable



### > Fixation sécurisée

- Patch adhésif en silicone repositionnable vient renforcer la fixation à la cuisse.

Intégralement remboursé\*

### Poche Conveen Active

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

|                     | Référence | GTIN          |
|---------------------|-----------|---------------|
| Poche 250 ml        |           |               |
| Tub. 7 cm ajustable | 255020    | 5708932467568 |



Vidéo d'utilisation  
Poches Conveen Active



Exemple de prescription pour 1 mois d'utilisation  
Dr Dupont  
26 rue de la Source  
54000 NANCY

M. Durand

- Etuis péniers Conveen Optima standard, diamètre 30, 1 boîte
- Poches Conveen Active, 250 ml, 1 boîte
- Conveen Poche de nuit 2 L, 1 boîte

Attention : précisez bien les marques Conveen, Conveen Optima et Conveen Active

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence légère à modérée : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.



Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml\*\*)

## Poches de jambe Conveen 0.5 l, 0.75 l et 1.5 l



### > Pour la journée : discrétion et sécurité

#### • Sécurité

Tubulure ajustable crénelée anti-coudage (0.5 l et 0.75 l)

#### • Facilité d'utilisation

Robinet de vidange intuitif (à clapet)

#### • Discrétion et confort

Forme anatomique et voile doux  
Matière souple et peu bruyante  
Discrète sous les vêtements

### > Poches graduées

Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement\*\*\*

Intégralement remboursé\*

#### Conveen poches de jambe

Boîte de 30 poches graduées

|                                         | Référence | GTIN          |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| 0,5 l tub. crénelée<br>30 cm ajustable  | 051600    | 5708932498227 |
| 0,5 l tub. crénelée<br>50 cm ajustable  | 051610    | 5708932498241 |
| 0,75 l tub. crénelée<br>50 cm ajustable | 051670    | 5708932498265 |
| 1,5 l tub. lisse<br>90 cm ajustable     | 050620    | 5708932498289 |

Vidéo d'utilisation  
Poches de jambe  
Conveen



## Les solutions de maintien sur la jambe



#### Conveen Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches

|                 | Référence | GTIN          |
|-----------------|-----------|---------------|
| 90 cm ajustable | 383004    | 5708932507233 |

Intégralement remboursé\*

Largeur : 3,5 cm



Largeur : 2,5 cm



Intégralement remboursé\*

#### Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10

|  | Référence | GTIN          |
|--|-----------|---------------|
|  | 050501    | 5701780572491 |



#### Conveen Filets

Boîte de 2 filets

| Taille     | Circonférence | Référence | GTIN          |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| ● Standard | 40-60 cm      | 783681    | 5708932507141 |
| ● Medium   | 45-65 cm      | 783687    | 5708932507172 |
| ● Large    | 55-85 cm      | 783695    | 5708932507202 |

Intégralement remboursé\*

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

\*\*\* Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.





Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml\*\*)

## Poches de nuit Conveen



### Pour la nuit :

- > **Risque de chute du patient limité**
  - Grande contenance évitant au patient de se lever la nuit
- > **Sécurité**
  - Tubulure crénelée anti-coudage de 140 cm pour la poche de 2 l
- > **Système anti-fuites**
  - Robinet de vidange sécurisée pour la poche de 2 l
  - Robinet de vidange intuitif (à clapet) pour la poche 1,5 l
  - Matériau résistant
- > **Valve anti-reflux**
  - Maîtrise du risque infectieux
- > **Poches graduées**
  - Meilleur suivi de la diurèse



**Vidéo d'utilisation**  
Poches de nuit Conveen



Intégralement remboursé\*

#### Conveen 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

|                            | Référence | GTIN          |
|----------------------------|-----------|---------------|
| 1,5 l                      | 050620    | 5708932498289 |
| tub. lisse 90 cm ajustable |           |               |

Intégralement remboursé\*

#### Conveen 2 l

Boîte de 30 poches graduées

|                                | Référence | GTIN          |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| 2 l                            | 213460    | 5701780820615 |
| tub. crénelée 140 cm ajustable |           |               |

Intégralement remboursé\*

#### Conveen Basic 2 l - Sans boutons

Boîte de 10 poches graduées

|                   | Référence | GTIN          |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2 l               | 218030    | 5708932973540 |
| tub. lisse 100 cm |           |               |

Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement\*\*\*

## Les solutions de stabilisation



#### Conveen Porte-poche de lit

Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l  
Délivré à l'unité, cond. par boîte de 10

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 050700    | 5701780009652 |



#### Conveen Porte-poche de sol

Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l  
Vendu à l'unité

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 380431    | 5708932263313 |

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

\*\*\* Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.

## Accessoires

### Conveen® Protact



Crème barrière qui protège la peau de l'urine et de l'incontinence fécale légère.  
Tube de 100 g

#### Conveen Protact

Délivable à l'unité, cond par boîte de 12

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 651001    | 5708932723442 |

### Lingettes pour toilette intime Brava®



Les lingettes pour toilette intime Brava sont destinées à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniens ou sondes urinaires).

#### Lingettes Brava

Sachet de 15 lingettes

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 120801    | 5708932135146 |

### Conveen® Prep



Protection des peaux sensibles ou traumatisées exposées aux adhésifs, à l'urine, aux fèces, ou aux frottements.

#### Conveen Prep pour étuis péniens

Boîte de 54 compresses imprégnées

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 620420    | 5701780768375 |

### Retrait d'adhésif Brava®



Le spray et la lingette pour retrait d'adhésif Brava®:

- offrent un retrait facile des adhésifs médicaux
- n'interfèrent pas avec l'adhésivité des appareillages
- à base de silicone, la solution ne pique pas (sans alcool) et sèche en quelques secondes

Intégralement remboursé\*

#### Spray pour retrait d'adhésif Brava® 50 ml

Conditionnement unitaire

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 120101    | 5708932740463 |

#### Lingette pour retrait d'adhésif Brava®

Boîte 30 lingettes

| Référence | GTIN          |
|-----------|---------------|
| 120115    | 5708932503693 |

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

## Peristeen Plus Irrigation Transanale



*Peristeen® Plus s'appuie sur les preuves cliniques de Peristeen :*

**> Efficacité<sup>26</sup>**

Réduction significative de la constipation ( Score de Cleveland : 10.3 vs 13.2 [p=0.0016] ) et des fuites fécales ( Score St Mark : 5.0 vs 7.3 [p=0.015] ).

**> Réduction des infections urinaires symptomatiques<sup>26</sup>**

Diminution de la survenue des infections urinaires symptomatiques nécessitant une antibiothérapie : 15,5% à 5,9% [p=0.0052].

**> Gain de temps<sup>26</sup>**

Peristeen permet de réduire le temps de gestion du transit : 74,4 à 47 min [p=0.04].

**> Amélioration de la qualité de vie<sup>26</sup>**



### Peristeen Plus est un système d'irrigation transanale :

- Simple à manipuler
- S'utilise avec de l'eau tiède
- Une irrigation doit être exécutée journalièrement au début, et devrait être réduite à un jour sur deux si possible après environ 10 à 14 jours<sup>32</sup>
- Réduction de la dépendance à une tierce personne<sup>26</sup>

*" Peristeen Plus m'a aidé à prendre le contrôle de mes problèmes de transit et à éviter que ce soit eux qui contrôlent ma vie "*

Utilisateur français



## La sonde rectale à ballonnet 1

> Maintien de la sonde dans l'ampoule rectale et étanchéité lors de l'irrigation

> Autolubrifiée, pour faciliter l'introduction

Elle est à usage unique.

## La poche à eau avec indicateur de température 2

> Grâce à son design breveté, la poche est stable, même posée sur le sol

> Indication du volume sur la poche pour le suivi de l'irrigation

> Indicateur de température pour une température d'eau adéquate pour l'irrigation

Il est recommandé de la changer tous les mois soit toutes les 15 utilisations\*\*. Le bouchon doit être conservé pendant 90 utilisations\*\* et sera fourni lors de la prescription d'un nouveau système initial.

## L'unité de contrôle 3

> Pas besoin de la gravité pour réaliser l'instillation de l'eau ni d'une tierce personne

> Dispositif ergonomique, pouvant être utilisé même par les patients ayant une dextérité manuelle réduite<sup>26</sup>

Elle fait partie du système initial et doit être changée toutes les 90 utilisations (soit par exemple tous les 6 mois dans le cadre d'une irrigation 1 jour sur 2), elle est fournie lors de la prescription d'un nouveau système initial.

**Vidéo d'utilisation**  
Peristeen Plus Irrigation  
Transanale Adulte



**Vidéo d'utilisation**  
Peristeen Plus Irrigation  
Transanale Enfant



Intégralement remboursé\*

### Peristeen Plus Irrigation Transanale

**Sondes standard** (125 mm) à usage unique

|                                                                                 | Référence | GTIN          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Système initial                                                                 | 291410    | 5701780235686 |
| 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe |           |               |
| Sondes rectales                                                                 | 291420    | 5701780235808 |
| 15 sondes rectales + 1 poche                                                    |           |               |
| Tubulures                                                                       | 291460    | 5701780236829 |
| 2 tubulures avec connecteur                                                     |           |               |

### Peristeen Plus Irrigation Transanale

**Sondes courtes** (115 mm) à usage unique

|                                                                                         | Référence | GTIN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Système initial                                                                         | 291480    | 5701780237482 |
| 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales courtes + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe |           |               |
| Sondes courtes                                                                          | 291490    | 5701780237574 |
| 15 sondes rectales courtes + 1 poche                                                    |           |               |
| Tubulures                                                                               | 291460    | 5701780236829 |
| 2 tubulures avec connecteur                                                             |           |               |

Les complications de l'irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales ont été identifiés suite à la pratique d'irrigation colique. Il est important d'informer le patient qu'il doit contacter immédiatement son médecin ou un service d'urgences si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s'accompagne de fièvre, d'un saignement anal prolongé.


\* Intégralement remboursé dans l'indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire. La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L'irrigation transanale pourra être effectuée tous les deux ou trois jours, à l'issue d'une phase d'initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. Peristeen Plus doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'auto-sondage. L'implication d'infirmières formées à la technique ou de stomathérapeutes est recommandée pour l'apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite. Peristeen Plus Système initial (boîte de 1) : prix limite de vente au public 104,95 €TTC, remb. Séc. Soc. 104,95€. Peristeen Sondes rectales (boîte de 15) : prix limite de vente au public 173,83€TTC remb. Séc. Soc. 173,83€. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 20,16€TTC, remb. Séc. Soc. 20,16€.

\*\* Dans le cadre d'une irrigation un jour sur deux.




## Irrigation transanale : une méthode qui fonctionne

Images scintigraphiques du cadre colique<sup>28</sup>

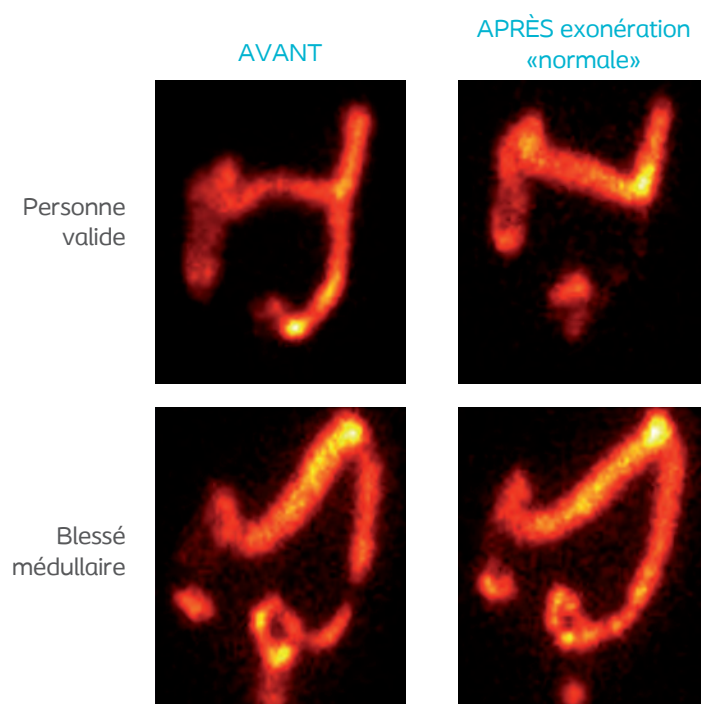

Images scintigraphiques d'un patient neurologique atteint de troubles colorectaux avant et après recours à l'irrigation transanale avec Peristeen

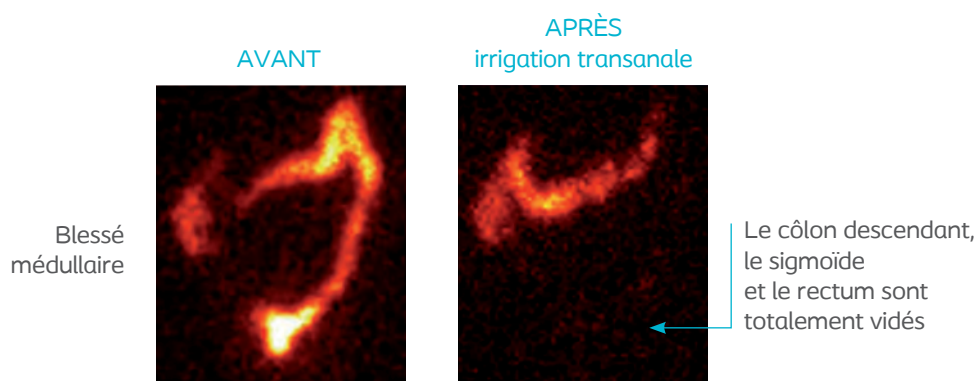


# Peristeen Plus : Une efficacité basée sur les preuves cliniques de Peristeen


## Etude clinique contrôlée<sup>26</sup>

- > Etude internationale\* multicentrique, comparative, contrôlée, randomisée réalisée sur 87 patients présentant une lésion médullaire.
- > Comparant : Peristeen Irrigation Transanale aux traitements médicaux conventionnels
- > Durée : 10 semaines


Diminution significative ( $p < 0.05$ ) de l'incontinence fécale et de la constipation objectivée à l'aide d'échelles validées.

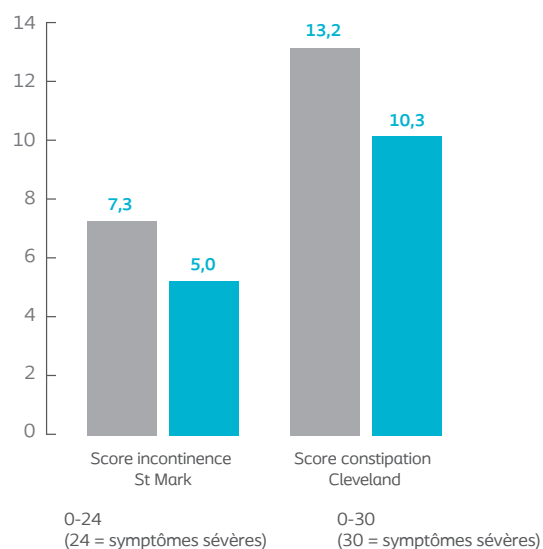


Diminution significative ( $p = 0.04$ ) du temps passé à l'exonération

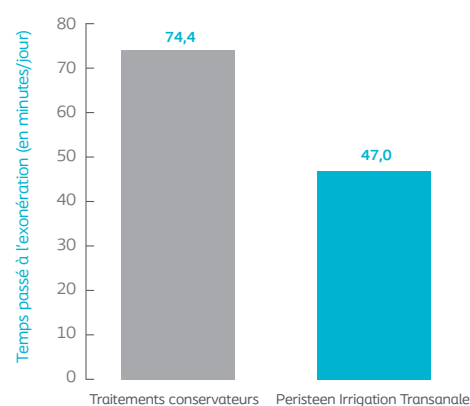

Réduction significative ( $p < 0.01$ ) des infections urinaires symptomatiques

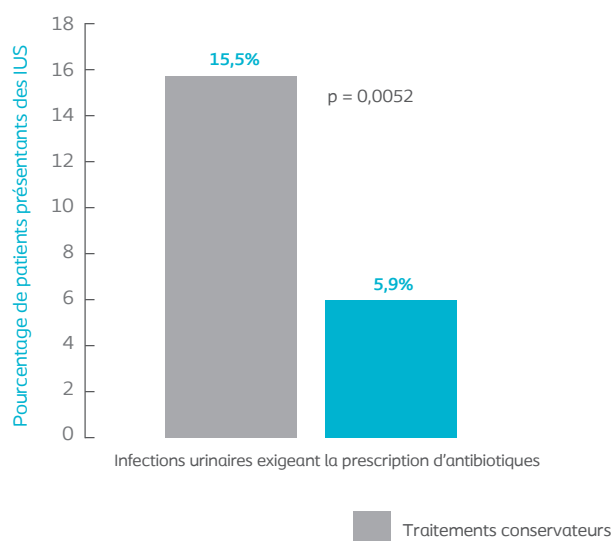

Amélioration de 50% du score de qualité de vie

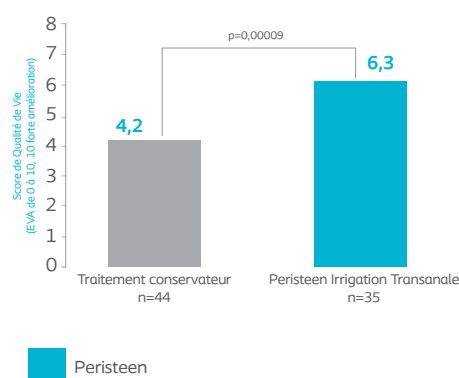

## Peristeen Obtal



### Tampon obturateur anal

Peristeen Obtal est une solution palliative indiquée chez tous les patients souffrant d'incontinence fécale d'origine neurologique (Spina bifida, lésions médullaires traumatiques ou non).

### La continence fécale quasi-complète, la confiance retrouvée<sup>27</sup>

Tampon en mousse de polyuréthane comprimée par un film hydrosoluble :

- Insertion identique à celle d'un suppositoire à l'aide du lubrifiant hydrophile (ne pas utiliser de corps gras type vaseline)
- Ouverture en corolle au contact de la muqueuse anale
- Fermeture mécanique du canal anal tout en laissant passer les gaz
- Facile à retirer en tirant le cordon

### Efficacité démontrée<sup>27</sup>

Une étude clinique contrôlée, ouverte, prospective, multicentrique, a été menée chez 32 patients Spina bifida, âgés de  $16 \pm 6,6$  ans en moyenne, présentant une incontinence fécale sévère, plurihebdomadaire, et a démontré l'efficacité (score de symptômes\*\* et de qualité de vie\*\*\*), l'acceptabilité et la tolérance du tampon obturateur Peristeen Obtal.

Temps de port préconisé pour un tampon : Maximum 12 heures

Intégralement remboursé\*

#### Tampon obturateur anal Peristeen Obtal

Boîte de 20 tampons

| Diam.                 | Référence | GTIN          |
|-----------------------|-----------|---------------|
| ● 37mm <sup>(1)</sup> | 014500    | 5701780678117 |
| ● 45mm <sup>(1)</sup> | 014510    | 5701780678124 |

<sup>(1)</sup> diamètre ouvert

 Vidéo d'utilisation  
Peristeen Obtal




\* Peristeen Obtal : Intégralement remboursé dans l'indication Incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %). Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72,68 € TTC, remb. Séc. Soc. 72,68 €.

\*\* Questionnaires de Jorge, Wexner et Schuster

\*\*\* Questionnaire de l'ASCRS

## Efficacité démontrée<sup>27</sup>

### Une continence fécale quasi complète

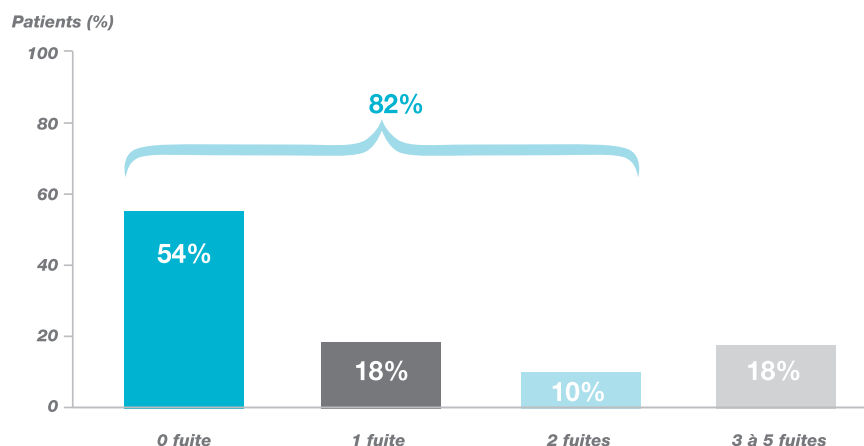


Nombre de fuites fécales sur 18 jours d'utilisation en moyenne, chez des patients qui présentaient à l'inclusion une fuite fécale par jour en moyenne.

**82% des patients ont présenté moins de 3 épisodes de fuites fécales sur les 18 jours d'utilisation de Peristeen Obtal.**

**La tolérance a été bonne dans 90,6% des cas.**

### Une bonne acceptabilité comme en témoignent la facilité de mise en place et de retrait<sup>27</sup>

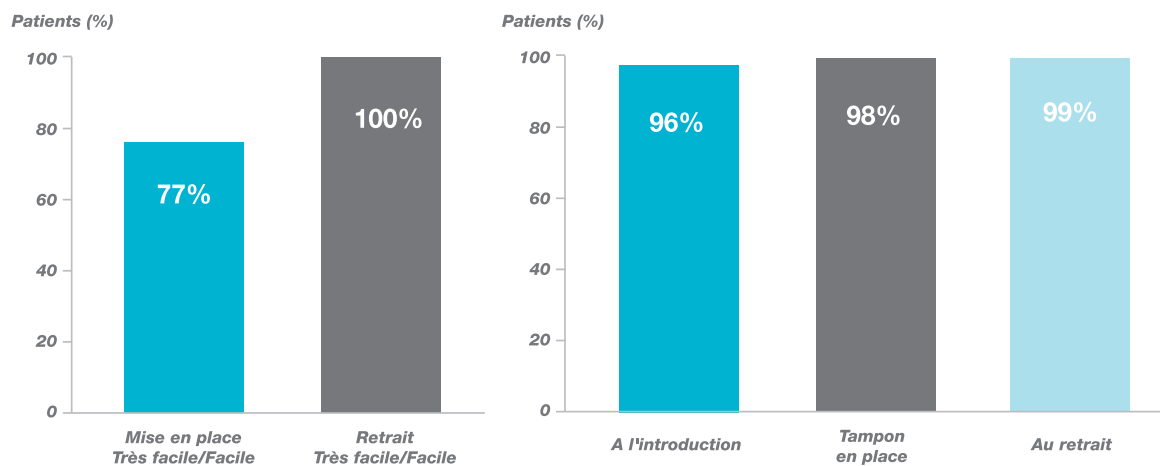

Durée de port : 8,8h en moyenne - Utilisation diurne



# Coloplast Care

## Les avantages

- **Développé pour répondre aux questions pratiques** liées à l'utilisation du matériel au cours de la première année d'utilisation de Peristeen Irrigation Transanale.
- **Donne à vos patients des conseils et astuces utiles** pour intégrer les irrigations transanales dans leur vie quotidienne.

80%



des patients inscrits aux Coloplast® Care poursuivent les irrigations transanales avec Peristeen après six mois\*.

### Coloplast Care en quelques chiffres

4730

membres\*


3

conseillers  
dédiés

L'équipe Coloplast s'engage aux côtés des patients et propose un suivi technique régulier par téléphone ou les redirige vers un professionnel de santé si nécessaire.

\* Données internes Coloplast Care France : 4730 utilisateurs de Peristeen se sont inscrits au service Coloplast Care sur la période de mai 2011 à fin septembre 2021. Pourcentage de patients inscrits au service Coloplast Care et poursuivant l'utilisation de Peristeen au delà de 6 mois = 80% (Données de mai 2011 à fin avril 2019 puis d'août 2019 jusqu'à mars 2021)

## Comment cela fonctionne ?

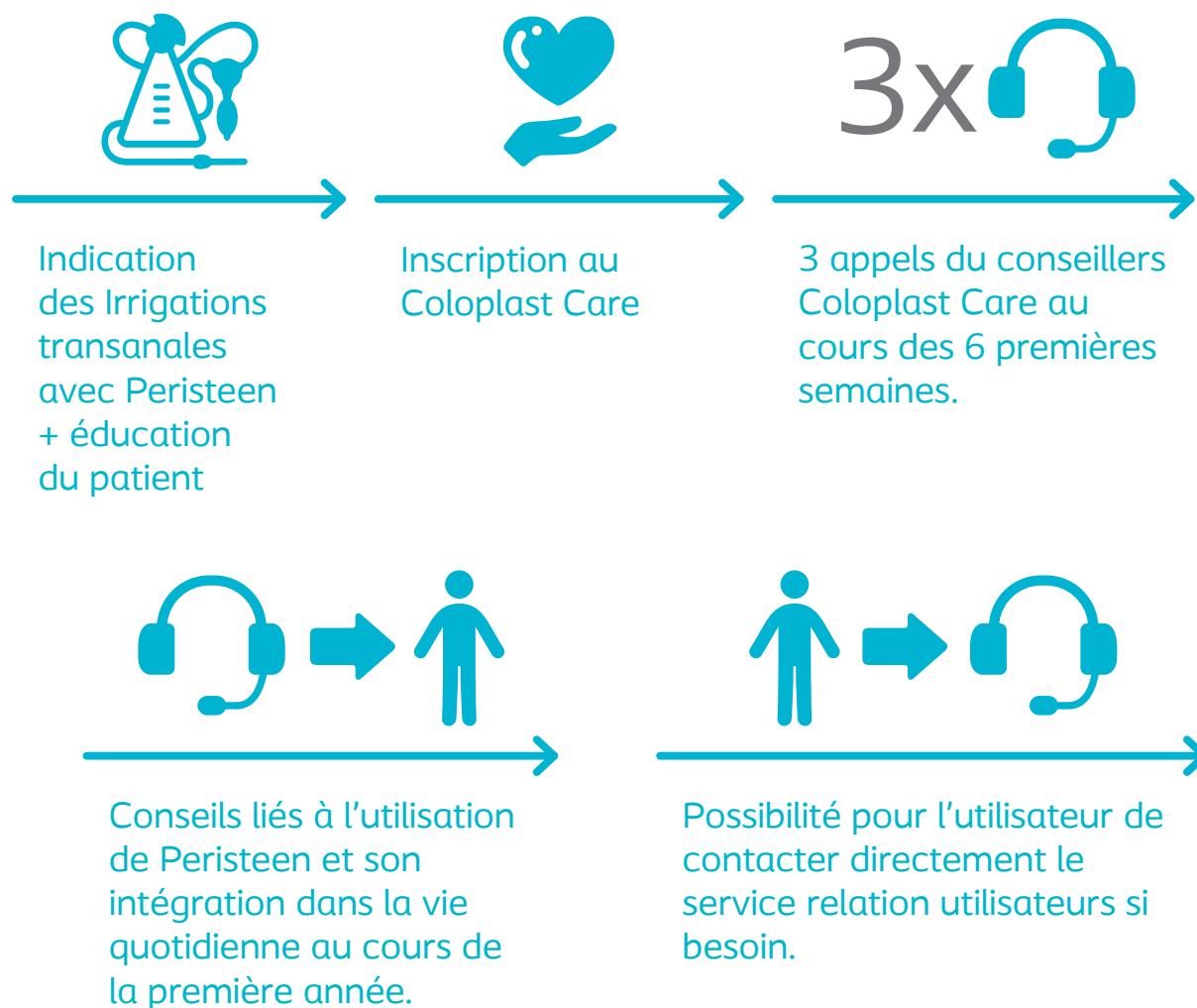

Le **Service Relation Utilisateurs** de Coloplast est joignable entre 9h-12h30 et 13h30-17h30 au

**0 800 01 58 68**

Service & appel  
gratuits

Ce service proposé par Coloplast est gratuit.

Le patient peut choisir de ne plus en bénéficier à tout moment, en le précisant simplement à son interlocuteur Coloplast lors de son appel.

# DOCUMENTATIONS – Professionnels

Coloplast vous soutient dans votre démarche d'information, et met à votre disposition un ensemble d'outils et de supports, pour vous accompagner au quotidien.

De nombreux outils ont été conçus par des professionnels de santé (médecins, stomathérapeutes, infirmières) pour permettre aux équipes soignantes d'améliorer la prise en charge des patients.


## Fiches Produits & de références



247Z  
Brochure Gamme



209Z  
Brochure Références

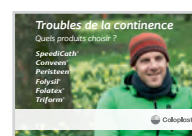

1161Z : Fiches  
Incollables

## Bloc d'aide à la délivrance

### Sondage Intermittent



208C : Bloc  
d'aide à la  
délivrance Sondes

### Etuis péniens et poches à urine



1582E : Poster  
arbre décisionnel  
Conveen




1995E : Bloc  
d'aide à la délivrance  
Conveen



2149E : Fiche  
de liaison pour  
la prescription

### Sondage à Demeure

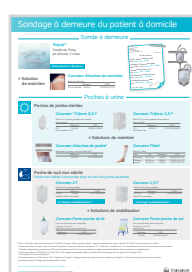

1686E : Poster  
Sondage à Demeure

### Gamme Peristeen



2794P : Bloc d'aide  
à la délivrance

## Guides de bonnes pratiques

### Gamme Peristeen



2797P : Guide pratique du professionnel de santé



2800P : Protocole de soin Peristeen Plus

## Coloplast au service de vos patients Service Relations Utilisateurs



L'équipe de conseillers du Service Relations Utilisateurs est à l'écoute et disponible pour répondre à toutes les questions de vos patients sur leurs produits Coloplast.

Ils donneront aux utilisateurs les informations nécessaires pour utiliser au mieux leurs produits et les encourager à les intégrer dans leur quotidien. Pour toutes les questions médicales, nous les inviterons à contacter leur professionnel de santé.



### Une question ? Besoin d'aide ?

Nos conseillers sont à l'écoute de vos patients.

**Pour toute question sur leurs produits,  
nous sommes à leur disposition**



téléphone au : **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30



e-mail à : [contact.france@coloplast.com](mailto:contact.france@coloplast.com)



ou connectez-vous sur : [www.coloplast.fr](http://www.coloplast.fr)

# DOCUMENTATIONS – Patients

Il se peut que vos patients aient besoin d'aide et de conseils, en complément ou rappel de ceux donnés par les professionnels de santé, aussi bien avant qu'après l'intervention. Nous mettons à votre disposition des outils qui peuvent vous aider à la prise en charge de vos patients. Ces outils travaillés avec des professionnels de santé permettront également à vos patients à leur retour au domicile de retrouver les réponses à de nombreuses questions.

## Documents éducatifs patients

### Sondage Intermittent



1267C : Livret de sondage intermittent Femme



1268C : Livret de sondage intermittent Homme



1769C : Carnet Mictionnel

### Etuis péniens et Poches



272E : Brochure prostatectomie\*



2318E : Brochure d'autorééducation périnéale

### Gamme Peristeen



2789P : Livret d'information Peristeen Plus Patient



2791P : Carnet de suivi Peristeen Plus



2792P : Carnet de suivi Peristeen Plus pédiatrique



2648E : Conseils utilisation Conveen, Folsyl & Folatex

## Outils pour le quotidien du patient



2649C : Brochure d'outils pour le quotidien - S ondag e intermittent

### Etuis péniens et Poches



1677E : Applicateur Conveen



2680E : Brochure outils au quotidien

\* document promotionnel, ne pouvant pas être remis par le professionnel de santé au patient




## MémoSonde™, pour vos patients souffrant de rétention urinaire

L'application gratuite **MémoSonde™** est conçue pour aider vos patients à prendre soin de leur vessie et à intégrer l'auto-sondage dans leur quotidien

Téléchargeable en scannant le **QR code** ou en se rendant sur le site [info.coloplast.fr/memosonde](http://info.coloplast.fr/memosonde)




### ✓ Découvrez toutes les fonctionnalités

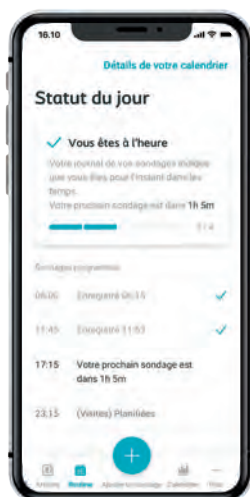


#### Routine de sondage et rappels

Inscription des recommandations du professionnel de santé et mise en place de rappels discrets afin d'établir une routine de sondage.

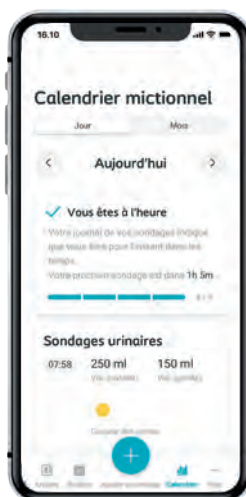

#### Calendrier mictionnel


Ce calendrier mictionnel digital est facilement accessible. Il est aussi possible de la partager avec un professionnel de santé si souhaité.

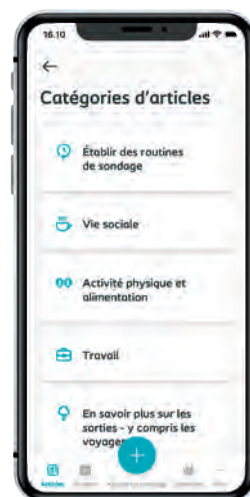

#### Articles écrits par des experts

L'application permet d'accéder à une bibliothèque d'articles personnalisés et de conseils inspirants.

# La meilleure prise en charge des patients *est entre vos mains*

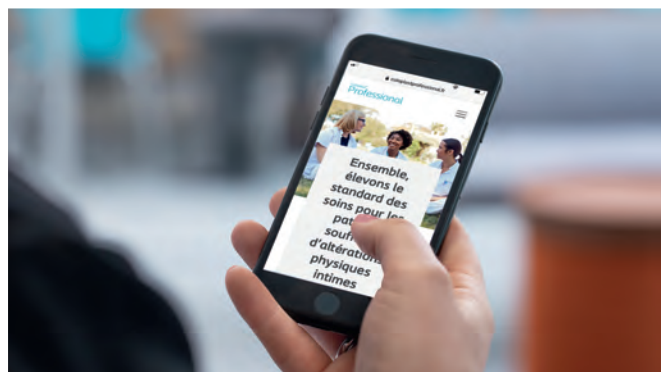

En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à vous soutenir dans la prise en charge et l'accompagnement de vos patients.

C'est pourquoi nous vous proposons une offre de services dédiés à tous les professionnels de santé qui souhaitent avoir accès à de l'information pertinente, échanger et partager leur expertise, pour façonner l'avenir ensemble.

Dans le cadre Coloplast Professional, les professionnels de santé ont accès à de nombreux services :



#### **Supports d'informations**

Acquérir les fondamentaux dans une spécialité



#### **Groupes de consultations**

Contribuer à la création de produits et services



#### **Événements Coloplast**

S'inspirer, se rencontrer et échanger avec ses pairs



#### **Projets de recherche**

Trouver de nouvelles façons d'élever le standard des soins

## Plateforme web ColoplastProfessional.fr

Accédez à une plateforme d'informations fiables et collaborative, dédiée aux professionnels de santé.

Nouveau



- Allez plus loin dans l'accompagnement de vos patients grâce à nos **webinaires et vidéos d'experts**.
- Téléchargez nos **outils éducatifs** pour encourager vos patients à adopter les bons réflexes.
- Consultez nos **articles scientifiques** et restez informé(e) sur des sujets clés dans votre domaine.

## La proximité auprès des professionnels de santé



Les Responsables régionaux répondent à vos besoins :

- Conseils sur l'utilisation des produits
- Echantillons et documentations sur demande

Les conseillers du Service Clients Coloplast vous assistent

- Commandes de produits
- Echantillons et documentations sur demande
- Conseils techniques sur nos produits

Pour plus d'informations, Coloplast est à votre écoute  
Tél. 01.56.63.18.00 - Fax : 01.56.63.17.73

## Votre relais de confiance en ville



Notre service Coloplast Professional Conseil fournit un accompagnement personnalisé aux professionnels de santé exerçant à la ville, pour répondre au mieux aux besoins des patients, de retour à domicile.

- Formation à l'utilisation de nos produits
- Conseils
- Proximité et écoute

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30,

- par téléphone au : **01 56 63 18 88** > Choix 1 ou
- par e-mail à [conseil.pro@coloplast.com](mailto:conseil.pro@coloplast.com)

# Références

1. Détermination des forces de frottements sur les sondes urinaires conformément à la norme NF T 54-112, rapport numéro H060843, août 2007, test réalisé par un laboratoire indépendant. SpeediCath vs Actreen Glys et Lofric Primo. SpeediCath a généré des forces de frottement d'en moyenne 0,16 N (ET= 0,02) vs forces de frottement moyennes avec Actreen Glys 0,83 N(ET=0,05) et 0,25 N (ET=0,04) pour Lofric Primo.
2. Stensballe J et al. Eur Urol. 2005 Dec; 48(6): 978-83. Etude comparative, randomisée, en cross over, en simple aveugle. SpeediCath vs LoFric vs InCare Advance Plus. 40 hommes volontaires sains. Critère principal : Frictions sur l'urètre (Newton) mesurées par une procédure automatisée. Résultats : Frictions exercées sur l'urètre plus faibles avec SpeediCath ( $0.14N \pm 0.003$  vs  $0.28 \pm 0.13$  avec LoFric et  $0.20 \pm 0.05$  avec Incare Advance Plus ;  $p < 0,05$ ). Tolérance urétrale améliorée : 65% des hommes ont noté Aucune douleur lors du sondage avec SpeediCath vs 43% avec LoFric et 25% avec InCare Advance Plus ( $p = 0,006$ ).
3. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005;48:991-95. Etude comparative, randomisée, en 2 groupes parallèles. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 123 patients blessés médullaires suivis sur 12 mois. Critère principal : infection urinaire symptomatique. Résultats : réduction significative des infections urinaires avec SpeediCath (Aucune infection : 36% des patients vs 18% grpe sondes sèches ;  $p = 0,02$ ). 57/123 patients ont terminé l'étude. Principales raisons d'arrêt : reprise d'une fonction urinaire normale ou changement de mode mictionnel.
4. Chartier-Kastler E et al. Spinal Cord 2011, Jul;49(7):817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over. SpeediCath Compact Homme (SCCH) vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : Très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen :  $1.59 \pm 2.24$  avec SCCH vs  $1.94 \pm 2.28$ . 95% IC: -1.49 à 0.80). Aucune douleur rapportée avec les deux sondes par 80% des patients ( $p = 0.6$ ). SCCH significativement plus facile à insérer (93.3% vs 73.3% ;  $p = 0.002$ ) et à contrôler (90% vs 60.6% ;  $p = 0.002$ ), plus discrète (90% vs 23%,  $p < 0.0001$ ) et plus facile à transporter, à stocker et à jeter ( $p < 0.0001$ ). 70% des patients ont préféré SpeediCath Compact Homme ( $p = 0.03$ ). SpeediCath Compact Homme a permis un sondage "no-touch" dans 93% des cas (vs 63% pour SpeediCath). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
5. Leriche A et al. Rapport clinique avril 2005. Etude clinique comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath Compact Femme vs les sondes standards. 50 patientes. Critère principal : Préférence patient. Résultats : 76% des patientes ont préféré SC Compact ( $p < 0.0001$ ) à leur sonde, notamment pour sa facilité d'introduction (66%), facilité de retrait (46%) et sa discrétion (98%). Tolérance urétrale significativement améliorée avec SpeediCath Compact : 2 fois moins d'événements indésirables (douleurs, brûlures, saignements à l'insertion de la sonde).
6. Bagi P, et al. Urol Int 2011; 86: 179-84. Étude comparative de non-infériorité, randomisée, en crossover et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 26 hommes sains. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen:  $2.25 \pm 1.5$  avec Compact vs  $2.52 \pm 1.8$ . 95% IC: -0.73 à 0.19). Même profil de tolérance urétrale avec les deux tsondes. SC Compact est plus facile à insérer ( $p = 0.0001$ ) et permet un hétérosondage no-touch dans 97.8% des cas ( $p < 0.05$ ). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
7. Recommandations EAUN (European Association of Urology Nurses) 2013. Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. Intermittent Catheterisation in adults. Page 26 : "Les sondes compactes permettent le respect de la technique non-touch." Page 29 : «Oeils pouvant êtres polis pour plus de confort lors du sondage»
8. Domurath B et al. Spinal Cord 2011; 49(7): 817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Les résultats montrent que la sonde SpeediCath Compact Homme est efficace pour vider la vessie (volume résiduel d'urine :  $12.4 \pm 15.7$  ml). Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane : 2,06 ml. 95% IC: -1.9, +7.7). 61% des hommes ont préféré SC Compact.
9. Biering-Sørensen et al. Scand J Urol Nephrol 2007; 41: 341-5. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Femme vs sondes standards. 24 femmes avec vessie neurogène. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane: -12,5 ml.  $p = 0.08$ ). 96% des femmes étaient très satisfaites avec SC Compact.
10. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude comparative, randomisée en cross over. SpeediCath Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 15 femmes). Critère Principal : Qualité de vie, à l'aide du questionnaire ISC-Q (0: le Pire à 100 : le Meilleur). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact (76.8 vs 59.8 avec sondes standards ;  $p < 0.001$ ), notamment sur les domaines Commodité, Discrétion et Facilité d'utilisation, aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que chez les femmes (+18,2). 63% des patients ont préféré SC Compact.



11. Enquête de satisfaction avec l'utilisation de SpeediCath Control réalisée auprès de 17 patients, mars 2009. Résultats : 70% des participants ont souhaité continuer à utiliser SpeediCath Control. 100% des participants l'ont noté Facile/Très facile à utiliser et 88% Facile/Très facile à contrôler durant le sondage; un sondage no-touch possible pour 69% des utilisateurs.
12. Pascoe G, et al. Br J Nurs 2001;10 (5):325–29. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric. 27 patients. Critère principal : Préférence. 76% des utilisateurs ont préféré SpeediCath à Lofric, notamment en termes de praticité (88%) et vitesse du sondage (68%) ( $p<0.0015$ ).
13. Van Kuppevelt et al. ISCoS, 2004 Septembre, Athens, Greece. Page : 216. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric vs EasiCath. 72 patients inclus. Critère principal : facilité d'utilisation sur une échelle de 0 (très difficile) à 10 (très facile). Résultats : SpeediCath a été jugée significativement plus facile à utiliser que les sondes Lofric et EasiCath (7.8 vs 6.9 et 6.7 respectivement ;  $p=0.003$ ).
14. Cardenas D et al. PM&R May 2011;3:408-17. Étude randomisée, en 2 groupes parallèles, avec un suivi de 6 mois. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 224 patients blessés médullaires récents (<3 mois) sous autosondages depuis < 10 jours. Critère principal : délai de survenue des infections urinaires symptomatiques (IUS). Résultats : L'apparition d'une IUS traitée par antibiotiques est significativement retardée dans le groupe SpeediCath ( $p=0,038$ ), avec une réduction de 33% du risque quotidien de développer une IUS (odds-ratio=0.666, IC 95% : 0.453-0.978) et une réduction de 21 % du taux d'IUS nosocomiale ( $p<0,05$ ). Satisfaction globale des patients supérieure dans le groupe SpeediCath ( $p=0,007$ ).
15. Leriche et al. Prog Urol. 2006 Jun;16(3):347-51. 29 patients sur 31 inclus. Etude comparative, prospective, multicentrique randomisée, en cross-over et en ouvert. SpeediCath Set vs Actreen Set. L'analyse a porté sur 29 hommes pratiquant l'autosondage. SpeediCath Set a démontré sa supériorité contre Actreen Set en termes de facilité d'introduction ( $p=0,0065$ ), facilité de vidange ( $p=0,0157$ ), qualité du lubrifiant ( $p<0,0001$ ), tolérance urétrale et performance du sondage au lit ( $p=0,0157$ ).
16. Enquête internationale de satisfaction avec l'utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 595 hommes et 383 femmes. 85% des hommes et 92% des femmes ont trouvé SpeediCath Compact Set facile à utiliser. 100% des professionnels de santé trouvent SpeediCath Compact Set facile à utiliser. 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est plus facile de former des patients avec SpeediCath Compact Set.
17. Enquête réalisée en juin 2012 auprès de 30 femmes pratiquant l'autosondage. Discrétion notée 6.7, féminine et esthétique notées 6.6 et facile à utiliser notée 5.9 sur une échelle allant de 1 (Pas du tout) à 7 (Extrêmement)
18. Usability study report. Enquête conduite en 2013 auprès de 18 participantes, dont 6 avec une dextérité manuelle réduite. 17/18 participantes ont noté Très Bon/Bon la facilité d'utilisation (ouverture, manipulation, fermeture), l'usage intuitif et la technique « no-touch » (sur une échelle verbale en 5 points). 15/18 ont noté Très Facile/Facile la connexion à une poche à urine.
19. Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test "Fermeture sécurisée après utilisation" consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l'agiter et la placer dans un filtre charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée.
20. Lubrification hydrophile brevetée
21. Cindolo L et al. Urol Int 2004;73:19–22. Etude randomisée, en 2 groupes parallèles, en simple aveugle à l'insu du patient. EasiCath Luer Lock vs sondes traditionnelles enduites de gel de lidocaïne ou néomycine ou fluocinolone. 100 patients recevant une immuno ou chimiothérapie intravésicale pour cancer de la vessie. Critère principal : infection urinaire définie par bactériurie >105 UFC/ml avec leucocyturie sur l'ECBU réalisé 2 jours après chaque sondage. Résultat : réduction significative des infections urinaires sous EasiCath (détectée pour 7,4 % (34/470) des sondages avec les sondes traditionnelles contre 3,5 % (17/482) des sondages avec EasiCath ;  $p<0,01$ ). L'inconfort urétral lors du sondage significativement réduit avec EasiCath ( $1.3\pm0.1$  vs  $2.1\pm0.2$  sur une échelle de 0 (aucun inconfort) à 5 (inconfort maximal) ;  $p<0,001$ ). Aucune orchio-épididymite ou hématurie observée.
22. Pariente JL, Conort P. Biomatériaux utilisés au contact de la voie excrétrice pour le drainage des urines : Sondes et Endoprothèses urétrales. Progrès en Urologie 2005; 15 897-906. Le Latex est toxique par lui-même et les additifs chimiques toxiques, associés aux cathéters au cours des processus de fabrication, sont relargables et extractibles, malgré une enduction de la sonde par un autre matériau. (page 894).
23. Recommandations CODIMS AP-HP, Dec 2009. Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Pages 26,31,43,51.



## Références (suite)

24. Chartier-Kastler E *et al.* BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etuis péniens Conveen Optima + poches Conveen vs les protections absorbantes. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal: Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : «limitation des activités quotidiennes» ( $p=0,01$ ) et «impact de l'incontinence» ( $p=0,045$ ). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniens Conveen Optima pour : efficacité, sentiment de sécurité, estime de soi, maîtrise des odeurs, respect de l'état cutané, sentiment de liberté et discrétion ( $p<0,05$ ).
25. Le déploiement de la bientraitance. Guide à destination des professionnels en établissements de santé et EHPAD. Groupe bientraitance FORAP-HAS. Mai 2012. «Mettre tout en oeuvre pour respecter l'intégrité physique et psychique, la dignité et l'intimité de l'usager».
26. Christensen P *et al.* Etude randomisée, contrôlée, irrigations transanales vs le traitement conservateur du dysfonctionnement intestinal chez les blessés médullaires. Gastroenterology 2006;131:738-47. 87 patients, 81 analysés. Critère Principal : évolution des symptômes de constipation et d'incontinence fécale. Résultats : Les patients traités avec l'irrigation transanale avaient moins de plaintes de constipation et d'incontinence fécale, avec une amélioration de leur qualité de vie, et un temps réduit passé sur les procédures de gestion de l'intestin. Score constipation Cleveland (0 à 30 ; 30 sévère) 10,3 vs 13,2 ( $p=0,0016$ ) ; score incontinence St-Mark (0-24 ; 24 sévère) 5,0 vs 7,3 ( $p=0,015$ ). 73,8% étaient partiellement ou totalement dépendant d'une tierce personne; 15/36 patients (41,6%) ont rapporté une réduction de leur dépendance avec Peristeen vs 2/44 (4,5%) dans le groupe contrôle ( $p= 0,0001$ ) + Taux d'infections urinaires symptomatiques avec Peristeen nécessitant une antibiothérapie : 5,9% vs 15,5% ( $p= 0,0052$ ). Temps passé sur les toilettes noté 30,8±19,4 vs 49,1±48,2 ( $p=0,094$ ). 4 événements indésirables ont été signalés dans le groupe ITA, aucun cas sévère, 2 cas non liés au dispositif (1 distension abdominale aiguë et 1 escarre sacré) et 2 cas de douleurs abdominales sévères se résolvant après désimpaction fécale après 3 et 9 semaines de traitement. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
27. Lehur P.A. *et al.* Correspondances en pelvi-périnéologie 2004 ; IV n°3 : 20-26. Etude contrôlée, ouverte, prospective, multicentrique. 32 patients spina bifida avec incontinence fécale sévère pluri-hebdomadaire. Critères principaux : scores de symptômes. Résultats : 82% des patients avec continence anale quasi complète ( $\leq 2$  fuites de selles) sur les 18 jours d'utilisation de Peristeen Obtal. 15 patients (56,6%) n'ont eu aucune fuite fécale. Après 18 jours d'utilisation, les patients ont un sentiment de sécurité 80% et un sentiment de liberté 53%. La tolérance a été bonne dans 90,6% des cas. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
28. Christensen P *et al.* Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. Dis Colon Rectum 2003; 46: 68–76. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
29. SpeediCath Flex evaluation study, Poster présenté au congrès de l'ISCoS (International Spinal Cord Society), oct 2017, Dublin, P248, Etude prospective «avant-après» en 2 parties, Partie 1 : Critère principal : évaluation du succès de l'insertion des sondes SpeediCath Flex dès le 1er sondage. Participants : 58 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes hydrophiles droites avec gaine. Résultats : 100% des patients ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Partie 2 : Critère principal: évaluation du succès de l'insertion des sondes SpeediCath Flex dès le 1er essai dans les anatomies difficiles. Participants: 95 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes béquillées (Tiemann), principalement pour grosse prostate (36%), rétrécissement urétral (26%) ou fausse route (12%). Résultats : 86% d'entre eux ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et sur les 87 patients qui l'ont utilisé pendant une semaine, 62% ont jugé Facile/Très Facile la navigation de la sonde dans l'urètre et 71% l'ont noté «douce à l'insertion».
30. EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins : Sondage urétral. Section 2, Sondage intermittent. 4.3.1 Embouts / Extrémité flexible et arrondie ; Page 17 : «La sonde urétrale idéale a une extrémité flexible qui permet le passage dans presque tous les urètres, quelle que soit leur configuration ou leur degré d'obstruction. Certaines sondes disposent d'extrémités spécialement arrondies destinées à prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre.»
31. Flex II: Verification Laboratory Report - DIO 4.5 touchable and dry sleeve, Doc. No: VV-0232486. Objectif : valider que la gaine est sèche et hermétique (test de bulle). 34 produits testés. Succès : 100%.
32. Emmanuel AV. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Review article. Spinal Cord. 2013 Oct;51(10):732-8. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
33. Test d'utilisation - Speedicath Flex Set (VV- 0323892), réalisé chez 16 patients, Février 2021.

Dans le cadre de leurs activités commerciales, les Laboratoires Coloplast SAS (6, rue de Rome, 93561 Rosny-sous-Bois cedex) (« Coloplast »), collectent et traitent les données personnelles des professionnels de santé. Ces données sont traitées pour les finalités suivantes :

- La gestion des activités marketing et promotionnelles (y compris l'envoi de communications) ;
- La gestion des inscriptions aux sessions d'information sur les produits Coloplast ;
- La gestion des demandes d'échantillons de produits ;
- La gestion des prises de rendez-vous avec les équipes commerciales de Coloplast ;
- La gestion des contrats et conventions (y inclus leur signature et leur exécution, les paiements associés, la gestion de l'archivage, et les formalités auprès des Autorités compétentes) ;
- Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables (en particulier les obligations relatives à la transparence, la lutte contre la corruption, l'inspection fiscale des comptes).

Pour en savoir plus sur la manière dont Coloplast, responsable du traitement de données, gère vos données personnelles et comment vous pouvez exercer vos droits, veuillez consulter, notre note d'information sur la protection des données personnelles sur <https://pro.coloplast.fr/global/rgpd/> ainsi que notre Politique mondiale de gestion des données à caractère personnel sur <https://www.coloplast.com/global/privacy-notice/privacy-notice---french/>

Vous pouvez demander à ne pas ou à ne plus recevoir de communications marketing et promotionnelles à tout moment et sans frais.

Pour toute question, veuillez contacter [privacyrequests@coloplast.com](mailto:privacyrequests@coloplast.com) ou contacter votre représentant local de Coloplast. Trouvez votre représentant local de Coloplast ici : <https://www.coloplast.com/global/contact-us/>

L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.

Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public. Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies. Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant de troubles physiques intimes.

Folysil, Peristeen Obtal : dispositifs médicaux de classe IIb, marqués CE (2460).

Conveen Optima, Peristeen Plus, Gamme Brava, Conveen Prep, poche SpeediCath Compact, poches à urines Conveen (hors Triform) et accessoires : dispositifs médicaux de classe I non stériles, marqués CE.

SpeediCath, EasiCath, Conveen Triform : dispositifs médicaux de classe I, stériles, marqués CE (2460).

Conveen Protact est un produit cosmétique

Fabricant : Coloplast A/S.

Folatex : dispositif médical de classe IIb, stérile, marqué CE (0123).

Fabricant : Well Lead Medical Co., Ltd

Lire attentivement la notice d'instructions des produits avant utilisation.

[www.autoreeducation-perineale.fr](http://www.autoreeducation-perineale.fr)

Un guide en ligne pour aider vos patients à pratiquer leurs exercices d'autorééducation périnéale. Un test leur permettra de suivre leurs progrès.

Coloplast partenaire du  
DIU d'Infirmière experte en Urologie



Association  
Française  
d'Urologie  
[www.urofrance.org](http://www.urofrance.org)



Association  
Française des  
Infirmières et  
Infirmiers en  
Urologie

Le **service clients Coloplast**  
est une équipe de professionnels  
à votre écoute pour toute question  
sur nos produits, commandes  
et envoi d'échantillons.

Tél. **01 56 63 18 00**  
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

Document réservé à l'usage de professionnels de santé.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée  
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France  
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362  
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 247Z - PM-20802 - Septembre 2022 - PS



**Coloplast**