

# Les troubles de la *continence*

Brochure gamme - Septembre 2021



**NOUVEAU**

Visionnez les vidéos d'application en  
scannant les QR codes dans la brochure



**Coloplast**

# Le développement durable, un sujet au cœur des préoccupations de Coloplast

*Parmi les valeurs de Coloplast, le respect de l'environnement prend toute sa place.*

## Les matériaux et le développement des produits

Coloplast choisit des matériaux respectueux pour l'environnement pour fabriquer ses produits. Nos produits et leurs emballages en carton ont été conçus dans une optique de développement durable. Comme vous pourrez le constater, toutes les boîtes de nos produits peuvent être recyclées. Afin de limiter le volume des déchets, nous utilisons des boîtes de taille réduite au maximum.

D'autre part, nos boîtes anciennement vertes, bleues et jaunes ont été remplacées par des boîtes blanches. Il en est de même pour les modes d'emploi qui ne sont plus imprimés en couleur mais en noir et blanc. Ces changements permettent de diminuer notre consommation d'encre et de papier ainsi que les émissions de CO<sub>2</sub> lors de la fabrication de nos produits.

## Les méthodes de fabrication



La politique du groupe Coloplast est de s'investir dans le respect de l'environnement. C'est pourquoi, la plupart de nos sites de production ont été certifiés ISO 14001. Cette certification garantit que les méthodes de fabrication respectent un certain nombre de critères afin de préserver l'environnement<sup>1</sup>.

## La production

Le PVC est un composant thermoplastique qui contient très souvent des phtalates (groupe de produits chimiques utilisés comme plastifiant et dont la toxicité est bien connue). On reproche aux phtalates leur pouvoir cancérigène, leur non-recyclage et le dégagement de produits nocifs lors de leur incinération<sup>2</sup>.

Conscient des risques pour les utilisateurs et l'environnement, Coloplast a choisi de privilégier des produits sans PVC ni phtalates. C'est notamment le cas des sondes SpeediCath fabriquées en polyuréthane et de l'étui pénien Conveen Optima composé de polysiloxane.



## Le recyclage

Les coques individuelles des étuis Conveen Optima peuvent être recyclées au même titre que les bouchons de bouteilles en plastique.

# Sommaire

## Sondage intermittent p. 4 à 21

La gamme SpeediCath :  
- pour hommes  
- pour femmes

La gamme EasiCath

## Sondage à demeure p. 24 à 27

Sondes à demeure Folsyl  
Poches stériles Conveen Triform

## Étuis péniers p. 28 à 35

Conveen Optima

## Poches à urine p. 36 à 38

pour le sondage intermittent,  
le sondage à demeure  
et les étuis péniers

Les poches de jambe Conveen et Conveen Active  
Les poches de nuit Conveen  
Les solutions de maintien des poches sur la jambe  
Les solutions de stabilisation de la poche

## Autres p. 39

## Gamme Peristeen p. 40 à 47

Pour un transit intestinal maîtrisé

Peristeen Irrigation Transanale  
Peristeen Obtal

# La gamme SpeediCath®

Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

N°1  
en France\*



# SpeediCath, le choix de la référence\*

Depuis près de 15 ans, les Laboratoires Coloplast, grâce à la gamme SpeediCath®, ont été les premiers à vous proposer des sondes hydrophiles prêtes à l'emploi, des sondes compactes et des sets de sondage compacts.

La gamme SpeediCath est aujourd'hui la référence en matière de design\*\* et de performances<sup>1-3, 12-15</sup> des sondes.

Nous n'avons pas inventé la sonde, mais nous la réinventons chaque jour.



Les premières sondes prêtes à l'emploi  
SpeediCath Standard

Les premières sondes compactes  
SpeediCath Compact et  
SpeediCath Compact Eve

Les premiers sets de sondage compacts  
SpeediCath Compact Set

Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos  
SpeediCath Flex



\* Données Gers 2016 : la gamme SpeediCath est la gamme de sondes la plus vendue en France.

\*\* Prix du design remportés :

SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design "Medical design excellence awards 2011" et "Janus de la santé 2010"

SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design "Independent living - design awards"

SpeediCath Compact Eve gagnant du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" et Prix "Design Award IF 2015"

SpeediCath Compact Set gagnant du prix du design "Reddot design awards 2013"

# Ce n'est pas par hasard si la gamme SpeediCath est la plus utilisée en France\*

La gamme SpeediCath a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels de santé

## 1. Sécurité et confort urétral

### > Les premières sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

- Temps de préparation diminué<sup>12</sup> et facilité de manipulation<sup>5,10,12,13</sup> pour le patient
- Permet un sondage en toutes circonstances
- Diminution du risque de contamination exogène lié à la qualité de l'eau

### > Sonde en polyuréthane : 100% sans PVC, ni phtalates CMR\*\*

Les phtalates CMR sont des substances :  
cancérogènes, mutagènes, repro-toxiques.

### > Lubrifiant à viscosité progressive garantissant une force de friction minimale et une glisse homogène<sup>1,2</sup>




Sondes SpeediCath

#### 2 couches de lubrifiant à viscosité progressive !

- > Une glisse à faibles frictions de la sonde sur la muqueuse de l'urètre<sup>2</sup>
- > Une glisse homogène sur toute la longueur de la sonde<sup>1</sup>
- > Un ancrage solide du lubrifiant sur la surface de la sonde

### > Des oeils polis, pour plus de confort lors du sondage<sup>7</sup>

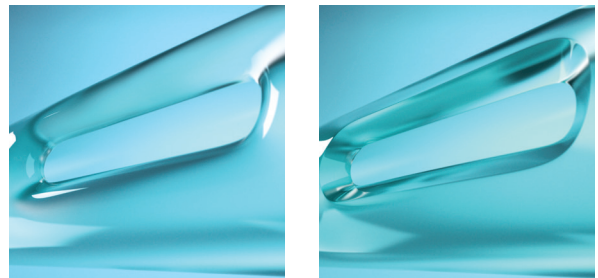

Oeil polis à chaud

Oeil non polis

Un processus développé spécifiquement pour SpeediCath permet de polir les bords de chaque oeil "à chaud" pour créer une transition parfaitement douce entre l'oeil et la surface de la sonde.

\* Données GERS 2015 : la gamme SpeediCath, la gamme de sondes la plus vendue en France

6 \*\* DTI Report n°35196-1a, Specific analysis for content of phthalates, janvier 2010

## 2. Efficacité cliniquement prouvée

12 études ont démontré l'efficacité des sondes SpeediCath<sup>2-6, 8-10,12-15</sup>


Une efficacité sur de nombreux paramètres : facilité d'utilisation, inconfort urétral, infections urinaires, forces de friction, volume résiduel dans la vessie, discrétion, qualité de vie et préférence.

### > Une sonde à frictions minimales comparativement à d'autres sondes

Avec SpeediCath :

- Les forces de frottement sont réduites<sup>1,2</sup>
- La glisse est homogène sur toute la longueur de la sonde<sup>1</sup>
- La glisse est harmonieuse et reproductible d'une sonde à l'autre<sup>1</sup>

Détermination des forces de frottements de 3 sondes urinaires conformément à la norme NFT54-112<sup>1</sup>

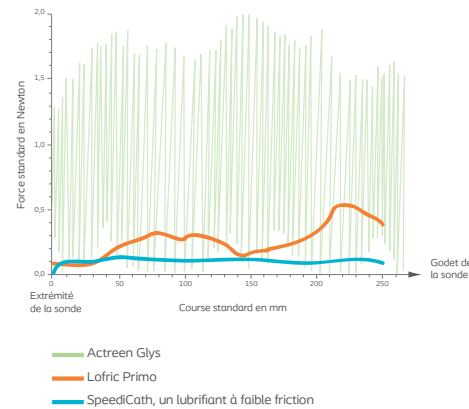


Étude Stensballe European Urology  
Décembre 2005<sup>2</sup>

### > Le risque de microtraumatismes de l'urètre est réduit

Étude clinique prospective, randomisée en cross-over comparant SpeediCath aux sondes Lofric et Incare Advance Plus sur 40 volontaires sains<sup>2</sup> avec sensibilité urétrale préservée. Critère principal : Mesures des forces de frictions au retrait de la sonde.

SpeediCath, 2 fois moins de forces de friction<sup>2</sup>

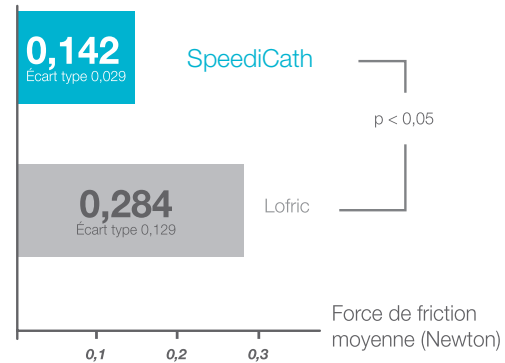

### > Tolérance urétrale améliorée<sup>2</sup>


65% des hommes ont noté «Aucune douleur» lors du sondage avec SpeediCath vs 43% avec LoFric; et 25% avec InCare Advance Plus (p=0,006).

### > Les infections urinaires sont diminuées

Étude clinique prospective multicentrique, randomisée en 2 groupes parallèles - comparant SpeediCath à une sonde sèche lubrifiée manuellement 123 hommes blessés médullaires suivis sur une période d'un an<sup>3</sup>.

SpeediCath, 2 fois plus de patients n'ont développé aucune infection urinaire symptomatique<sup>3</sup>

Étude De Ridder European Urology  
Décembre 2005<sup>3</sup>

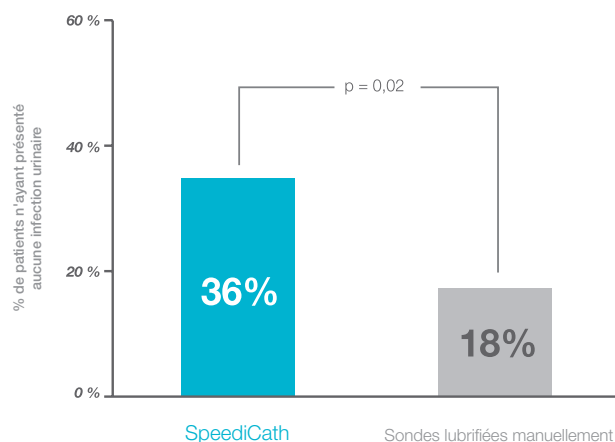

### 3. Une gamme complète pour répondre à tous les besoins

#### > Respect des différences et des besoins

Sexe, mode de vie, dextérité, discrétion, auto ou hétéro-sondage...

#### > Gamme étendue

Sondes de longueur standard/compacte, sondes droites/béquillées, sondes pour limiter les oscillations, sondes pour adultes/enfants...

### Pour les hommes

- a **SpeediCath Flex**  
Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos
- b **SpeediCath Compact Set**  
Le seul set de sondage télescopique, compact
- c **SpeediCath Compact Homme**  
La seule sonde compacte télescopique pour homme
- d **SpeediCath Control**  
La sonde standard avec un système de contrôle renforcé
- e **SpeediCath Standard**  
La sonde standard



### Pour les femmes

- f **SpeediCath Compact Set**  
Le 1<sup>er</sup> set de sondage compact
- g **SpeediCath Compact Femme**  
La 1<sup>ère</sup> sonde compacte pour femme
- h **SpeediCath Compact Eve**  
La dernière génération de sonde compacte pour femme
- i **SpeediCath Standard**  
La sonde standard



# SpeediCath Compact, une solution adaptée au quotidien des utilisateurs

*SpeediCath a su évoluer pour répondre toujours mieux aux besoins des professionnels de santé et des patients.*

## > Des bénéfices clés qui font la différence

### Discrétion

Plus de 90% des patients trouvent la gamme SpeediCath Compact discrète<sup>4,5</sup>  
SpeediCath Compact facilite le stockage et le transport.

### Hygiène

Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur :  
Insertion sans toucher le corps de la sonde, respect de la technique «no-touch»<sup>4,6,7</sup>

### Facilité d'utilisation<sup>4-6,10</sup>

La majorité des utilisateurs notent les sondes SpeediCath Compact plus faciles à insérer que les sondes de longueur standard.

Gamme SpeediCath Compact, désormais inscrite en nom de Marque




## > Une qualité de vie améliorée, en réduisant les contraintes de l'ASI<sup>10</sup>

10 ans après la commercialisation des 1<sup>ères</sup> sondes compactes, une étude, publiée dans The Journal of Urology a démontré les bénéfices des sondes SpeediCath Compact sur la qualité de vie des patients.

Augmentation de 28% du score de qualité de vie ISC-Q\* avec les sondes SpeediCath Compact par rapport aux sondes standards (p<0.001).


**Reconnaissance par la Haute Autorité de Santé de l'Amélioration du Service Rendu (ASR niveau IV) en matière de qualité de vie par rapport aux sondes hydrophiles prises en charge dans les lignes génériques\*\*.**

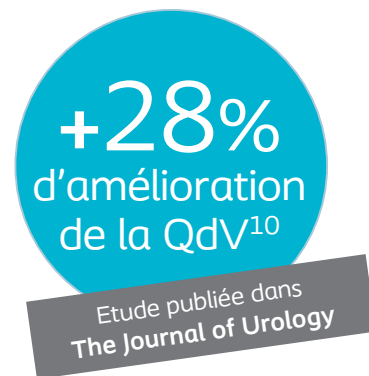

## > La préférence de 6 utilisateurs sur 10<sup>10</sup>



6 utilisateurs sur 10 choisissent SpeediCath Compact quand on leur donne le choix

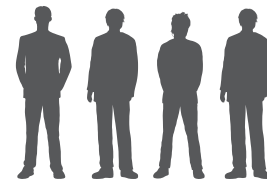

\* ISC-Q = Intermittent Self Catheterization Questionnaire, score validé évaluant l'impact de l'ASI sur la QdV allant de 0 (contraintes lourdes de l'autosondage) à 100 (Aucune contrainte).

\*\* Avis de la CNEDIMTS du 22/03/2016, sondes urinaires SpeediCath Compact.

A close-up portrait of a man with short dark hair and light blue eyes, looking off to the side. He is wearing a bright green jacket with a dark blue inner lining and a dark blue polo shirt underneath. The jacket has a high collar and a zipper. A small logo is visible on the chest of the jacket. The background is a plain, light grey color.

# La gamme SpeediCath® pour homme

# SpeediCath® Compact Set

Le seul set de sondage télescopique,  
compact pour les hommes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

## Une simplicité prouvée<sup>16</sup>

### SpeediCath Compact Set :

> Reconnu par les professionnels de santé comme étant le meilleur set sur le marché en termes de facilité d'utilisation<sup>16</sup>

- 85% des utilisateurs et 100% des professionnels de santé le trouvent facile à utiliser
- 93% des professionnels de santé le trouvent plus facile à utiliser que les autres sets du marché
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set

### > Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde avec respect de la technique "no-touch"<sup>4,6,7</sup>

SpeediCath Compact Set, une solution à proposer à tous vos patients, en utilisation unique ou en complément à l'utilisation des sondes.

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml  
Homme nelaton/droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
012/18	284221	5708932533515



Reconnu pour sa facilité d'utilisation<sup>16</sup>



reddot design award winner 2013

Le "red dot" est un prix récompensant les produits de design de grande qualité. Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

Vidéo d'utilisation SpeediCath® Compact Set homme



\* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08 €TTC, remb. Séc. Soc. 74,08 €.



# SpeediCath® Compact homme

La solution conçue pour les hommes :

- qui se sondent directement dans les toilettes ou qui souhaitent raccorder une poche
- qui souhaitent une solution discrète, même après utilisation

## SpeediCath Compact Homme :

### > Une solution très discrète pour faciliter le transport, le stockage et l'élimination :

- Grâce à son design compact (19 cm fermé, 30 cm une fois la sonde déployée) et non médical
- Facilite le transport, le stockage et l'élimination <sup>4,10</sup>

### > Simple d'utilisation :

- Plus facile à insérer et à contrôler <sup>4,6</sup>

### > Hygiénique :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch" <sup>4,6,7</sup>

### > Une vidange efficace <sup>8</sup>

### > Connecteur universel

- pour poche à urine, si besoin.



Préférée par  
**6 patients**  
sur 10 <sup>4,10</sup>




JANUS 2010  
DE LA SANTÉ



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Compact  
homme en fauteuil



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact homme



Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
0 12/18	286920	5708932472623



\* SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design "Medical design excellence awards 2011" et du "Janus de la santé 2010"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94 €TTC, remb. Séc. Soc. 82,94 €.



# SpeediCath® Flex

La solution conçue pour les hommes :

- qui souhaitent une solution souple avec gaine
- qui se sondent directement dans les toilettes ou souhaitent raccorder une poche
- qui souhaite un solution discrète même après utilisation



## Un sondage facile dans les moindres détails

### SpeediCath Flex : Flexible, Pratique, Discrète

#### > Flexitip : Extrémité souple et olivaire


- L'extrémité flexible suit facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie et aide au passage de la prostate et des sphincters<sup>29</sup>.
- L'extrémité de forme olivaire prévient les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre<sup>30</sup>.

#### > Gaine de protection sèche et hermétique

- Prise en main de la sonde facile et propre.
- En circuit clos, cette gaine permet de conserver l'intégrité de la lubrification et évite la contamination par les bactéries extérieures<sup>31</sup>.

#### > Emballage discret et refermable

- Son format de poche aux couleurs neutres permet de **faciliter le transport**, de **réduire l'encombrement** lié au stockage.
- La sonde et l'emballage peuvent être refermés après utilisation pour une **élimination propre et discrète**.

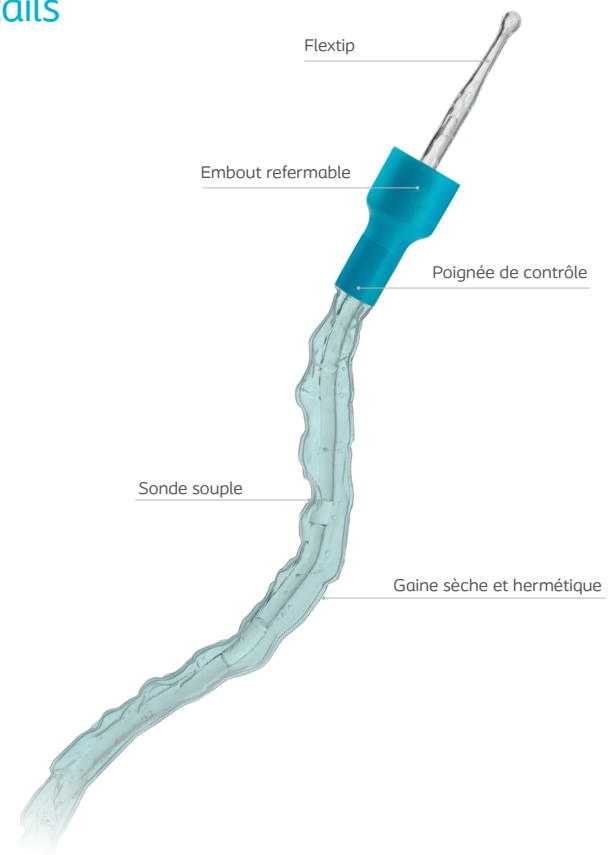

Intégralement remboursé\*

**Format de poche** - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	289100	5708932124263
○ 12	289120	5708932124355
● 14	289140	5708932124447



Intégralement remboursé\*

**Format standard** - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	289200	5708932700252
○ 12	289220	5708932700283
● 14	289240	5708932700313
● 16	289160	5708932124539



Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Flex  
homme



\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

SpeediCath®

# SpeediCath® Control

La sonde standard avec un système de contrôle renforcé

## Un système limitant les oscillations

SpeediCath Control :

- > Facile à contrôler et à insérer<sup>11</sup>
- > Peut faciliter l'insertion sans toucher le corps de la sonde<sup>11</sup>

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
○ 12	272120	5708932505758



# SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1<sup>ère</sup> sonde hydrophile  
prête à l'emploi

SpeediCath Standard :

> Une supériorité démontrée versus les autres sondes hydrophiles non prêtes à l'emploi<sup>2,12,13</sup>

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	274080	5708932505772
● 10	274100	5708932505796
○ 12	274120	5708932505819
● 14	274140	5708932505833
● 16	274160	5708932505857
● 18	274180	5708932505871

Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	274900	5708932505895
○ 12	274920	5708932505918
● 14	274940	5708932505932

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Adolescent nelaton/droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	276080	5708932506052
● 10	276100	5708932506076
○ 12	276120	5708932506090

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Enfant nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	277060	5708932506113
● 08	277080	5708932506137
● 10	277100	5708932506151

 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Standard homme



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Standard  
homme en fauteuil



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Standard enfant



\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



# La gamme SpeediCath<sup>®</sup> pour femme

# SpeediCath® Compact Set

Le 1<sup>er</sup> set de sondage compact commercialisé pour les femmes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes \*
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

## Une simplicité prouvée<sup>16</sup>

### SpeediCath Compact Set :

> Reconnu par les professionnels de santé comme étant le meilleur set sur le marché en termes de facilité d'utilisation

- 92% des utilisatrices et 100% des professionnels de santé le trouvent facile à utiliser
- 93% des professionnels de santé le trouvent plus facile à utiliser que les autres sets du marché
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set

> Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch"<sup>7</sup>

SpeediCath Compact Set, une solution à proposer à tous vos patientes, en utilisation unique ou en complément à l'utilisation des sondes.

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml  
Femme nelaton/droite 9 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	285201	5708932557269
○ 12	285221	5708932533546
● 14	285241	5708932544870



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact Set femme



reddot design award  
winner 2013\*

Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

\* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

\*\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08€TTC, remb. Séc. Soc. 74,08€.

# SpeediCath® Compact femme

La solution conçue pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution discrète

Une Qualité de Vie améliorée<sup>10</sup>

Première sonde compacte du marché

SpeediCath Compact Femme :

- > **Une solution discrète**<sup>5</sup> :
  - Grâce à son design compact et non médical
- > **Simple d'utilisation** :
  - Une sonde compacte facile à insérer<sup>5</sup> et à contrôler
- > **Hygiénique** :
  - Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
  - Insertion sans toucher le corps de la sonde grâce à sa poignée de préhension (respect de la technique "no-touch")<sup>7</sup>



## SpeediCath Compact Femme

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Femme nelaton/droite 7 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	285760	5708932414586
● 08	285780	5708932416450
● 10	285800	5708932156721
○ 12	285820	5708932156745
● 14	285840	5708932156769

## SpeediCath Compact Plus Femme

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes  
Femme nelaton/droite 9 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	288100	5708932439275
○ 12	288120	5708932439299
● 14	288140	5708932439312



▶

**Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath®  
Compact femme

▶

**Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath® Compact  
femme en fauteuil

▶

**Vidéo d'utilisation**  
SpeediCath®  
Compact enfant

## Poche SpeediCath Compact

Poche à urine raccordable aux sondes de la gamme SpeediCath Compact

Intégralement remboursé\*\*

Boîte de 30 poches		
	Référence	GTIN
0,75 l tub. 30 cm	210420	5708932185240
0,75 l tub. 50 cm	210860	5708932425216

\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solide de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

\*\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# SpeediCath® Compact Eve®

Notre dernière génération de sonde pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui veulent une solution esthétique et discrète, même après utilisation

## La sonde la plus discrète et féminine de notre gamme

### SpeediCath Compact Eve :

#### > Une forme ergonomique pour une meilleure prise en main

- Un design intuitif
- Respect de la technique "no-touch" (sans contact avec le corps de la sonde)<sup>7</sup>
- Stabilité : la sonde ne roule pas lorsqu'elle est posée horizontalement

#### > Ouverture facile et fermeture sécurisée

- Ouverture facile en un seul geste, dans un sens ou dans l'autre<sup>18</sup>
- Refermable hermétiquement, pour faciliter le transport et l'élimination<sup>19</sup>

#### > Connexion à la poche sécurisée

- Connecteur universel pour poche à urine intégré
- Risque de contamination exogène limité : la sonde reste protégée dans son conditionnement lors de la connexion



reddot award 2015 \*\*

### SpeediCath Compact Eve


Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

Femme nelator/droite 9 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	281100	5708932587549
○ 12	281120	5708932567756
● 14	281140	5708932587570



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath®  
Compact Eve



\* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

\*\* SpeediCath Compact Eve lauréat du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" ainsi que du prix "Design Award IF 2015"

# SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1<sup>ère</sup> sonde hydrophile prête à l'emploi

## SpeediCath Standard

> Une supériorité démontrée versus les autres sondes hydrophiles non prêtes à l'emploi<sup>12,13</sup>



Intégralement remboursé\*

### Enfant nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	277060	5708932506113
● 08	277080	5708932506137
● 10	277100	5708932506151

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sondes

### Femme nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	275080	5708932505956
● 10	275100	5708932505970
○ 12	275120	5708932505994
● 14	275140	5708932506014
● 16	275160	5708932506038

 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Standard  
femme



 Vidéo d'utilisation  
SpeediCath® Standard  
femme en fauteuil



EasiCath®

Sondage intermittent  
gamme EasiCath

# EasiCath et EasiCath Luer-Lock

## Sondes hydrophiles autolubrifiées pour hommes et femmes

Le lubrifiant des sondes EasiCath est actif après une immersion de 30 secondes dans l'eau : la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

Les sondes hydrophiles EasiCath sont associées à significativement moins d'infections urinaires et moins d'inconfort urétral que les sondes lubrifiées manuellement<sup>21</sup>.

### L'embout Luer-Lock permet :

#### > L'apprentissage de l'autosondage

- Le système Luer-Lock sécurise le patient inexpérimenté qui peut placer tranquillement la sonde avant de retirer le bouchon pour libérer l'urine.

#### > Les instillations vésicales\*

- L'embout Luer-Lock permet d'adapter une seringue sans aiguille contenant une solution médicamenteuse et garantit une connexion étanche. En effet, la seringue est directement raccordée à la sonde.



Intégralement remboursé\*\*

### Sondes EasiCath

Boîte de 30 sondes

#### Femme nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	053680	5701780061674
● 10	053700	5701780061681
○ 12	053720	5701780047968
● 14	053740	5701780047951
● 16	053760	5701780061698

#### Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	053480	5701780061704
● 10	053500	5701780061711
○ 12	053520	5701780047934
● 14	053540	5701780047944
● 16	053560	5701780061728
● 18	053580	5701780061735

#### Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	053800	5701780061742
○ 12	053820	5701780061759
● 14	053840	5701780061766
● 16	053860	5701780061773
● 18	053880	5701780061780

Intégralement remboursé\*\*

### Sondes EasiCath Luer-Lock

Boîte de 20 sondes

#### Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	052909	5701780173766
○ 12	052929	5701780173773
● 14	052949	5701780173780

#### Femme nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	052709	5701780173742
○ 12	052729	5701780173759

\* Les sondes EasiCath ne sont pas remboursées dans l'indication instillations vésicales..

\*\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# Set EasiCath

Set de sondage hydrophile autolubrifié pour hommes, femmes et enfants.



## Avantages

### > Ouverture pré-découpée

- Facilité d'ouverture du set.

### > Site de blocage étanche

- Évite le risque de fuite.
- Après une immersion de 30 secondes dans l'eau, la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

## EasiCath Set est composé de :

- > Une sonde autolubrifiée EasiCath
- > Une dosette de sérum physiologique pour rendre le lubrifiant actif
- > Une poche de recueil graduée de 700 ml

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sets

### Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	280069	5701780175753
○ 12	280079	5701780175784
● 14	280089	5701780175814
● 16	280099	5701780175456
● 18	280109	5701780175463

### Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH	Référence	GTIN
○ 12	280179	5701780175500
● 14	280189	5701780175517
● 16	280199	5701780175517

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 sets

### Femme nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	280019	5701780175630
● 10	280029	5701780175661
○ 12	280039	5701780175692
● 14	280049	5701780175722
● 16	280149	5701780175494

### Enfant nelaton/droite 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	280129	5701780175470
● 10	280139	5701780175487

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Folysil®

# Folysil® 100% silicone

## Sonde à demeure

- > Recommandée pour le sondage de longue durée, en pédiatrie et chez le patient allergique au latex<sup>22,23</sup>
- > Durée de port ≤ 30 jours<sup>23</sup>



Intégralement remboursé\*

### Sondes Folysil

Délivrable à l'unité, cond. par boîte de 5

#### Adulte nelaton/droite 41 cm ballonnet 10-15 ml

CH	Référence	GTIN
○ 12	HA6112	3600040242087
● 14	HA6114	3600040242131
● 16	HA6116	3600040242186
● 18	HA6118	3600040242230
● 20	HA6120	3600040242285
● 22	HA6122	3600040242339
○ 24	HA6124	3600040242384

#### Enfant nelaton/droite 30 cm ballonnet 1,5 ml et 3 ml

CH	Référence	GTIN
● 06	HA6106	3600040241936
● 08	HA6108	3600040241981
● 10	HA6110	3600040242032

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

# Recommandations d'utilisation des sondes Folysil®

## Gonflez le ballonnet avec de l'eau stérile

**Ne remplissez jamais le ballonnet avec du sérum physiologique.** L'utilisation de sérum physiologique peut entraîner la formation de cristaux de sels qui bloquent le conduit de gonflage du ballonnet. Toute solution qui précipiterait ou cristalliserait peut être à l'origine de difficultés de dégonflage du ballonnet.

## Utilisez un lubrifiant à base aqueuse


Les lubrifiants comme la vaseline et les lubrifiants à base d'huile de silicone sont déconseillés car ils altèrent les propriétés mécaniques du ballonnet et peuvent entraîner des éclatements ou des dégonflages du ballonnet.

## Et pour mieux dégonfler le ballonnet :

- Lors du dégonflage du ballonnet, ne pas aspirer tout le liquide avec la seringue pour ne pas provoquer des plis sur le ballonnet pouvant être à l'origine de lésions urétrales lors du retrait de la sonde.



- Laissez (ou réinjectez) 1 ml de liquide lors du retrait de la sonde. Ce volume de liquide suffit à prévenir la formation de plis susceptibles de traumatiser le méat lors du retrait de la sonde.

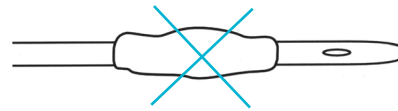

- Plus un ballonnet est resté gonflé longtemps, plus il est conseillé de le dégonfler lentement.

## Sondage à demeure du patient à domicile

### Sonde à demeure



> Utilisée pour le sondage de longue durée en pédiatrie et chez le patient allergique au latex (durée de port ≤ 30 jours)<sup>23</sup>



### Poche de jambe stérile Conveen Triform



Conveen Triform 0,5 l  
Conveen Attaches de jambe



Conveen Triform 1,5 l  
+ Conveen Attaches de jambe



OU



### Poche de nuit non stérile Conveen pour les patients sous sondage vésical de longue durée en ambulatoire\*

Conveen 1,5 l



Conveen 2 l



Poche non stérile à raccorder pour la nuit à la poche de jambe

## Poches de jambe stériles Conveen Triform 0,5 l et 1,5 l

### Avantages des poches Conveen Triform

#### UNE ASEPSIE CONTRÔLÉE

#### > Confort


- Forme anatomique et voile doux
- Tubulure souple
- Soudure centrale pour une meilleure répartition des urines (Conveen Triform 0.5L)

#### > Discrétion

- Matériau discret sous les vêtements

#### > Sécurité

- Valve anti-reflux
- Tubulure crenelée anti-coudage (Conveen Triform 0.5L)
- Connecteur de forme conique et cranté pour sécuriser la connexion
- Pas de latex d'origine naturelle dans la composition du produit

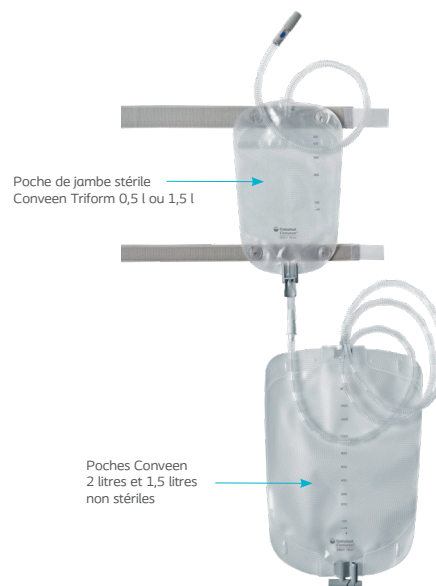

Poche de jambe stérile  
Conveen Triform 0,5 l ou 1,5 l

Poches Conveen  
2 litres et 1,5 litres  
non stériles

Intégralement remboursé\*

### Poches de jambe stériles Conveen Triform non ajustables et pré-montées

Boîte de 10 poches graduées

	Référence	GTIN
0,5 l tub. cranelée 50 cm	210190	5708932539425
1,5 l tub. lisse 90 cm	050630	5701780009645

 Vidéo d'utilisation  
Poches de jambe  
Conveen



## Les solutions de maintien sur la jambe



Intégralement remboursé\*

### Conveen Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches - Maintien de la tubulure  
ou de la sonde à demeure sur le haut de la cuisse

	Référence	GTIN
90 cm ajustable	383004	5708932507233

Largeur : 3,5 cm



Largeur: 2,5 cm



Intégralement remboursé\*

### Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10  
Maintien de la poche à urine sur la jambe

	Référence	GTIN
	050501	5708932135184



Intégralement remboursé\*

### Conveen Filets

Boîte de 2 filets

Taille	Circonférence	Référence	GTIN
● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
● Large	55-85 cm	783695	5708932507202

## Poches non stériles à raccorder pour la nuit à la poche de jambe



Intégralement remboursé\*

### Poches à urine Conveen 2 l et 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l tub. cranelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289

 Vidéo d'utilisation  
Poches de nuit  
Conveen



Les solutions de stabilisation : cf. page 36

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

## Principe du système collecteur

Pour le retour au domicile de votre patient, il existe des solutions adaptées au degré de sévérité de l'incontinence urinaire :

### Etui pénien Conveen Optima

Si verge courte (< 8 cm) :  
Conveen Optima Specific



### Poche à urine Conveen

Si incontinence légère à modérée\*



Si incontinence modérée à sévère\*




Poche de jambe  
Conveen Active 250 ml



Poches de jambe  
Conveen 0.5 l, 0.75 l ou 1.5 l



Poches de nuit Conveen 1,5L - 2L - 2L Basic

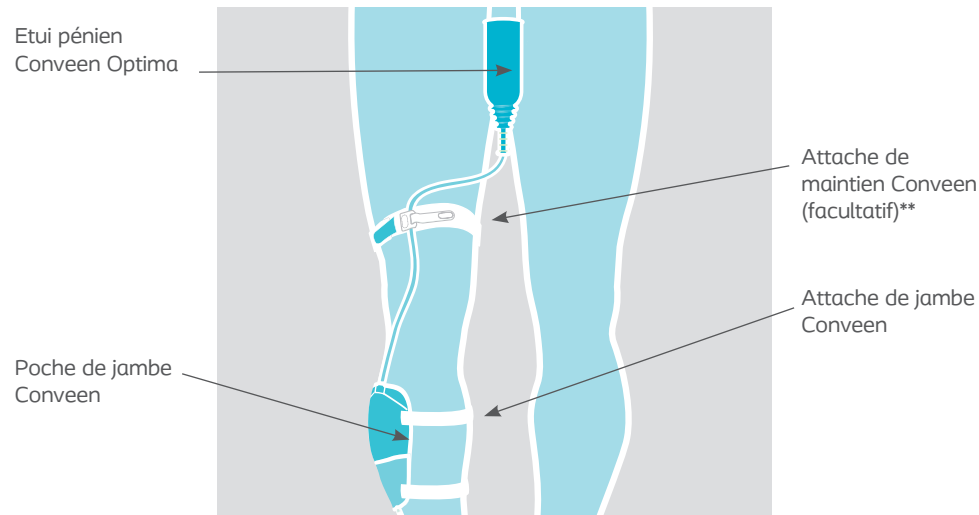

\* Définition de l'incontinence légère à modérée et modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

28 \*\* pour éviter les tractions sur l'étui pénien lors des déplacements

# Conveen Optima



## PREMIÈRE PRESCRIPTION

Boîte de 15 étuis pour essai

Intégralement remboursé\*

### Conveen Optima

Boîtes de 15 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	220259	5701780177733
● 28	220289	5701780177740
● 30	220309	5701780177757
● 35	220359	5701780177764
● 40	220409	5701780177771

Intégralement remboursé\*

### Conveen Optima Specific

Boîtes de 15 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex  
Version Courte 4,6 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	221219	5701780177788
● 25	221259	5701780177795
● 30	221309	5701780177801
● 35	221359	5701780177818

## Pour quels patients ?

### > Hommes incontinents urinaires :

- âgés
- suite à une chirurgie (prostate, vessie)
- souffrant d'affection neurologique (blessés médullaires, syndrome de la queue de cheval, sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)
- souffrant d'un diabète compliqué

## Les bénéfices pour vos patients

- > Maîtrise des odeurs <sup>24</sup>
- > Meilleure image de soi qu'avec des protections absorbantes <sup>24</sup>
- > Respect de l'état cutané <sup>24</sup>
- > Par mesure d'hygiène, il convient de changer l'étui quotidiennement <sup>23</sup>
- > Sans latex : absence de risque d'allergie cutanée lié au latex

## 2 longueurs pour s'adapter à l'anatomie de chaque homme



## RENOUVELLEMENT D'ORDONNANCE

Boîte de 30 étuis pour délivrance

Intégralement remboursé\*

### Conveen Optima

Boîtes de 30 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	220250	5708932224963
● 28	220280	5708932851329
● 30	220300	5708932220255
● 35	220350	5708932220279
● 40	220400	5708932224987

Intégralement remboursé\*

### Conveen Optima Specific

Boîtes de 30 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex  
Version Courte 4,6 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	221210	5708932244879
● 25	221250	5708932244893
● 30	221300	5708932244916
● 35	221350	5708932244930

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Polysiloxane.


Boîte de 15 pour 1<sup>ère</sup> dispensation : disponible uniquement en ville

Vidéo d'utilisation  
Conveen Optima



# Les points forts des étuis

## L'étui pénien de dernière génération

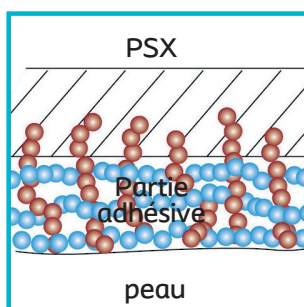

> Tenue et respect de l'épiderme


- Bonne étanchéité
- Etui en PSX\* : matériau souple et profilé

> Retrait sans résidu

- Partie adhésive visco-élastique

> Ajustement à l'anatomie

- 2 longueurs (4,6 cm et 7,8 cm) et 5 diamètres

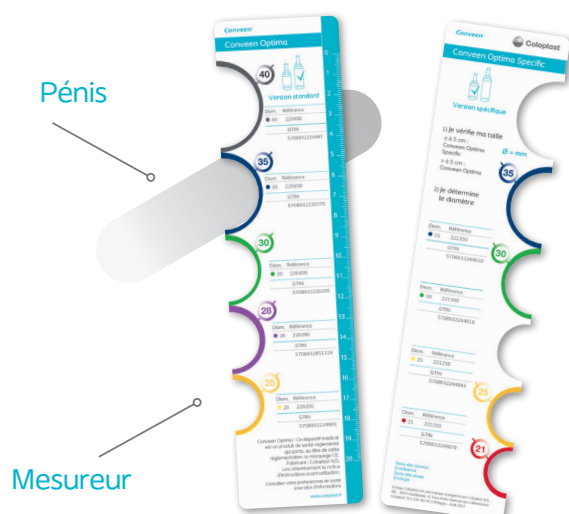

Chaque homme est unique, Conveen Optima existe donc en différents diamètres et longueurs afin d'assurer une mise en place parfaitement adaptée.

Il est nécessaire que votre patient porte la taille d'étui pénien qui lui convient.

Pour définir celle-ci, utilisez un guide de mesure qui peut être demandé gratuitement à notre service clients au : **01 56 63 18 00**

# Conveen Optima



## > Système anti-fuites

- Evite le blocage des urines grâce au bulbe anti-coudage




## > Raccordement hermétique

- Embout strié et bague pour faciliter la connexion



## > Facilité de pose

- Déroulement uniforme, même avec des gants : double languette de déroulement

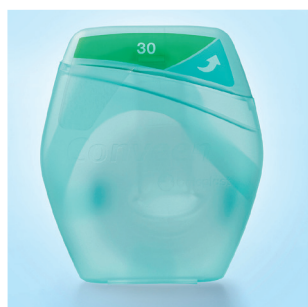

## > Discretion

- Coque individuelle (5 x 6 cm) et boîte compacte (15,8 x 13 cm) : encombrement minimal et transport facilité.

# Conveen Optima, une solution validée cliniquement

Etude randomisée Loi Huriet ayant fait l'objet d'une publication dans le British Journal of Urology International en 2011<sup>24</sup>

Auteurs : E. Chartier-Kastler, P. Ballanger, J. Petit, M. Fourmarier, S. Bart, E. Ragni-Ghazarossian, A. Ruffion, L. Le Normand et P. Costa


Comparativement aux protections absorbantes, Conveen Optima est préféré par 2 hommes sur 3 et améliore la qualité de vie

## Objectif principal

Evaluer l'impact des étuis péniens ou des protections absorbantes sur la qualité de vie (QdV) des patients hommes présentant une incontinence urinaire (IU) modérée à sévère.


### Impact des troubles urinaires sur la qualité de vie

Echelle de Qualité de Vie King's Health Questionnaire (KHQ)

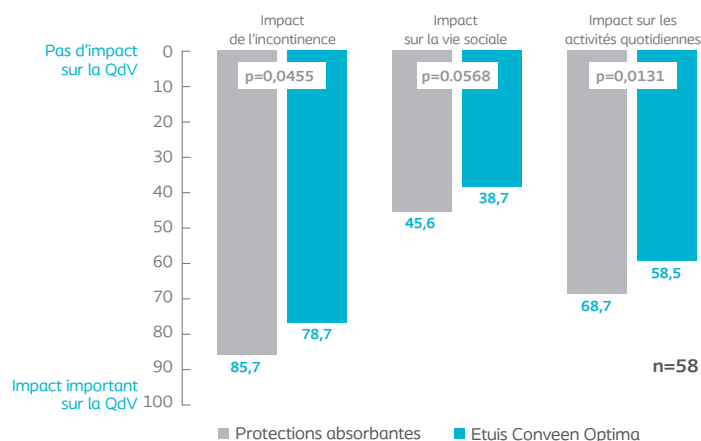

- > Troubles urinaires mieux supportés avec Conveen Optima.
- > Impact réduit de l'incontinence sur la vie sociale et les activités quotidiennes avec Conveen Optima.

### Préférence

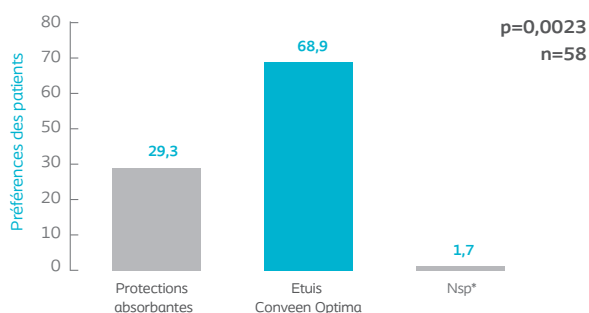

# Les étuis péniens, une solution reconnue par les sociétés savantes et possible pour la HAS

## > EAU 2012 Grade A\*\*

Lucas M.G. et al. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2012 , page 31

**“ Les étuis péniens sont à proposer en cas d'incontinence urinaire masculine sans rétention associée. Ne pas utiliser de pinces à verge pour contrôler l'incontinence. ”**

## > CODIMS AP-HP 2009

Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical.  
Recommandations codims ap-hp. décembre 2009, page 40

**“ Les étuis péniens peuvent être utilisés dans les cas d'incontinence urinaire chez l'homme après intervention chirurgicale, vessie neurologique ou chez les personnes âgées. Ils sont proposés de préférence en alternative aux protections absorbantes lorsqu'ils sont médicalement possibles. ”**

## > Guide AVC HAS 2007

Guide - affection longue durée. Accident vasculaire cérébral. Haute autorité de santé.  
Mars 2007, page 12

**“ Le port des étuis péniens peut être proposé chez des hommes souffrant d'incontinence urinaire. ”**

## > SPILF-AFU 2002

Infections urinaires nosocomiales de l'adulte. Conférence de Consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et l'Association Française d'Urologie (AFU). Novembre 2002, page 26

**“ L'étui pénien en alternative au sondage à demeure est préférable lorsqu'il est médicalement possible. ”**


EAU : European Association of Urology  
CODIMS AP-HP : Comité du Dispositif Médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
AVC HAS : Accident Vasculaire Cérébral Haute Autorité de Santé  
SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française  
AFU : Association Française d'Urologie

\*\* Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de preuve : PAR EXEMPLE, essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur, méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, analyse de décision fondée sur des études bien menées.

## L'étui pénien, une solution à privilégier pour vos patients

Les étuis péniens, des performances démontrées<sup>24</sup> en termes :

- > d'efficacité,
- > de sentiment de liberté,
- > de maîtrise des odeurs,
- > de sentiment de sécurité,
- > d'estime de soi,
- > de respect de l'état cutané
- > de discrétion,

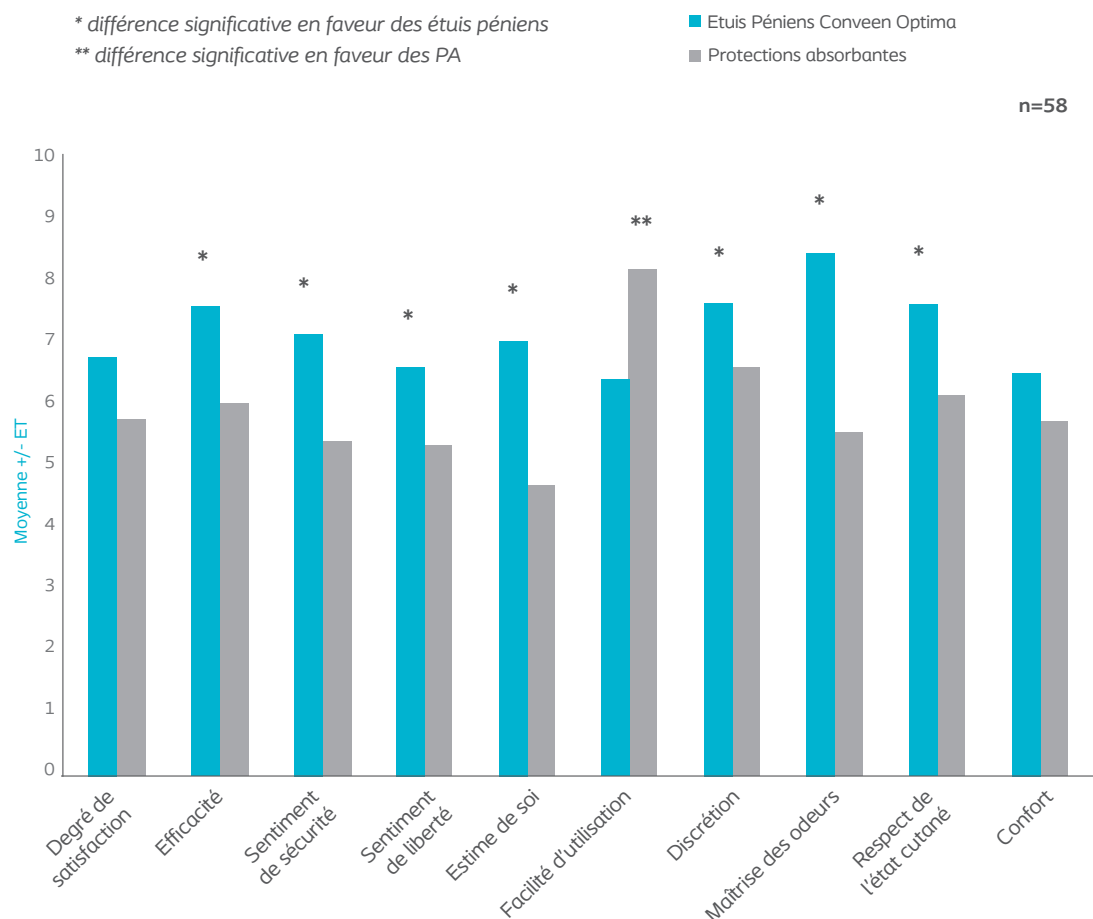

« Les étuis péniens participent à la bienveillance d'un patient. Ils permettent d'éviter un dommage lié aux soins, qui pourrait être causé par une prise en charge non adaptée de l'incontinence. »<sup>25</sup>



## Pénilex Silicone

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance  
Normal 8,1 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA5025	3600040251430
● 30	PA5030	3600040251485
○ 32	PA5032	3600040251539
● 35	PA5035	3600040251584
● 40	PA5040	3600040251638

Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai   
Normal 8,1 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA5225	3600040325292
● 30	PA5230	3600040324479
○ 32	PA5232	3600040324509
● 35	PA5235	3600040325322
● 40	PA5240	3600040324561

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance  
Spécial (étui court) 4,2 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA7025	3600040252062
● 30	PA7030	3600040252093
○ 32	PA7032	3600040252123
● 35	PA7035	3600040252154
● 40	PA7040	3600040252185

Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai   
Spécial (étui court) 4,2 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA7225	3600040325414
● 30	PA7230	3600040324776
○ 32	PA7232	3600040324806
● 35	PA7235	3600040325445
● 40	PA7240	3600040324868

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers silicone pour délivrance  
Plus (surface adhésive large) 8,1 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA6025	3600040251836
● 30	PA6030	3600040251881
○ 32	PA6032	3600040251935
● 35	PA6035	3600040251980
● 40	PA6040	3600040252031

Boîte de 15 étuis péniers silicone pour essai   
Plus (surface adhésive large) 8,1 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA6225	3600040325353
● 30	PA6230	3600040324622
○ 32	PA6232	3600040324653
● 35	PA6235	3600040325384
● 40	PA6240	3600040324714



## Conveen Security

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour délivrance  
Version Standard 8,2 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	052210	5701780758864
● 25	052250	5701780592093
● 30	052300	5701780592109
● 35	052350	5701780592116

Boîte de 15 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour essai   
Version Standard 8,2 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	052219	5701780174152
● 25	052259	5701780174169
● 30	052309	5701780174176
● 35	052359	5701780174183




## Conveen 1 pièce Latex

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers latex auto-adhésifs  
+ 6 raccords pour délivrance  
Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	052000	5701780009935
● 30	052050	5701780009928
● 35	052100	5701780009911

Boîte de 15 étuis péniers latex auto-adhésifs   
+ 6 raccords pour essai  
Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm


Diam.	Référence	GTIN
● 25	052009	5701780174121
● 30	052059	5701780174138
● 35	052109	5701780174145

## Conveen Security Specific

Intégralement remboursé\*

Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex pour délivrance  
Version Courte 5 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	220110	5701780751599
● 25	220120	5701780748131
● 30	220130	5701780748155
● 35	220140	5701780748179

Boîte de 15 étuis péniers auto-adhésif sans latex pour essai   
Version Courte 5 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	220119	5701780174190
● 25	220129	5701780174206
● 30	220139	5701780174213
● 35	220149	5701780174220



## Conveen 2 pièces Latex

Boîte de 30 étuis péniers latex avec joint de fixation + 6 raccords  
Conveen Etui pénien latex avec joint de fixation 10,5 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 20	051200	5701780008488
● 25	051250	5701780008471
● 30	051300	5701780008464
● 35	051350	5701780008457


 Boîte de 15 pour 1<sup>ère</sup> dispensation :  
disponible uniquement en ville

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Incontinence légère à modérée (<250 ml\*\*)

## Poche de jambe Conveen Active 250 ml

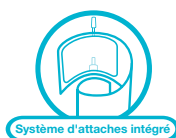

### > Système d'attaches intégré

Système d'attaches intégré



Discrétion et confort

### > Discrétion et confort

- Poche positionnée vers l'intérieur de la cuisse pour plus de discrétion
- Robinet escamotable, invisible même sous un short
- Pas d'odeur
- Poche recouverte d'un voile doux : prévient les irritations de la peau



Tubulure courte

### > Tubulure courte et ajustable



Sécurité

### > Fixation sécurisée

- Patch adhésif en silicone repositionnable vient renforcer la fixation à la cuisse.


Intégralement remboursé\*

### Poche Conveen Active

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

	Référence	GTIN
Poche 250 ml		
Tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568

[Vidéo d'utilisation](#)  
Poches Conveen Active

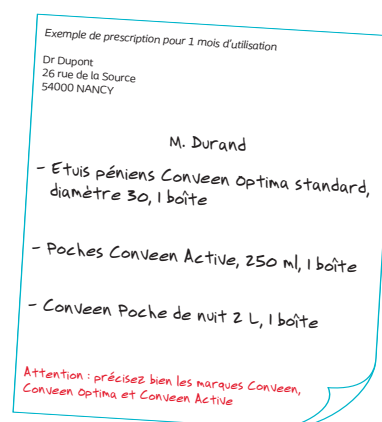

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence légère à modérée : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.



Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml\*\*)  
Sondage intermittent

## Poches de jambe Conveen 0.5 l, 0.75 l et 1.5 l



Intégralement remboursé\*

### > Pour la journée : discrétion et sécurité

- **Sécurité**  
Tubulure ajustable crénelée anti-coudage (0.5 l et 0.75 l)
- **Facilité d'utilisation**  
Robinet de vidange intuitif (à clapet)
- **Discrétion et confort**  
Forme anatomique et voile doux  
Matière souple et peu bruyante  
Discrète sous les vêtements

### Conveen poches de jambe

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227
0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241
0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289

### > Poches graduées

Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement\*\*\*

Vidéo d'utilisation  
Poches de jambe  
Conveen



## Les solutions de maintien sur la jambe



### Conveen Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches

	Référence	GTIN
90 cm ajustable	383004	5708932507233

Largeur : 3,5 cm



Largeur : 2,5 cm



### Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10

	Référence	GTIN
	050501	5708932135184

Intégralement remboursé\*

### Conveen Filets

Boîte de 2 filets

Taille	Circonférence	Référence	GTIN
● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
● Large	55-85 cm	783695	5708932507202



\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

\*\*\* Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.



Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml\*\*)  
Sondage intermittent

## Poches de nuit Conveen



### Pour la nuit :

- > **Risque de chute du patient limité**
  - Grande contenance évitant au patient de se lever la nuit
- > **Sécurité**
  - Tubulure crénelée anti-coudage de 140 cm pour la poche de 2 l
- > **Système anti-fuites**
  - Robinet de vidange sécurisée pour la poche de 2 l
  - Robinet de vidange intuitif (à clapet) pour la poche 1,5 l
  - Matériau résistant
- > **Valve anti-reflux**
  - Maîtrise du risque infectieux
- > **Poches graduées**
  - Meilleur suivi de la diurèse

 **Vidéo d'utilisation**  
Poches de nuit Conveen



**Intégralement remboursé\***

#### Conveen 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
1,5 l	050620	5708932498289
tub. lisse 90 cm ajustable		

**Intégralement remboursé\***

#### Conveen 2 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l	213460	5701780820615
tub. crénelée 140 cm ajustable		

**Intégralement remboursé\***

#### Conveen Basic 2 l - Sans boutons

Boîte de 10 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l	218030	5708932973540
tub. lisse 100 cm		

Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement\*\*\*

## Les solutions de stabilisation



#### Conveen Porte-poche de lit

Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l  
Délivré à l'unité, cond. par boîte de 10

Référence	GTIN
050700	5708932533485



#### Conveen Porte-poche de sol

Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l  
Vendu à l'unité

Référence	GTIN
380431	5708932263313

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\* Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

\*\*\* Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.

## Accessoires

### Conveen® Protact



Crème barrière qui protège la peau de l'urine et de l'incontinence fécale légère.  
Tube de 100 g

#### Conveen Protact

Délivrable à l'unité, cond par boîte de 12

Référence	GTIN
651001	5708932723442

### Lingettes pour toilette intime Brava®



Les lingettes pour toilette intime Brava sont destinées à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniens ou sondes urinaires).

#### Lingettes Brava

Sachet de 15 lingettes

Référence	GTIN
120801	5708932135146

### Conveen® Prep



Protection des peaux sensibles ou traumatisées exposées aux adhésifs, à l'urine, aux fèces, ou aux frottements.

#### Conveen Prep pour étuis péniens

Boîte de 54 compresses imprégnées

Référence	GTIN
620420	5701780768375

### Retrait d'adhésif Brava®



Le spray et la lingette pour retrait d'adhésif Brava®:

- offrent un retrait facile des adhésifs médicaux
- n'interfèrent pas avec l'adhésivité des appareillages
- à base de silicone, la solution ne pique pas (sans alcool) et sèche en quelques secondes

Intégralement remboursé\*

#### Spray pour retrait d'adhésif Brava® 50 ml

Conditionnement unitaire

Référence	GTIN
120101	5708932740463

#### Lingette pour retrait d'adhésif Brava®

Boîte 30 lingettes

Référence	GTIN
120115	5708932503693

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

## Peristeen Irrigation Transanale



*Le système d'irrigation colique rétrograde qui apporte :*

- > **Efficacité**<sup>26</sup>  
Réduction significative de la constipation 10.3 vs 13.2 (p=0.0016) et des fuites fécales 5.0 vs 7.3 (p=0.015)
- > **Réduction des infections urinaires**<sup>26</sup>  
Diminution de la survenue des infections urinaires : 15,5% à 5,9% (p=0.0052)
- > **Gain de temps**<sup>26</sup>  
Peristeen permet de réduire le temps de gestion du transit : 74,4 à 47 min (p=0.04).
- > **Amélioration de la qualité de vie**



**Peristeen est un système d'irrigation transanale :**

- Simple et facile à manipuler
- S'utilise avec de l'eau tiède
- Une irrigation doit être pratiquée en moyenne tous les 2 ou 3 jours<sup>16</sup>
- Peut être utilisé par des personnes ayant une dextérité manuelle limitée, soit de façon autonome soit avec l'aide d'une tierce personne

*"Peristeen m'a aidé à prendre le contrôle de mes problèmes de transit et à éviter que ce soit eux qui contrôlent ma vie\*"*

Utilisateur français

\* Le témoignage recueilli dans le cadre de cette brochure ne peut être assimilé à l'avis de l'ensemble de la population utilisatrice.



**Vidéo d'utilisation**  
Peristeen Irrigation  
Transanale Adulte



**Vidéo d'utilisation**  
Peristeen Irrigation  
Transanale Enfant



## La sonde rectale à ballonnet 1

- > Maintien de la sonde dans l'ampoule rectale et étanchéité lors de l'irrigation
- > Autolubrifiée, pour faciliter l'introduction

Elle est à usage unique.

## La poche à eau 2

- > Grâce à son design breveté, la poche est stable, même posée sur le sol
- > Indication du volume sur la poche pour un suivi précis de l'irrigation

Il est recommandé de la changer tous les mois soit toutes les 15 utilisations\*\*. Le bouchon doit être conservé pendant 90 utilisations\*\* et sera fourni lors de la prescription d'un nouveau système initial.

## L'unité de contrôle 3

- > Pas besoin de la gravité pour réaliser l'instillation de l'eau ni d'une tierce personne
- > Dispositif ergonomique, utilisé même par les patients ayant une dextérité manuelle réduite

Elle fait partie de l'unité centrale et doit être changée toutes les 90 utilisations (soit par exemple tous les 6 mois dans le cadre d'une irrigation 1 jour sur 2), elle est fournie lors de la prescription d'un nouveau système initial.

Intégralement remboursé\*

### Peristeen Irrigation Transanale

Sondes standard (125 mm) à usage unique

	Référence	GTIN
Système initial	291210	5708932265515
1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe		
Sondes rectales	291220	5708932265539
15 sondes rectales + 1 poche		
Tubulures	291250	5708932265591
2 tubulures avec connecteur		

### Peristeen Irrigation Transanale

Sondes courtes (115 mm) à usage unique

	Référence	GTIN
Système initial	291260	5708932456920
1 unité de contrôle + 2 sondes rectales courtes + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe		
Sondes courtes	291270	5708932456944
15 sondes rectales courtes + 1 poche		
Tubulures	291250	5708932265591
2 tubulures avec connecteur		


Les complications de l'irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales ont été identifiés suite à la pratique d'irrigation colique. Il est important d'informer le patient qu'il doit contacter immédiatement son médecin ou un service d'urgences si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s'accompagne de fièvre, d'un saignement anal prolongé.

\* Intégralement remboursé dans l'indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire. La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L'irrigation transanale pourra être effectuée tous les deux ou trois jours, à l'issue d'une phase d'initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. PERISTEEN doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'auto-sondage. L'implication d'infirmières formées à la technique ou de stomathérapeutes est recommandée pour l'apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite. Peristeen Système initial (boîte de 1) : prix limite de vente au public 116,84€TTC, remb. Séc. Soc. 116,84€. Peristeen Sondes rectales (boîte de 15) : prix limite de vente au public 193,52€TTC remb. Séc. Soc. 193,52€. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 19,95€TTC, remb. Séc. Soc. 19,95€.


\*\* Dans le cadre d'une irrigation un jour sur deux.

## Une méthode qui fonctionne<sup>28</sup>

### Images scintigraphiques du cadre colique

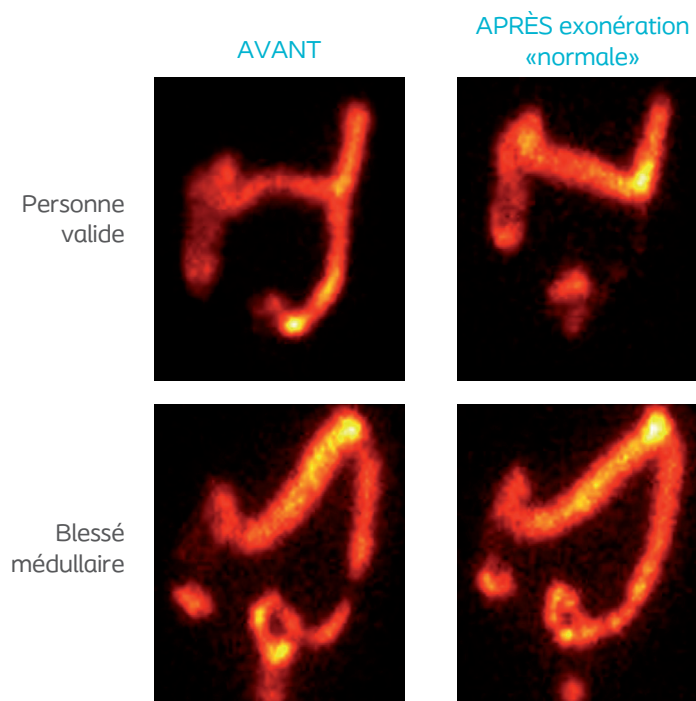

### Images scintigraphiques d'un patient neurologique atteint de troubles colorectaux avant et après recours à l'irrigation transanale

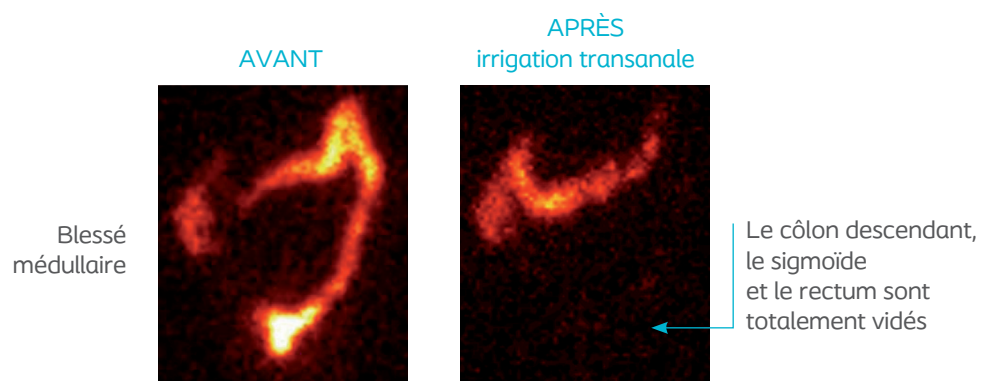


# Une efficacité prouvée cliniquement


## Etude clinique contrôlée <sup>26</sup>

- > Etude internationale\* multicentrique, comparative, contrôlée, randomisée réalisée sur 87 patients présentant une lésion médullaire.
- > Comparant : Peristeen Irrigation Transanale aux traitements médicaux conventionnels
- > Durée : 10 semaines


Diminution significative ( $p < 0.05$ ) de l'incontinence fécale et de la constipation objectivée à l'aide d'échelles validées.

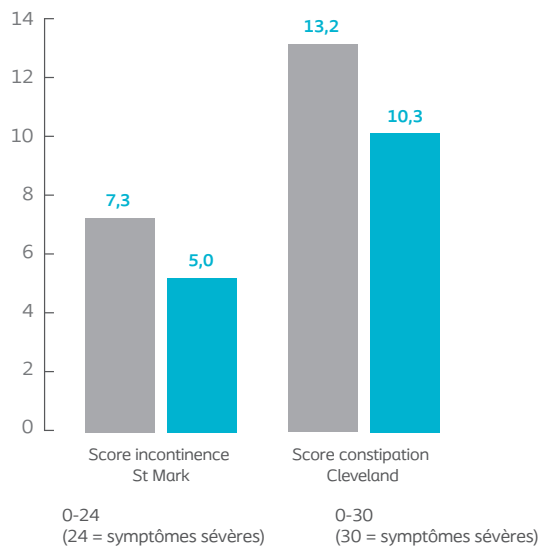


Diminution significative ( $p = 0.04$ ) du temps passé à l'exonération

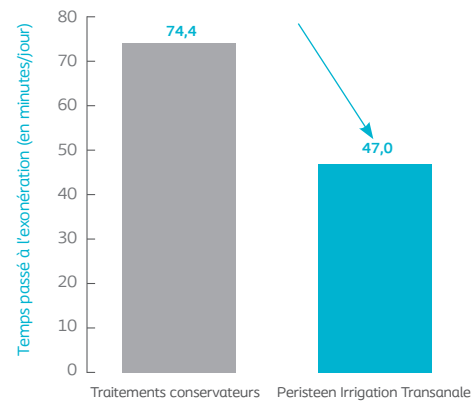

Réduction significative ( $p < 0.01$ ) des infections urinaires symptomatiques

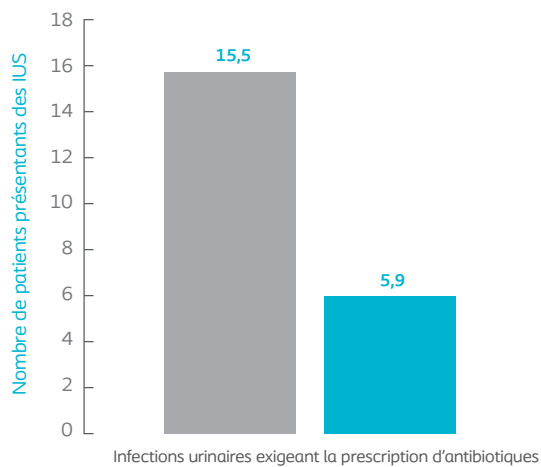

Amélioration de 50% du score de qualité de vie

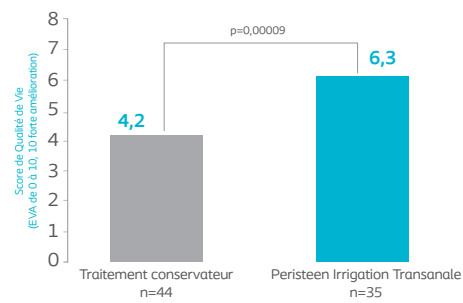

■ Traitements conservateurs      ■ Peristeen

\* Allemagne, Angleterre, Danemark, Italie et Suède

## Peristeen Obtal



### Tampon obturateur anal

Peristeen Obtal est une solution palliative indiquée chez tous les patients souffrant d'incontinence fécale d'origine neurologique (Spina bifida, lésions médullaires traumatiques ou non).

### L'incontinence fécale maîtrisée, la confiance retrouvée<sup>27</sup>

Tampon en mousse de polyuréthane comprimée par un film hydrosoluble :

- Insertion identique à celle d'un suppositoire à l'aide du lubrifiant hydrophile (ne pas utiliser de corps gras type vaseline)
- Ouverture en corolle au contact de la muqueuse anale
- Fermeture mécanique du canal anal tout en laissant passer les gaz
- Facile à retirer en tirant le cordon

### Efficacité démontrée<sup>27</sup>

Une étude clinique contrôlée, ouverte, prospective, multicentrique, a été menée chez 32 patients Spina bifida, âgés de  $16 \pm 6,6$  ans en moyenne, présentant une incontinence fécale sévère, plurihebdomadaire, et a démontré l'efficacité (score de symptômes\*\* et de qualité de vie\*\*\*), l'acceptabilité et la tolérance du tampon obturateur Peristeen Obtal.

Temps de port préconisé pour un tampon : Maximum 12 heures

Intégralement remboursé\*

#### Tampon obturateur anal Peristeen Obtal

Boîte de 20 tampons

Diam.	Référence	GTIN
● 37mm <sup>(1)</sup>	014500	5701780678117
● 45mm <sup>(1)</sup>	014510	5701780678124

<sup>(1)</sup> diamètre ouvert

 Vidéo d'utilisation  
Peristeen Obtal




\* Peristeen Obtal : Intégralement remboursé dans l'indication Incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %). Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72,68 € TTC, remb. Séc. Soc. 72,68 €.

\*\* Questionnaires de Jorge, Wexner et Schuster

\*\*\* Questionnaire de l'ASCRS

## Efficacité démontrée<sup>27</sup>

### Une continence fécale quasi complète

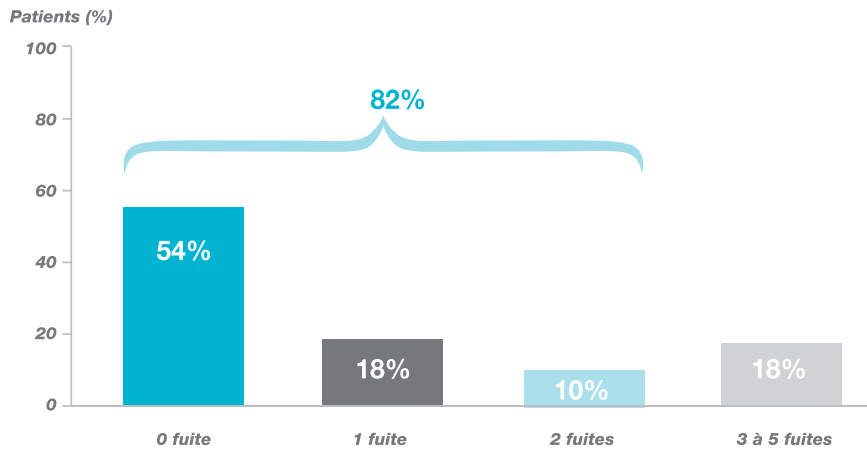


Nombre de fuites fécales sur 18 jours d'utilisation en moyenne, chez des patients qui présentaient à l'inclusion une fuite fécale par jour en moyenne.

**82% des patients ont présenté moins de 3 épisodes de fuites fécales sur les 18 jours d'utilisation de Peristeen Obtal.**

**La tolérance a été bonne dans 90,6% des cas.**

### Une bonne acceptabilité comme en témoignent la facilité de mise en place et de retrait, et l'utilisation indolore<sup>27</sup>

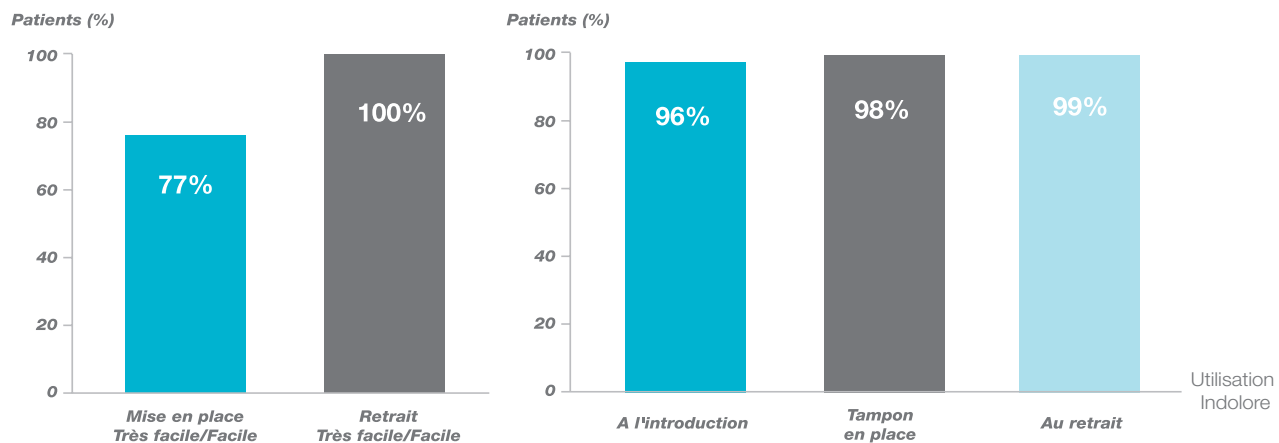

Durée de port : 8,8h en moyenne - Utilisation diurne

## Coloplast Care

### Les avantages

- **Développé pour répondre aux questions pratiques** liées à l'utilisation du matériel au cours de la première année d'utilisation de Peristeen.
- **Donne à vos patients des conseils et astuces utiles** pour intégrer les irrigations transanales dans leur vie quotidienne.

78%



des patients inscrits aux Coloplast® Care poursuivent les irrigations transanales avec Peristeen après six mois\*.

### Coloplast Care en quelques chiffres

3687

membres\*


3

conseillers  
dédiés

L'équipe Coloplast s'engage aux côtés des patients et propose un suivi technique régulier par téléphone ou les redirige vers un professionnel de santé si nécessaire.

\* Données internes Coloplast Care France : 3687 utilisateurs de Peristeen se sont inscrits au service Coloplast Care sur la période de mai 2011 à fin Août 2018. Pourcentage de patients inscrits au service Coloplast Care et poursuivant l'utilisation de Peristeen au delà de 6 mois = 78% (Donnée de mai 2011 à fin Août 2018)

## Comment cela fonctionne ?

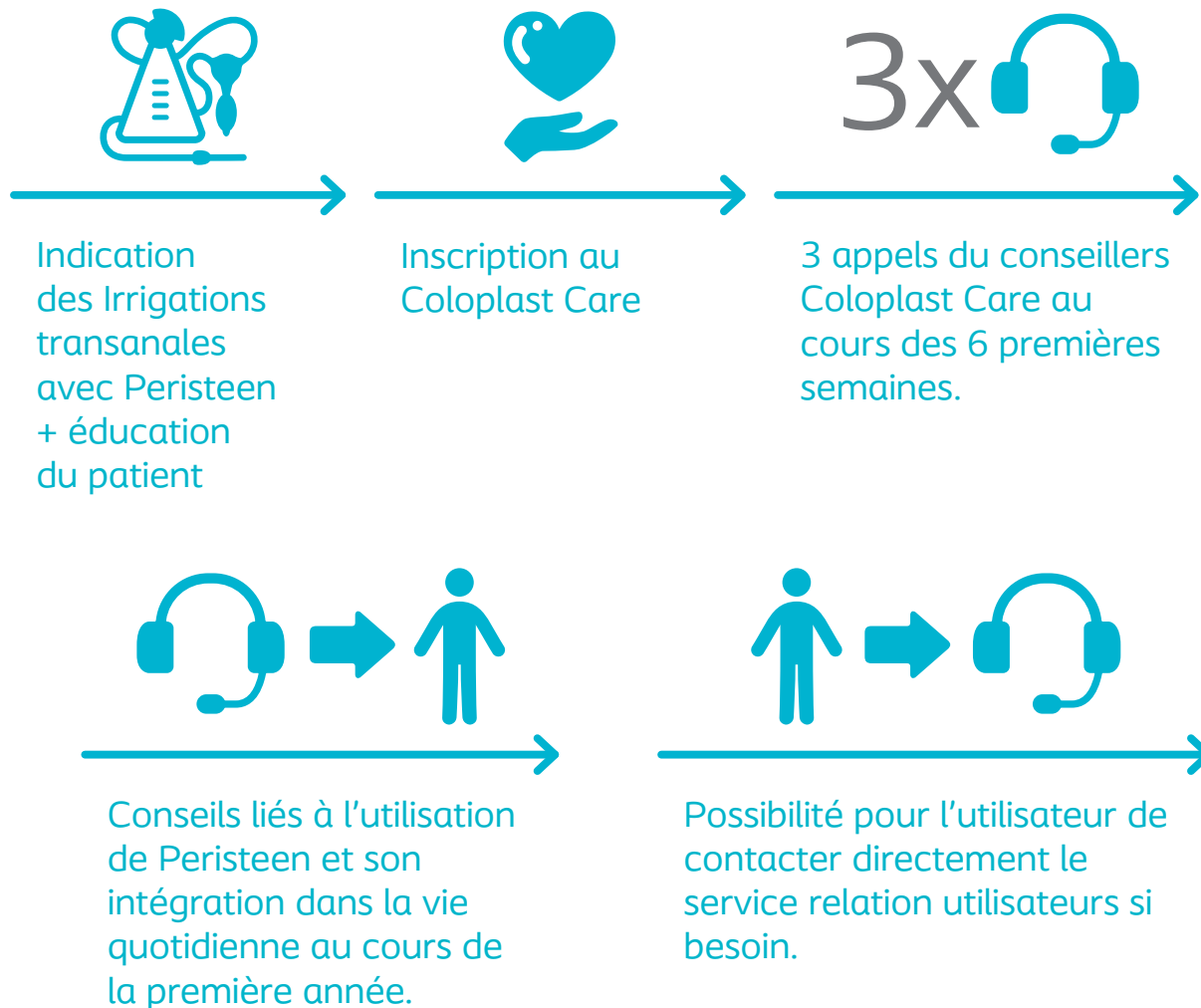

Le **Service Relation Utilisateurs** de Coloplast est joignable entre 9h-12h30 et 13h30-18h au

**0 800 01 58 68**

Service & appel  
gratuits

**Ce service proposé par Coloplast est gratuit.**

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
*Le patient peut choisir de ne plus en bénéficier à tout moment, en le précisant simplement à son interlocuteur Coloplast lors de son appel.*

# Références

1. Détermination des forces de frottements sur les sondes urinaires conformément à la norme NF T 54-112, rapport numéro H060843, août 2007, test réalisé par un laboratoire indépendant. SpeediCath vs Actreen Glys et Lofric Primo. SpeediCath a généré des forces de frottement d'en moyenne 0,16 N (ET= 0,02) vs forces de frottement moyennes avec Actreen Glys 0,83 N(ET=0,05) et 0,25 N (ET=0,04) pour Lofric Primo.
2. Stensballe J et al. Eur Urol. 2005 Dec; 48(6): 978-83. Etude comparative, randomisée, en cross over, en simple aveugle. SpeediCath vs LoFric vs InCare Advance Plus. 40 hommes volontaires sains. Critère principal : Frictions sur l'urètre (Newton) mesurées par une procédure automatisée. Résultats : Frictions exercées sur l'urètre plus faibles avec SpeediCath (0.14N±0.003 vs 0.28±0.13 avec LoFric et 0.20±0.05 avec Incare Advance Plus ; p<0,05). Tolérance urétrale améliorée : 65% des hommes ont noté Aucune douleur lors du sondage avec SpeediCath vs 43% avec LoFric et 25% avec InCare Advance Plus (p=0,006).
3. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005;48:991-95. Etude comparative, randomisée, en 2 groupes parallèles. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 123 patients blessés médullaires suivis sur 12 mois. Critère principal : infection urinaire symptomatique. Résultats : réduction significative des infections urinaires avec SpeediCath (Aucune infection : 36% des patients vs 18% grpe sondes sèches ; p=0,02). 57/123 patients ont terminé l'étude. Principales raisons d'arrêt : reprise d'une fonction urinaire normale ou changement de mode mictionnel.
4. Chartier-Kastler E et al. Spinal Cord 2011, Jul;49(7):817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over. SpeediCath Compact Homme (SCCH) vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : Très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen : 1.59±2.24 avec SCCH vs 1.94±2.28. 95% IC: -1.49 à 0.80). Aucune douleur rapportée avec les deux sondes par 80% des patients (p=0.6). SCCH significativement plus facile à insérer (93.3% vs 73.3% ; p=0.002) et à contrôler (90% vs 60.6% ; p=0.002), plus discrète (90% vs 23%, p<0.0001) et plus facile à transporter, à stocker et à jeter (p<0.0001). 70% des patients ont préféré SpeediCath Compact Homme (p=0.03). SpeediCath Compact Homme a permis un sondage "no-touch" dans 93% des cas (vs 63% pour SpeediCath). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
5. Leriche A et al. Rapport clinique avril 2005. Etude clinique comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath Compact Femme vs les sondes standards. 50 patientes. Critère principal : Préférence patient. Résultats : 76% des patientes ont préféré SC Compact (p<0.0001) à leur sonde, notamment pour sa facilité d'introduction (66%), facilité de retrait (46%) et sa discrétion (98%). Tolérance urétrale significativement améliorée avec SpeediCath Compact : 2 fois moins d'événements indésirables (douleurs, brûlures, saignements à l'insertion de la sonde).
6. Bagi P, et al. Urol Int 2011; 86: 179-84. Étude comparative de non-infériorité, randomisée, en crossover et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 26 hommes sains. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen: 2.25±1.5 avec Compact vs 2.52±1.8. 95% IC: -0.73 à 0.19). Même profil de tolérance urétrale avec les deux tsondes. SC Compact est plus facile à insérer (p=0.0001) et permet un hétérosondage no-touch dans 97.8% des cas (p<0.05). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
7. Recommandations EAUN (European Association of Urology Nurses) 2013. Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. Intermittent Catheterisation in adults. Page 26 : "Les sondes compactes permettent le respect de la technique non-touch." Page 29 : «Oeils pouvant êtres polis pour plus de confort lors du sondage»
8. Domurath B et al. Spinal Cord 2011; 49(7): 817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Les résultats montrent que la sonde SpeediCath Compact Homme est efficace pour vider la vessie (volume résiduel d'urine : 12.4±15.7 ml). Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane : 2,06 ml. 95% IC: -1.9, +7.7). 61% des hommes ont préféré SC Compact.
9. Biering-Sørensen et al. Scand J Urol Nephrol 2007; 41: 341-5. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Femme vs sondes standards. 24 femmes avec vessie neurogène. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane: -12,5 ml. p=0.08). 96% des femmes étaient très satisfaites avec SC Compact.
10. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude comparative, randomisée en cross over. SpeediCath Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 15 femmes). Critère Principal : Qualité de vie, à l'aide du questionnaire ISC-Q (0: le Pire à 100 : le Meilleur). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact (76.8 vs 59.8 avec sondes standards ; p<0.001), notamment sur les domaines Commodité, Discrétion et Facilité d'utilisation, aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que chez les femmes (+18,2). 63% des patients ont préféré SC Compact.

11. Enquête de satisfaction avec l'utilisation de SpeediCath Control réalisée auprès de 17 patients, mars 2009. Résultats : 70% des participants ont souhaité continuer à utiliser SpeediCath Control. 100% des participants l'ont noté Facile/Très facile à utiliser et 88% Facile/Très facile à contrôler durant le sondage; un sondage no-touch possible pour 69% des utilisateurs.
12. Pascoe G, et al. Br J Nurs 2001;10 (5):325–29. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric. 27 patients. Critère principal : Préférence. 78% des utilisateurs ont préféré SpeediCath à Lofric, notamment en termes de praticité (88%) et vitesse du sondage (68%) ( $p<0.0015$ ).
13. Van Kuppevelt et al. ISCoS, 2004 Septembre, Athens, Greece. Page : 216. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric vs EasiCath. 72 patients inclus. Critère principal : facilité d'utilisation sur une échelle de 0 (très difficile) à 10 (très facile). Résultats : SpeediCath a été jugée significativement plus facile à utiliser que les sondes Lofric et EasiCath (7.8 vs 6.9 et 6.7 respectivement ;  $p=0.003$ ).
14. Cardenas D et al. PM&R May 2011;3:408-17. Étude randomisée, en 2 groupes parallèles, avec un suivi de 6 mois. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 224 patients blessés médullaires récents (<3 mois) sous autosondages depuis < 10 jours. Critère principal : délai de survenue des infections urinaires symptomatiques (IUS). Résultats : L'apparition d'une IUS traitée par antibiotiques est significativement retardée dans le groupe SpeediCath ( $p=0,038$ ), avec une réduction de 33% du risque quotidien de développer une IUS (odds-ratio=0.666, IC 95% : 0.453-0.978) et une réduction de 21 % du taux d'IUS nosocomiale ( $p<0,05$ ). Satisfaction globale des patients supérieure dans le groupe SpeediCath ( $p=0,007$ ).
15. Leriche et al. Prog Urol. 2006 Jun;16(3):347-51. 29 patients sur 31 inclus. Etude comparative, prospective, multicentrique randomisée, en cross-over et en ouvert. SpeediCath Set vs Actreen Set. L'analyse a porté sur 29 hommes pratiquant l'autosondage. SpeediCath Set a démontré sa supériorité contre Actreen Set en termes de facilité d'introduction ( $p=0,0065$ ), facilité de vidange ( $p=0,0157$ ), qualité du lubrifiant ( $p<0,0001$ ), tolérance urétrale et performance du sondage au lit ( $p=0,0157$ ).
16. Enquête internationale de satisfaction avec l'utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 595 hommes et 383 femmes. 85% des hommes et 92% des femmes ont trouvé SpeediCath Compact Set facile à utiliser. 100% des professionnels de santé trouvent SpeediCath Compact Set facile à utiliser et 93% trouvent qu'il est plus facile à utiliser que les autres sets du marché. 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est plus facile de former des patients avec SpeediCath Compact Set.
17. Enquête réalisée en juin 2012 auprès de 30 femmes pratiquant l'autosondage. Discrétion notée 6.7, féminine et esthétique notées 6.6 et facile à utiliser notée 5.9 sur une échelle allant de 1 (Pas du tout) à 7 (Extrêmement)
18. Usability study report. Enquête conduite en 2013 auprès de 18 participantes, dont 6 avec une dextérité manuelle réduite. 17/18 participantes ont noté Très Bon/Bon la facilité d'utilisation (ouverture, manipulation, fermeture), l'usage intuitif et la technique « no-touch » (sur une échelle verbale en 5 points). 15/18 ont noté Très Facile/Facile la connexion à une poche à urine.
19. Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test "Fermeture sécurisée après utilisation" consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l'agiter et la placer dans un filtre charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée.
20. Lubrification hydrophile brevetée
21. Cindolo L et al. Urol Int 2004;73:19–22. Etude randomisée, en 2 groupes parallèles, en simple aveugle à l'insu du patient. EasiCath Luer Lock vs sondes traditionnelles enduites de gel de lidocaïne ou néomycine ou fluocinolone. 100 patients recevant une immuno ou chimiothérapie intravésicale pour cancer de la vessie. Critère principal : infection urinaire définie par bactériurie >105 UFC/ml avec leucocyturie sur l'ECBU réalisé 2 jours après chaque sondage. Résultat : réduction significative des infections urinaires sous EasiCath (détectée pour 7,4 % (34/470) des sondages avec les sondes traditionnelles contre 3,5 % (17/482) des sondages avec EasiCath ;  $p<0,01$ ). L'inconfort urétral lors du sondage significativement réduit avec EasiCath ( $1.3\pm 0.1$  vs  $2.1\pm 0.2$  sur une échelle de 0 (aucun inconfort) à 5 (inconfort maximal) ;  $p<0,001$ ). Aucune orchite-épididymite ou hématurie observée.
22. Pariente JL, Conort P. Biomatériaux utilisés au contact de la voie excrétrice pour le drainage des urines : Sondes et Endoprothèses urétrales. Progrès en Urologie 2005; 15 897-906. Le Latex est toxique par lui-même et les additifs chimiques toxiques, associés aux cathéters au cours des processus de fabrication, sont relargables et extractibles, malgré une enduction de la sonde par un autre matériau. (page 894).
23. Recommandations CODIMS AP-HP, Dec 2009. Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Pages 26,31,43,51.

24. Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude clinique comparative, randomisée, évaluant l'impact sur la qualité de vie de l'utilisation des étuis péniens Conveen Optima vs les protections absorbantes chez 58 hommes incontinents urinaires. Les participants ont attribué en moyenne aux étuis péniens Conveen Optima une note significativement supérieure pour la maîtrise des odeurs ( $p < 0,001$ ) et la discrétion ( $p = 0,03$ ). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniens Conveen Optima + poches Conveen pour : efficacité ( $p = 0,002$ ), sentiment de sécurité ( $p=0,006$ ), sentiment de liberté ( $p=0,04$ ), image de soi ( $p<0,001$ ), maîtrise des odeurs ( $p<0,001$ ), discrétion ( $p=0,03$ ) et respect de l'état cutané ( $p = 0,003$ ). Respect de l'état cutané noté 7,6 et facilité d'utilisation notée 6,4 sur une échelle de 0 (très mauvaise) à 10 (très bon).
25. Le déploiement de la bientraitance. Guide à destination des professionnels en établissements de santé et EHPAD. Groupe bientraitance FORAP-HAS. Mai 2012. «Mettre tout en oeuvre pour respecter l'intégrité physique et psychique, la dignité et l'intimité de l'utilisateur».
26. Christensen P et al. Etude randomisée, contrôlée, irrigations transanales vs le traitement conservateur du dysfonctionnement intestinal chez les blessés médullaires. Gastroenterology 2006;131:738-47. 87 patients Critère Principal : évolution des symptômes de constipation et d'incontinence fécale. Résultats : Les patients traités avec l'irrigation transanale avaient moins de plaintes de constipation et d'incontinence fécale, avec une amélioration de leur qualité de vie, et un temps réduit passé sur les procédures de gestion de l'intestin. Score constipation Cleveland (0 à 30 ; 30 sévère) 10,3 vs 13,2 ( $p=0,0016$ ) ; score incontinence St-Mark (0-24 ; 24 sévère) 5,0 vs 7,3 ( $p=0,015$ ). Temps passé sur les toilettes noté 30,8±19,4 vs 49,1±48,2 ( $p=0,094$ ).
27. Lehur P.A. et al. Correspondances en pelvi-périnéologie 2004 ; IV n°3 : 20-26. Etude contrôlée, ouverte, prospective, multicentrique. 32 patients spina bifida avec incontinence fécale sévère pluri-hebdomadaire. Critères principaux : scores de symptômes. Résultats : 82% des patients avec continence anale quasi complète ( $\leq 2$  fuites de selles) sur les 18 jours d'utilisation de Peristeen Obtal. 15 patients (56,6%) n'ont eu aucune fuite fécale. Après 18 jours d'utilisation, les patients ont un sentiment de sécurité 80% et un sentiment de liberté 53%. La tolérance a été bonne dans 90,6% des cas.
28. Christensen P et al. Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. Dis Colon Rectum 2003; 46: 68-76.
29. Etude CP268, 2016. PARTIE 1 : Critère principal : évaluation de la facilité d'insertion des sondes SpeediCath Flex. Participants : 58 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes droites avec gaine. Résultats : 100% des patients ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et 89% des participants ont souhaité poursuivre l'utilisation de SpeediCath Flex. PARTIE 2 : Critère principal : évaluation de la facilité d'insertion des sondes SpeediCath Flex dans les anatomies difficiles. Participants : 95 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes béquillées (Tiemann), principalement pour grosse prostate (36%), rétrécissement urétral (26%) ou fausse route (12%). Résultats : SpeediCath Flex a été évaluée auprès de 95 utilisateurs de sondes béquillées, 86% d'entre eux ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et sur ces 87 patients qui l'ont utilisé pendant une semaine, 62% ont jugé Facile/Très Facile la navigation de la sonde dans l'urètre et 71% l'ont noté « douce à l'insertion ». Les tests ont été réalisés sur SpeediCath Flex 1 dont la sonde reste identique à SpeediCath Flex 2.
30. EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins : Sondage urétral. Section 2, Sondage intermittent ; Page 17 : «La sonde urétrale idéale a une extrémité flexible qui permet le passage dans presque tous les urètres, quelle que soit leur configuration ou leur degré d'obstruction. Certaines sondes disposent d'extrémités spécialement arrondies destinées à prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre. Elles peuvent en général être utilisées chez tous les patients.»
31. Flex II: Verification Laboratory Report - DIO 4.5 touchable and dry sleeve, Doc. No: VV-0232486. Objectif : valider que la gaine est sèche et hermétique (test de bulle). 34 produits testés. Succès : 100%.



L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.

Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public. Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies. Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant de troubles physiques intimes.

***Le service clients Coloplast est une équipe de professionnels à votre écoute pour toute question sur nos produits, commandes et envoi d'échantillons.***  
***Tél. 01 56 63 18 00 de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h***

Folysil, tampon Peristeen Obtal : dispositifs médicaux de classe IIb, CE (2460).

Conveen Optima, Peristeen système d'irrigation transanale, Lingettes intimes Brava, Spray et lingette de retrait d'adhésif Brava, Conveen Prep, poche SpeediCath Compact, poches à urines (hors Triform) et accessoires : dispositifs médicaux de classe I, marqués CE. SpeediCath, EasiCath, Conveen Triform : dispositifs médicaux de classe I, stériles, CE (2460).

Conveen Protact est un produit cosmétique

Fabricant : Coloplast A/S.

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

[www.autoreeducation-perineale.fr](http://www.autoreeducation-perineale.fr)

Un guide en ligne pour aider vos patients à pratiquer leurs exercices d'autorééducation périnéale. Un test leur permettra de suivre leurs progrès.

Coloplast partenaire du  
DIU d'Infirmière experte en Urologie



Association  
Française  
d'Urologie  
[www.urofrance.org](http://www.urofrance.org)



Association  
Française des  
Infirmières et  
Infirmiers en  
Urologie

Document réservé à l'usage de professionnels de santé.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée  
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France  
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362  
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 247Z - Septembre 2021 - PS

