

# Changez votre patient 1 fois par jour avec l'étui pénien Conveen® Optima\*\*

VU À LA TÉLÉ

## ARBRE DÉCISIONNEL


### 1) Choix de l'étui pénien Conveen Optima

**A/ Diamètre :**

Mesurer à l'endroit le plus large du pénis.

**B/ Longueur :**

Pénis ≤ 5 cm → Conveen Optima Specific  
Pénis > 5 cm → Conveen Optima (version standard)

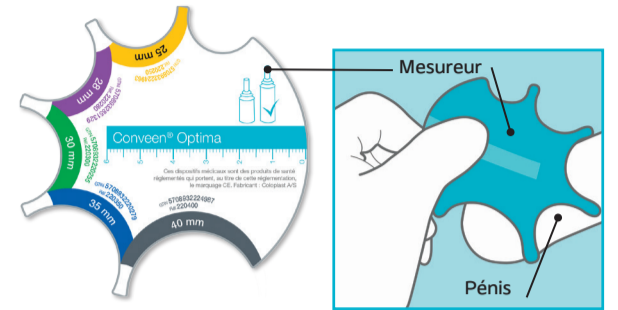

Version	Longueur		● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
<b>Conveen Optima*</b> Longueur de l'étui 7,8 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 4 cm	Réf		220250	220280	220300	220350	220400
<b>Conveen Optima Specific*</b> Longueur de l'étui 4,6 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 3,5 cm	Réf	221210	221250		221300	221350	

### 2) Choix de la poche à urine Conveen

Poches de jour			Poches de nuit		
<b>Incontinence légère à modérée*** (&lt;250 ml)</b> 1/2 VERRE  <b>Conveen Active*</b>  Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré Référence Conveen Active 255020 250 ml tub. 7 cm ajustable	<b>Incontinence modérée*** (250 à 750 ml)</b> 1 VERRE  <b>Conveen 0,5 l' ou 0,75 l'</b>  Boîte de 30 poches graduées Référence Conveen 0,5 l 051600 tub. crénelée 30 cm ajustable Conveen 0,5 l 051610 tub. crénelée 50 cm ajustable Conveen 0,75 l 051670 tub. crénelée 50 cm ajustable	<b>Incontinence sévère*** (&gt; 750 ml) ou patient mobilité réduite</b> 3 VERRES  <b>Conveen 1,5 l'</b>  Boîte de 30 poches graduées Référence Conveen 1,5 l 050620 tub. lisse 90 cm ajustable	<b>Pour limiter le nombre de vidange</b>  <b>PERSONNE ALITÉE</b> OU <b>NUIT</b>	<b>Conveen 2 l'</b>  Boîte de 30 poches graduées Référence Conveen 2 l 213460 tub. crénelée 140 cm ajustable	<b>Conveen 1,5 l'</b>  Boîte de 30 poches graduées Référence Conveen 1,5 l 050620 tub. lisse 90 cm ajustable
<b>3) Choix des solutions de maintien ou de stabilisation de la poche</b>			<b>Solutions de stabilisation des poches de nuit</b>		
<b>Solutions de maintien des poches de jour</b> <b>Conveen Attaches de jambe*</b>  Vendues à la paire, conditionnées par boîte de 10 Référence 050501 <b>Conveen Filets*</b>  Boîte de 2 filets Taille / Circonférence      Référence ● Standard / 40-60 cm      783681 ● Medium / 45-65 cm      783687 ● Large / 55-85 cm      783695			<b>Conveen Porte-poche de lit</b>  Vendu à l'unité, conditionnés par boîte de 10 Référence 050700 <b>Conveen Porte-poche de sol</b>  Vendu à l'unité Référence 380431		



Une question ? Besoin d'aide ? connectez-vous sur : [pro.coloplast.fr](http://pro.coloplast.fr)

Votre représentant Coloplast se tient à votre disposition :

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

\*\*CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009: Page 43.

\*\*\* Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4<sup>th</sup> International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544. paragraphe 4.

Produits Conveen : dispositifs médicaux de classe I, marqués CE . Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1582E - Mars 2017- PS

