

Exemple de Prescription

(Pour 1 mois d'utilisation)

Dr Dupont
26 rue de la Source
54000 NANCY

16 novembre 2018

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
M. Durand, 55 ans

- Conveen Optima : étuis péniens,
1 boîte RÉF. : 220300
- Conveen Poche de Jambe : 0,75 L,
1 boîte RÉF. : 051670
- Conveen Attaches de jambe :
1 boîte RÉF. : 050501
- Conveen Poche de nuit 2 L :
1 boîte RÉF. : 213460

À renouveler 6 mois
Non substituable



Votre délégué Coloplast :



Conseils d'utilisation de l'étui pénien en 3 étapes

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

1. Préparation

- S'assurer du bon diamètre de l'étui en vous aidant, par exemple, d'une réglette de mesure Coloplast.
- Le diamètre du pénis doit être mesuré à l'endroit le plus large. Si la taille du pénis est entre 2 tailles, il faudra prendre la plus grande.
- Dégagez la base du pénis en coupant les poils à l'aide de ciseaux. L'utilisation d'un rasoir est fortement déconseillée car elle pourrait provoquer des micro-lésions au niveau de la peau.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon non gras.
- Effectuez une toilette intime à l'eau et au savon doux (à pH neutre). Ne pas utiliser de savon gras ou de crème, ce qui diminuerait l'efficacité de l'adhésif.
- Séchez bien le pénis avant de poser l'étui pénien.

2. Mise en place



1 Déroulez légèrement l'étui avant de le positionner sur l'extrémité du pénis, en laissant un espace de 1 à 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui afin de ne pas gêner l'écoulement des urines.



2 Maintenez l'étui pénien en place à l'aide d'une main, et utilisez l'autre pour le dérouler grâce à la double languette. L'étui pénien doit être déroulé doucement et sans à coups.



3 Après l'avoir complètement déroulé, exercez 2 à 3 pressions sur l'étui pénien afin de permettre une bonne adhésion et une bonne étanchéité.



4 Avant de connecter la poche à l'étui pénien : vérifiez que le robinet de vidange soit en position fermée et froissez la poche en vue de faciliter son remplissage. Connectez la poche de recueil d'urine à l'étui pénien en enfonçant le plus loin possible le connecteur de la poche dans l'embout de l'étui pénien.

3. Retrait et renouvellement

- L'étui pénien et la poche **vidée** peuvent être jetés à la poubelle avec les déchets ménagers.
- La petite coque conditionnant l'étui est recyclable comme les bouchons de bouteilles en plastique.
- Par mesure d'hygiène, il convient de **changer l'étui et sa poche de recueil une fois par 24h****.

Incontinence urinaire masculine
Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.
Dispositifs médicaux de classe I. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.
Documentation réservée aux professionnels de santé

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie

Coloplast

pro.coloplast.com Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362
RCS Bobigny - Réf. 1917E - Novembre 2018 - PS

Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

Incontinence urinaire masculine

Conveen®
est préféré
aux protections
absorbantes par
2 hommes sur 3*




Conveen®

Conveen® : Une solution fiable et discrète*

Le système collecteur Conveen

La solution Conveen pour les fuites urinaires masculines se compose d'un étui pénien et d'une poche de recueil des urines.

Afin de s'adapter à chaque morphologie et degré de sévérité de l'incontinence, nous proposons un large choix d'étuis (longueur et diamètre) et de contenance de poches (250ml à 2L)

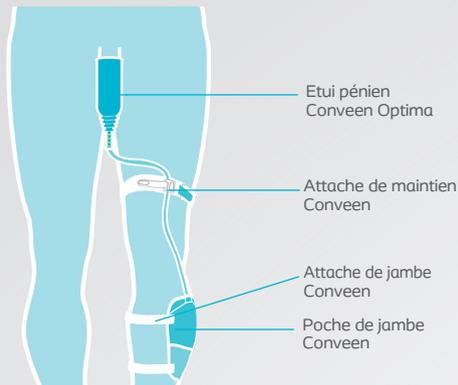

L'incontinence urinaire est souvent liée :

- à l'avancée en âge
- à une chirurgie (prostate, vessie)
- à une affection neurologique (blessés médullaires, syndrome de la queue de cheval, sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)
- au diabète compliqué...

Les étuis péniens présentent de nombreux avantages :



• Une seule pose par jour**



• Risque de chutes limité (poches de grande capacité évitant au patient de se lever)

• Maîtrise des odeurs*

• Respect de l'état cutané*

• Contrôle des urines



* Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etuis péniens Conveen Optima vs les protections absorbantes. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal : Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : « limitation des activités quotidiennes » (p=0,01) et « impact de l'incontinence » (p=0,045). La majorité des patients (69%) ont préféré les étuis péniens à leurs protections absorbantes habituelles (p<0,002). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniens Conveen Optima pour : efficacité, sentiment de sécurité, maîtrise des odeurs, respect de l'état cutané, sentiment de liberté et discrétion (p<0,05)

** CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009: Page 43.

*** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

1. Choix de l'étui pénien

Définir la longueur et le diamètre à l'aide de la règle de mesure



N'hésitez pas à demander votre règle à votre délégué Coloplast.

Version	Longueur	● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima ≥ 5 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex		Réf GTIN	220250 570 4963	220280 57089322481329	220300 5708932220255	220350 5708932220279	220400 5708932224987
Conveen Optima Specific Verge < 5 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex		Réf GTIN	221210 5708932244879	221250 5708932244893	221300 5708932244916	221350 5708932244930	

2. Choix de la poche

Définir le degré d'incontinence



Légère à modérée*** (<250 ml) ou fuites urinaires



Conveen Active

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

	Référence	GTIN
250 ml tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568

Modérée*** (250 à 750 ml)



Conveen 0,5 l ou 0,75 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227
0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241
0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265

Sévère*** (>750 ml) ou patient à mobilité réduite



Conveen 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289



Poche de nuit Conveen 2 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615



Pour les poches de jambe 0,5L, 0,75L et 1,5L : penser aux attaches de jambes et de maintien



Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, conditionné par boîte de 10

Réf.	GTIN
050501	5701780581431



Conveen Attache de maintien

Boîte de 2 attaches pour maintenir la tubulure de la poche ou la sonde à demeure

Réf.	GTIN
383004	5708932507233