

La solution Conveen® Optima**

ARBRE DÉCISIONNEL

1) Choix de l'étui pénien Conveen® Optima

A/ Diamètre :

Mesurer à l'endroit le plus large du pénis.

B/ Longueur :

Pénis ≤ 5 cm → Conveen® Optima Specific

Pénis > 5 cm → Conveen® Optima (version standard)



Version	Longueur	Réf	Diamètre					
			● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen® Optima* Longueur de l'étui 7,8 cm Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex	 Longueur de l'adhésif 4 cm	Réf		220250	220280	220300	220350	220400
Conveen® Optima Specific* Longueur de l'étui 4,6 cm Boîte de 30 étuis péniers auto-adhésifs sans latex	 Longueur de l'adhésif 3,5 cm	Réf	221210	221250		221300	221350	

2) Choix de la poche à urine Conveen®

Poches de jour

Incontinence légère à modérée*** (<250 ml)

1/2 VERRE

Conveen® Active*

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

Réf.	
Conveen Active	255020
250 ml tub. 7 cm ajustable	

Incontinence modérée*** (250 à 750 ml)

1 VERRE

Conveen® 0,5 l* ou 0,75 l*

Boîte de 30 poches graduées

Réf.	
Conveen 0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600
Conveen 0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610
Conveen 0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670

Incontinence sévère*** (> 750 ml) ou patient mobilité réduite

3 VERRES

Conveen® 1,5 l*

Boîte de 30 poches graduées

Réf.	
Conveen 1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620

Solutions de maintien des poches de jour

Conveen® Attaches de jambe*

Vendues à la paire, conditionnées par boîte de 10

Réf.	
	050501

Conveen® Filets*

Boîte de 2 filets

Taille / Circonférence	Réf.
● Standard / 40-60 cm	783681
● Medium / 45-65 cm	783687
● Large / 55-85 cm	783695

Poches de nuit

Pour limiter le nombre de vidange

PERSONNE ALITÉE **OU** NUIT

Conveen® 2 l*

Boîte de 30 poches graduées

Réf.	
Conveen 2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460

Conveen® 1,5 l*

Boîte de 30 poches graduées

Réf.	
Conveen 1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620

+

Solutions de stabilisation des poches de nuit

Conveen® Porte-poche de lit

Conditionnés par boîte de 10

Réf.	
	050700

Conveen® Porte-poche de sol

Vendu à l'unité

Réf.	
	380431

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. La prescription des étuis péniers est réalisée par un médecin un infirmier ou par un kinésithérapeute. L'étui pénien peut être renouvelé quotidiennement ou plus fréquemment en cas de décollement du dispositif. Lors de la 1ère dispensation des étuis péniers, seule une boîte de 1 ou une boîte de 15 unités peut être délivrée.

** CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009: Page 43.

*** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al.

Conveen, Conveen Optima, Conveen Active : Dispositifs médicaux destinés à l'incontinence urinaire masculine, de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Filets : Dispositif médical destiné à la fixation de poches à urine de jambe portées par les personnes disposant de sonde urinaires temporaires ou permanentes et d'étuis péniers, de classe I, non stérile, marqué CE.

Fabricant : Tytex A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.