

Sondage à demeure

Découvrez nos conseils pour une meilleure utilisation des sondes à demeure et un retour à domicile optimisé

Cette fiche comporte des conseils utiles pour le bon usage du matériel par vos patients dans leur vie quotidienne.

Le changement de sonde est un geste simple qui doit être **réalisé par un professionnel de santé**.


Durée de port maximale recommandée¹ :

- 14 jours pour les sondes à demeure en latex (enduites ou non de silicone),
- 4 semaines pour les sondes à demeure en 100% silicone.

Quelques règles de base :

- 1 poche stérile Conveen® Triform pour une durée de 7 jours
- 1 poche non stérile de 1,5 L ou 2 L pour la nuit et à renouveler chaque nuit.
- La poche stérile doit être raccordée à la sonde directement et le patient ne doit pas y toucher.
- Ne pas couper les tubulures des poches stériles.
- Pour apporter confort et sécurité à votre patient, proposez-lui les attaches de jambes et de maintien.

Pour plus de contenance la nuit : connexion d'une poche de nuit à la poche de jambe stérile^{1,2}

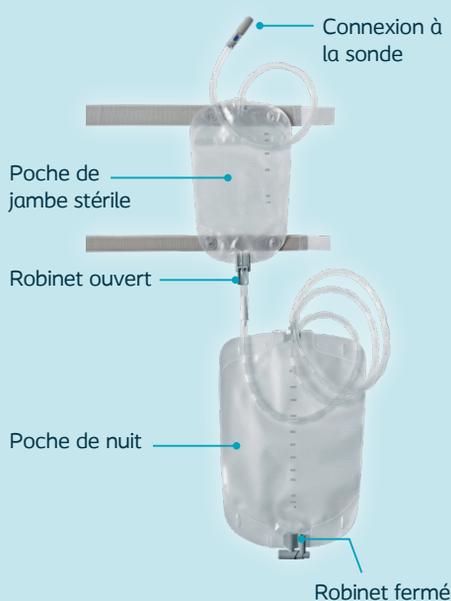

- La poche de nuit doit être changée à chaque utilisation²

Poches de jambe stériles Conveen avec site de prélèvement



Poches graduées - À usage unique

Intégralement remboursé*

Poches de jambe stériles Conveen Triform non ajustables et pré-montées

Boîte de 10 poches (emballage individuel)

	Référence	GTIN
0,5 l tub. crénelée 50 cm	210190	5708932539425
1,5 l tub. lisse 90 cm	050630	5701780009645



Largeur : 3,5 cm



Largeur : 2,5 cm



Intégralement remboursé*

Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10

	Référence	GTIN
	050501	5701780572491

Poches de nuit non stériles Conveen - Poches graduées



Intégralement remboursé*

Poches de nuit Conveen 1,5 l et 2 l

Boîte de 30 poches

	Référence	GTIN
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289
2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615



Si votre patient rencontre les symptômes suivants, conseillez-lui de contacter son médecin pour éliminer une éventuelle infection urinaire :

- **Sensation de brûlures** lorsqu'il urine
- **Urines troubles ou malodorantes, persistantes**, bien que la quantité d'urine quotidienne est $\geq 1,5$ litres. Si les urines sont concentrées, boire plus
- **Douleur** du bas ventre, fréquence et urgence d'uriner accrues
- **Fièvre** sans autre cause identifiée.

1. Se référer à la notice d'utilisation du produit utilisé.

2. Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 9 : Changement de la poche de nuit quotidien.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Conveen®: dispositifs médicaux destinés à recueillir passivement l'urine, de classe I, non stériles, marqués CE.

Conveen® Triform : Dispositifs médicaux destinés à recueillir passivement l'urine, de classe I, stériles, marqués CE 2460.

Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

Soins des stomies | Continence | Soins des plaies | Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée

Siège social : Le Move - 38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-Sous-Bois Téléphone : 01 56 63 17 00

Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL 312 328 362 - SIREN : 312 328 362

CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

www.coloplastprofessional.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK-3050 Humlebaek.

© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - PM-36837 - Février 2025 - PS



Coloplast