


Peristeen Irrigation Transanale

Guide d'utilisation étape par étape


Peristeen®

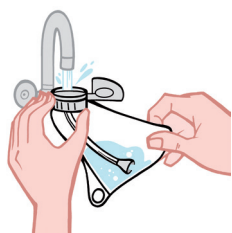


1. Remplir la poche d'eau tiède (36-38°C).
S'assurer que la poche soit remplie entièrement.




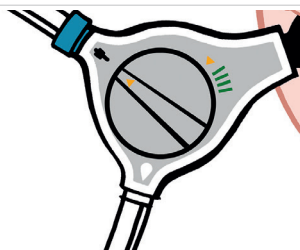
2. Ouvrir légèrement le sachet contenant la sonde.

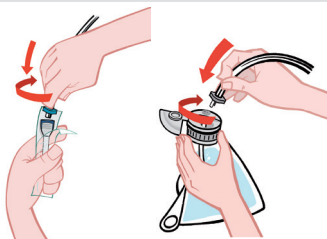


3. Raccorder les différentes parties entre elles.
Le bleu va avec le bleu et le gris avec le gris.
Pousser et tourner jusqu'au blocage des connecteurs.
Ne pas forcer.

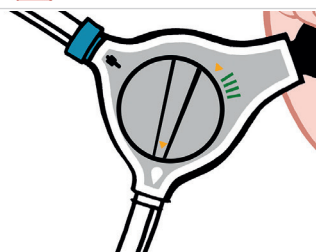

4. Tourner le curseur de l'unité de contrôle pour le positionner sur le symbole eau  et presser la poire jusqu'à immersion de la sonde dans le sachet.




5. Tourner le curseur sur le symbole ballonnet afin de couper l'arrivée d'eau. Laisser la sonde droite dans son sachet pendant 30 secondes pour permettre sa lubrification.

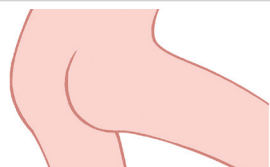


Poignée de
préhension


6. Maintenir la sonde par la poignée de préhension (voir illustration) et l'insérer délicatement et progressivement dans le rectum jusqu'au niveau de la poignée de préhension.
En cas de résistance ne pas forcer.

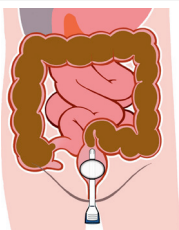


7. Presser la poire pour gonfler le ballonnet tout en maintenant la sonde


Nombre de pressions recommandées : _____
(maximum 4 pressions pour les sondes standard -
2 pour les courtes).

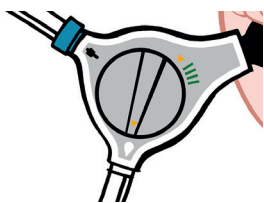

8. Tourner le curseur sur le symbole eau  et instiller l'eau doucement.

Quantité d'eau : _____ ml (généralement 500 à 1000 ml suffisent).
Respecter la quantité prescrite par votre médecin.

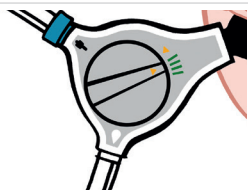


9. Une fois l'eau introduite dans l'intestin, tourner le curseur et le positionner sur le symbole vert  pour dégonfler le ballonnet. Puis retirer la sonde et la jeter.



10. Rester assis sur les toilettes, jusqu'à ce que l'eau et les selles s'évacuent. Se masser le ventre ou se pencher en avant peut faciliter l'exonération.



11. Ne pas oublier de tourner le curseur sur le symbole orange  pour vider la tubulure de son eau avant de ranger le matériel. Conserver le matériel dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la chaleur.



12. Ne pas oublier de se laver les mains.

Remarques :

- Lors de la période d'initiation à Peristeen, il est recommandé de pratiquer l'irrigation de manière quotidienne pour adapter les différents paramètres à chaque patient. L'irrigation pourra être ensuite espacée tous les 2 à 3 jours.
- La procédure d'apprentissage peut prendre 2 à 3 semaines.

N.B. Nettoyer la fiche après chaque utilisation.

Contactez immédiatement votre médecin si pendant ou après l'irrigation transanale, vous présentez l'un des symptômes suivants :

- douleur abdominale sévère et persistante ou douleur lombaire, particulièrement si elle s'accompagne de la fièvre,
- rectorragie (présence de sang dans les selles) persistante.

L'assistance conseil

Les conseillers Coloplast Care ont été spécialement formés à l'utilisation du système Peristeen. Pour toute question concernant l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à les contacter au :

0 800 01 58 68 

Lire attentivement la notice d'instructions (présente dans la boîte du produit) avant utilisation.