


# Peristeen Irrigation Transanale

Guide d'utilisation étape par étape

Peristeen®




1. Prépare le matériel dont tu as besoin pour faire caca.

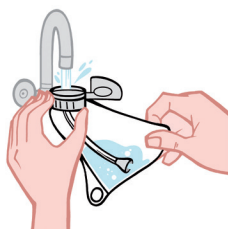


2. Remplis la poche d'eau tiède (36-38°C), assure toi que la poche soit remplie entièrement.




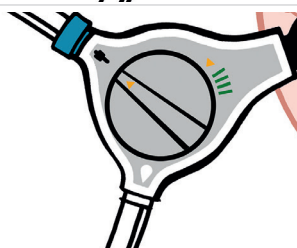
3. Ouvre juste un peu l'emballage de la sonde.

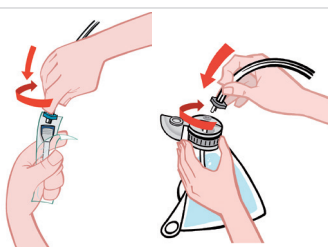


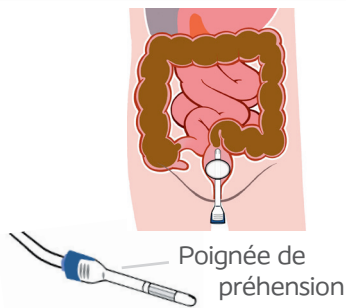
4. Assemble les différentes parties. Le gris va avec le gris et le bleu avec le bleu.

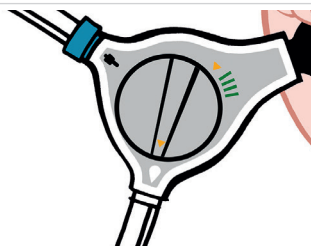


5. Tourne le bouton vers le symbole eau  et presse la poire jusqu'à ce que l'eau remplisse l'emballage de la sonde.




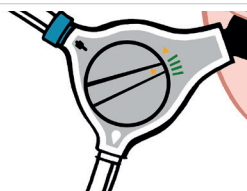
6. Tourne le curseur jusqu'au symbole ballonnet  pour que l'eau s'arrête de couler. Ne presse pas la poire pour le moment. Compte trois fois lentement jusqu'à 10 avant de faire autre chose.




7. Tiens la sonde par la poignée de préhension (voir illustration).  
 Insère la délicatement et progressivement dans tes fesses.  
 Puis presse la poire tout en maintenant la sonde en place.  
 Nombre de pressions recommandées : \_\_\_\_\_  
 (2 pressions pour les sondes courtes - maximum 4 pressions pour les sondes standard). Lorsque le ballonnet est gonflé, la sonde reste habituellement en place sans que tu aies besoin de la maintenir.

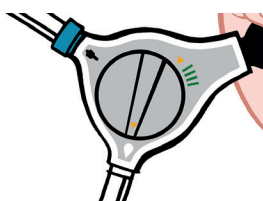

8. Reste assis sur les toilettes : tourne le curseur jusqu'au symbole eau  et presse doucement la poire pour que l'eau puisse arriver jusqu'à ton intestin.  
 Quantité d'eau : \_\_\_\_\_ ml (en moyenne 20 ml/kg pour un enfant).  
 Respecte bien la quantité prescrite par ton médecin.




9. Quand la quantité d'eau conseillée a été introduite, tourne le curseur jusqu'au symbole vert  pour dégonfler le ballonnet et retirer la sonde.




10. Remets la sonde dans son emballage et jette-la à la poubelle.



11. Attends patiemment jusqu'à ce que tu fasses caca.  
 Si tu n'y arrives pas, tu peux aider en poussant légèrement sur ton ventre. Cela peut prendre quelques minutes avant que tu fasses caca.

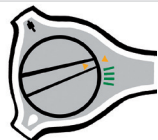

12. Tourne le curseur jusqu'au symbole orange  pour vider l'eau qui se trouve dans la tubulure.



13. N'oublie pas de vider la poche de son eau et lave toi les mains.  
 Et voilà tu as réussi.



**Remarques :** - Lors de la période d'initiation à Peristeen, il est recommandé de pratiquer l'irrigation de manière quotidienne pour adapter les différents paramètres à chaque patient. L'irrigation pourra être ensuite espacée tous les 2 à 3 jours.  
 - La procédure d'apprentissage peut prendre 2 à 3 semaines.  
 N.B. Nettoyer la fiche après chaque utilisation.

*Note aux parents : Si votre enfant présente pendant ou après l'irrigation transanale, l'un des symptômes suivants :*

- douleur abdominale sévère et persistante ou douleur lombaire, particulièrement si elle s'accompagne de la fièvre,
- rectorragie (présence de sang dans les selles) persistante.

Contactez immédiatement votre médecin

## Service Relations Utilisateurs

Les conseillers Coloplast ont été spécialement formés à l'utilisation du système Peristeen. Pour toute question concernant l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à les contacter au :

**0 800 01 58 68** 